Medtronic

Kit y dispositivo de trépano Sensight™ Especificaciones

Consulte el etiquetado para obtener detalles completos del producto.



B31000

Dispositivo de trépano Sensight™

(1) Dispositivo de trépano SenSight™ (base, herramienta de centrado, tornillos óseos, clip de soporte, tapa)

B32000

Kit de dispositivo de trépano Sensight™

Contenido del Kit:

- Dispositivo de trépano SenSight™ (base, herramienta de centrado, tornillos óseos, clip de soporte, tapa)
- (2) Herramientas de inserción (gris y azul: utilizar con Nexframe™*; sistemas estereotácticos y transparentes: utilizar con marcos estereotácticos)
- (1) Destornillador desechable

Poliamida, titanio, dióxido de titanio

Los kits de dispositivo de trépano SenSight™ de Medtronic se utilizan con un sistema de neuroestimulación para estimulación cerebral profunda (DBS). El dispositivo de trépano SenSight™ es un dispositivo implantado que se ha diseñado para cubrir un orificio de trepanación craneal de 14 mm y fijar un único electrodo direccional SenSight™ después de una intervención craneal. Para casos unilaterales, utilice el Modelo B32000; para casos bilaterales, utilice un Modelo B32000 y un Modelo B31000.

Tabla 1.Kit de dispositivo de trépano SenSight™ Modelo B3200 y dispositivo de trépano SenSight™ Modelo B31000³ Descripción Valor Área de superficie 24.6 cm²

a. Todas las medidas son aproximadas.

ser expuesto b, c, d

- b. Comente con el paciente las alergias y otras intolerancias relacionadas con materiales y sustancias antes del procedimiento. El área de superficie no incluye la herramienta de centrado.
- c. Probado para la categoría 1A o 1B de sustancias carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción (CMR) y sustancias químicas que provocan alteraciones endocrinas (EDC). No se han encontrado sustancias CMR o EDC conocidas en los materiales y sustancias enumerados en esta tabla.
- d. Los materiales mencionados se han ordenado de la mayor a la menor cantidad.

Materiales y sustancias a las que el paciente puede

Figura 1. Componentes del kit del Modelo B32000.



- 1 Herramienta de centrado (preacoplada)
- 2 Tornillo óseo (preinsertado)
- Base
- 4 Clip de soporte
- 5 Destornillador
- 6 Herramienta de inserción (gris y azul)
- 7 Herramienta de inserción (transparente)
- 8 Tapa

Nota: El empaque del dispositivo de trépano Modelo B31000 contiene el conjunto completo del dispositivo de trépano sin las herramientas de inserción ni el destornillador.

Productos relacionados

Tabla de compatibilidad

Electrodos Kit de electrodo direccional SenSight™ B33005

Kit de electrodo direccional SenSight™ B33015

Compatibilidad

Advertencia: Utilice únicamente componentes SenSight™ con o tros componentes SenSight™, a menos que el etiquetado del producto indiqueotra compatibilidad específica. No utilice componentes incompatibles. La utilización componentes incompatibles puede dañar el componente, provocar una estimulación intermitente o la pérdida de la estimulación y hacer necesaria una sustitución o revisión mediante una intervención quirúrgica.

Medtronic Colombia Av. Calle 116 # 7-15 Oficina 1101, Torre Cusezar Bogotá, Colombia Tel: +57 1 7427300 Medtronic Argentina Vedia 3616, 2º Piso, C1430DAH Buenos Aires, Argentina Tel: +54(11) 5789 8500

Medtronic Chile Rosario Norte 532, Piso 12 Los Condes, Región Metropolitana Santiago, Chile Tel: +56 2258 14993 Medtronic México Av. Insurgentes Sur 863 Piso 15 y 16 Benito Juárez, Nápoles, 03810, Ciudad de México Tel: 01 55 1102 9030 Medtronic Perú Av. Javier Prado Este 492, Cercado de Lima 15046 Perú Tel: +51 1 611 8700 Medtronic Panamá ARIFA Business Plaza piso 8 Santa María Business District Llano Bonito Panamá Tel: +507 271 7200 Medtronic Costa Rica VMG Business Center Guachipelin, Escazú San José Costa Rica Tel: +506 2293 4854

© 2022 Medtronic. Reservados todos los derechos. Medtronic, el logo de Medtronic y otros, son, en conjunto marcas registradas de Medtronic. Todas las demás marcas son marcas registradas de una compañía Medtronic. Covidien es una compañía que forma parte del grupo Medtronic.

