


1. Información General

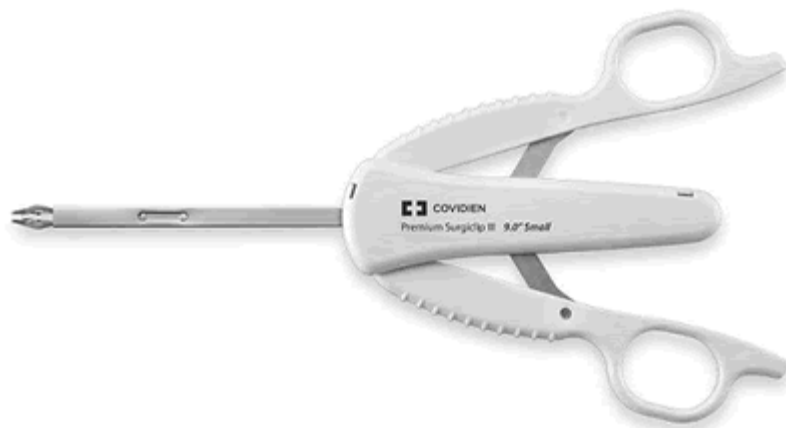

Producto (Según Registro Sanitario)	GRAPAS, GRAPADORAS Y GRAPAS CON GRAPADORA
Nombre Comercial	Aplicador de clips
Marcas	Covidien, Medtronic
Fabricante Legal	Medtronic Inc, USA
Número de Registro Sanitario	INVIMA 2013DM-0010508
Fecha de expiración del Registro Sanitario	28-10-2023
Clasificación del riesgo	III
Código GMDN	36126

2. Especificaciones

Composición	ABS GE, Acero Inoxidable, Aluminio, Policarbonato GE, Policarbonato 20% Vidrio, Policarbonato 20% de Cristal, Acetel Dupont Delrin, titanio, Nylon, PPA 40% relleno de vidrio, Polipropileno/Talco relleno, 21 SP Nylon
Presentación Comercial	Caja por 6 Unidades
Condiciones de Almacenamiento	Almacenar a temperatura ambiente. Evitar la exposición prolongada a temperaturas elevadas
Método de esterilización	Óxido de Etileno
Vida Útil	2 Años
Referencias	

Referencia	Descripción
134031	Premium Surgiclip™ Auto Suture™ Clip Applier 11.5' Medium
134044	Premium Surgiclip™ Auto Suture™ Clip Applier 9.75' Medium
134046	Premium Surgiclip™ Auto Suture™ Clip Applier 9' Small
134048	Premium Surgiclip™ Auto Suture™ Clip Applier 13' Large
134051	Premium Surgiclip™ II Auto Suture™ Clip Applier 9.75' Medium
134053	Premium Surgiclip™ II Auto Suture™ Clip Applier 11.5" Medium
133650	Premium SurgiClip™ III Clip Applier 9.0" Small

3. Descripción del Producto	
Indicaciones de Uso	El aplicador de clips Premium Surgiclip™, Premium Surgiclip™ II y Premium Surgiclip™ III se utilizan en muchos tipos de intervenciones quirúrgicas para ocluir vasos y otras estructuras tubulares y para vagotomías, simpatectomías y marcación radiográfica.

DESCRIPCIÓN

El aplicador de clips Premium Surgiclip™ consiste en un eje aplicador con mangos incorporados y un cartucho integrado que contiene 15 o 20 clips de titanio. La mordaza que aplica los clips se coloca alrededor del vaso u otra estructura tubular. A medida que se acercan los mangos del aplicador, el clip se cierra alrededor del vaso o de la estructura. A medida que se sueltan los mangos, automáticamente se carga otro clip en la mordaza del aplicador.

El aplicador de clips Premium Surgiclip™ II consiste en un cuerpo con mangos incorporados y un eje aplicador con un cartucho integrado que contiene 20 o 30 clips de titanio. El aplicador de clips

Premium Surgiclip™ II tiene una función de trinquete seleccionable. La posición ON del trinquete proporciona al instrumento control de la secuencia de cierre. El clip no se libera de la mordaza hasta que el dispositivo haya recorrido su ciclo completo. Una vez completado, los mangos volverán a su posición original y se cargará automáticamente un clip nuevo en la mordaza. En la posición OFF del trinquete, la secuencia de cierre es completamente manual. Si se relaja la presión sobre los mangos del dispositivo en cualquier momento durante la secuencia de cierre, el clip se soltará de la mordaza. Esta función permite que los médicos varíen el grado de cierre del clip en función de las necesidades clínicas. Una vez completado, los mangos volverán a su posición original y se cargará automáticamente un clip nuevo en la mordaza.

El aplicador de clips Premium Surgiclip™ III consiste en un eje aplicador con mangos incorporados y un cartucho integrado que contiene 20 clips de titanio. La mordaza que aplica los clips se coloca alrededor del vaso u otra estructura tubular. A medida que se acercan los mangos del aplicador, el clip se cierra alrededor del vaso o de la estructura. El producto consta de un mecanismo de trinquete para garantizar que el clip no se suelte hasta que se hayan comprimido por completo los mangos. A medida que se sueltan los mangos, automáticamente se carga otro clip en la mordaza del aplicador. Una vez aplicado el último clip, el producto se bloquea automáticamente a fin de impedir que se cierren los mangos.

NOTA: PARA LA CORRECTA UTILIZACION DEL DISPOSITIVO POR FAVOR LEER EL INSERTO DEL PRODUCTO

Originado por: Nombre: Adelaida Samper Cargo: Practicante	Fecha: 15/05/2020	Aprobado por: Nombre: Juan Atehortúa Cargo: Especialista de marketing A&I	Fecha: 28/05/2020
Revisado por: Nombre: Juan Atehortúa Cargo: Especialista de marketing A&I	Fecha: 28/05/2020		