


1. Información General

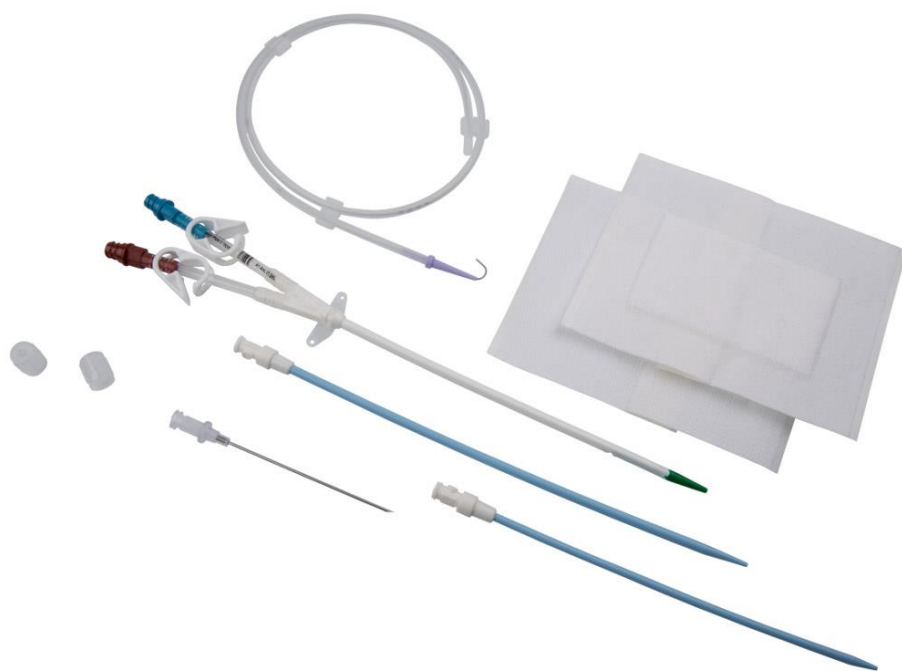

Producto (Según Registro Sanitario):

Catéteres para hemodiálisis y accesorios
Mahurkar, Mahurkar Maxid, Palindrome,
Quinton Permcath, Kendall

Nombre Comercial:

Catéter MAHURKAR™ QPlus

Marcas:

Covidien

Fabricante Legal:

Covidien LLC. - USA

Número de Registro Sanitario:

INVIMA 2019DM-0003614-R1

Fecha de Expiración del Registro Sanitario:

29 de Julio 2029

Clasificación del Riesgo:

III

Código GMDN:

42452

2. Especificaciones

Presentación Comercial	Caja x 5 Unidades.
Composición	Conectores ultem, extensiones de silicona con marcación laser, catéter de poliuretano.
Condiciones de Almacenamiento	Almacenar en un lugar fresco, alejado de la luz solar.
Método de Esterilización	Óxido de Etileno
Vida Útil	5 Años

3. Referencias

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ACCESORIOS
8888135132	Kit MAHURKAR™ QPlus 13.5 FR x 13.5 cms Extensiones Curvas	Aguja introductora 18G, guía metálica 0.035" 70 cms, dilatador 10 FR y 14 FR, apósito Telfa, 2 caps.
8888135133	Kit MAHURKAR™ QPlus 13.5 FR x 13.5 cms Precurvado	Aguja introductora 18G, guía metálica 0.035" 70 cms, dilatador 10 FR y 14 FR, apósito Telfa, 2 caps.
8888135161	Kit MAHURKAR™ QPlus 13.5 FR x 16 cms Extensiones Rectas	Aguja introductora 18G, guía metálica 0.035" 70 cms, dilatador 10 FR y 14 FR, apósito Telfa, 2 caps.
8888135162	Kit MAHURKAR™ QPlus 13.5 FR x 16 cms Extensiones Curvas	Aguja introductora 18G, guía metálica 0.035" 70 cms, dilatador 10 FR y 14 FR, apósito Telfa, 2 caps.
8888135163	Kit MAHURKAR™ QPlus 13.5 FR x 16 cms Precurvado	Aguja introductora 18G, guía metálica 0.035" 70 cms, dilatador 10 FR y 14 FR, apósito Telfa, 2 caps.
8888135191	Kit MAHURKAR™ QPlus 13.5 FR x 19.5 cms Extensiones Rectas	Aguja introductora 18G, guía metálica 0.035" 70 cms, dilatador 10 FR y 14 FR, apósito Telfa, 2 caps.
8888135192	Kit MAHURKAR™ QPlus 13.5 FR x 19.5 cms Extensiones Curvas	Aguja introductora 18G, guía metálica 0.035" 70 cms, dilatador 10 FR y 14 FR, apósito Telfa, 2 caps.

4. Descripción del Producto

Características	Catéter vascular no tunelizado doble lumen con extensiones rectas, curvas y precurvado, con las siguientes características: • Poliuretano. • Radiopaco. • Termosensible. • Ranuras laterales en corte laser que reducen probabilidad de oclusión. • Diseño simétrico de la punta que minimiza tasas de recirculación. • Punta cónica atraumática. • Alas (aspas) para suturas transparentes y giratorias. • Volúmenes de base impresos. • Disponible en kit
Indicaciones de Uso	Los catéteres vasculares MAHURKAR™, están indicados para: hemodiálisis, aféresis, infusiones, inyección de contraste a presión alta, supervisión de la presión venosa central. Y por sus múltiples diseños y longitudes puede ser de colocación yugular derecha, izquierda, femoral derecha o izquierda.
Contraindicaciones	El catéter no está previsto para ninguna otra finalidad distintas a las indicadas en esta ficha técnica.
Complicaciones Potenciales	Hematomas, estenosis, trombosis de vena central, septicemia, trombosis del catéter, infección del sitio de salida, traumatismo de un vaso importante o de la aurícula derecha; embolia gaseosa, taponamiento cardiaco, hemorragia, hemotórax, neumotórax, hematomas subcutáneos, arritmia cardiaca, lesión del plexo braquial.
Advertencias y Precauciones	• El catéter debe ser insertado y retirado únicamente por un médico cualificado. • Las posibles complicaciones debidas al uso de los catéteres en procedimientos ajenos a la hemodiálisis o aféresis son exclusivas responsabilidad de las personas que utilicen el catéter. • No utilice el catéter si se ha dañado o abierto previamente el envase. • Desechar tras su uso: el catéter es para una única inserción.

	• No intente limpiar ni esterilizar el catéter ni los accesorios. • Cumpla con las fechas de caducidad. • Siga técnicas estériles en todo momento al manipular el catéter. • Purgue el catéter correctamente antes de utilizarlo. Para ello utilice solución salina envasada en jeringa de 10 CC. • Si no se está utilizando el catéter bloquee cada lumen con heparina, de acuerdo con las cantidades marcada en cada extensión.
--	---

NOTA: PARA LA CORRECTA UTILIZACION DEL DISPOSITIVO POR FAVOR LEER EL INSERTO DEL PRODUCTO

Originado Por: Nombre: Maria Fernanda Acosta Cargo: Sr. Program Marketing Specialist	Fecha: 21 Junio 2023	Aprobado Por: Nombre: Yenny Carrillo Cargo: Commercial & Marketing leader LatAm	Fecha: 21 Junio 2023
--	-------------------------	---	-------------------------