

1. Información General



Producto (Según Registro Sanitario)	Tapones Nasales y Tapones Para Oído Merocei
Nombre Comercial	MeroCel Standard Nasal Packing
Marcas	MeroCel, HemoX, Meropack
Fabricante Legal	Medtronic Xomed, Inc., USA
Número de Registro Sanitario	2018DM-0018655
Fecha de expiración del Registro Sanitario	25 de Septiembre 2028
Clasificación del riesgo	IIA
Código GMDN	35895

2. Especificaciones

Composición	Merocel Esponja de PVA (Polyvinyl Acetal) Merocel HemoX Esponja de PVA (Polyvinyl Acetal) y celulosa oxidada
Presentación Comercial	Caja por unidad, 10, 20, 50 o 100
Condiciones de Almacenamiento	15-25°C, condiciones Normales de Humedad y Temperatura (RT)
Método de esterilización	Rayos Gamma
Vida Útil	3 Años
Referencias	

300501 Merocel® Surgical Patties, 13 mm x 13 mm
300503 Merocel® Surgical Patties, 13 mm x 25 mm
300505 Merocel® Surgical Patties, 13 mm x 51 mm
300506 Merocel® Surgical Patties, 13 mm x 76 mm
300507 Merocel® Surgical Patties, 25 mm x 25 mm
300509 Merocel® Surgical Patties, 25 mm x 51 mm
300510 Merocel® Surgical Patties, 25 mm x 76 mm
300514 Merocel® Surgical Patties, 83 mm x 83 mm
300515 Merocel® Surgical Patties, 7 mm x 76 mm
400141 Merocel® Pope Ear Wick, 9mm x 15mm
400144 Merocel® Pope Ear Packing 12mm x 24mm
400146 Merocel® Pope Ear Wick, 9mm x 24mm

400150 Merocel® Microspheres - 3mm
400151 Merocel® Microspheres - 4mm
400152 Merocel® Microspheres - 5mm
400162 Merocel® Ear Pack, 12mm x 24mm
400354 Merocel® Ambrus Ear Pack, 15mm x 20mm
400355 Merocel® Schindler Ear Packing, 12mm x 15mm, Drawstring
400356 Merocel® Schindler Ear Packing, 9mm x 13mm, Drawstring
400357 Merocel® Schindler Ear Packing, 9mm x 13mm, Drawstring
400400 Merocel® Standard Nasal Dressing, 4.5cm
400402 Merocel® Standard Nasal Dressing, 8cm
400403 Merocel® Standard Nasal Dressing, 8cm
400405 Merocel® Standard Nasal Dressing, 8cm
400406 Merocel® Pope Epistaxis Packing, 10 cm
400407 Merocel Baron Sinus-Pak, Drawstring, 2.5cm x 1.2cm x 2cm
400409 Merocel® Standard Nasal Dressing, 4.5cm
400410 Merocel® Standard Nasal Dressing, Airway, 8cm
400411 Merocel® Standard Nasal Dressing, Airway, 8cm
400412 Merocel® Doyle Nasal Dressing, 5.5cm
400413 Merocel® Doyle Nasal Dressing, 1cm
400416 Merocel® Doyle STAXI-STAT® Epistaxis Pack
400421 Merocel® Weimert Epistaxis Packing
400422 Merocel® Kennedy Sinus-Pak, Drawstring, 3.5cm x 1.2cm x 1.2cm
400423 Merocel® Toffel Sinus-Pak, Nasal Dressing
400424 Merocel® Doyle Nasal Dressing, 8 cm
400426 Merocel® Kennedy Sinus-Pak, 3.5cm x 0.9cm x 1.2cm
400427 Merocel® Baron Sinus-Pak, 2.5cm x 0.9cm x 2.0cm
400428 Merocel® Toffel Sinus-Pak
400460 Merocel® Silicone Airway Tube
400470 Merocel® EPISTAT® II Nasal Catheter
400515 Merocel® K.I.S.S., Kennedy Intranasal Surgical Sponge
400520 Merocel® Oro-Pak Endotracheal Tube Packing
400530 Merocel® Kennedy Sinus-Pak, 3.5cm x 0.6cm x 1.2cm
400531 Merocel® Baron Sinus-Pak, 2.5cm x 0.6cm x 2.0cm
400532 Merocel® Toffel Sinus-Pak
400611 Merocel® Neurosurgical Packing, 13 mm x 13 mm
400701 Merocel® Specialty Surgery Sponges, X-Ray Detectable 10 cm x 10 cm
400702 Merocel® Specialty Surgery Sponges, X-Ray Detectable 10 cm x 15 cm
400750 Merocel® ELVIS® Endoscopic Laparoscopic Visual Improvement Sponge
400751 Merocel® ELVIS® The Kit- 6 cc Anti-Fog Solution, Endoscopic Kit Wipe
400850 Merocel® Anti-Fog Sponge

400851 Merocel® Anti-Fog Kit
400900 Merocel® Femoral Canal Packing, 152 mm
400903 Merocel® Femoral Canal Packing, 20 cm
400905 Merocel® Acetabular Packing
425141 Merocel® Pope Ear Wick, 9 mm x 15 mm
440400 Merocel® Standard Nasal Dressing, 4.5cm
440402 Merocel® Standard Nasal Dressing, 8 cm
440406 Merocel® Pope Epistaxis Packing, 10 cm
440409 Merocel® Standard Nasal Dressing, 4.5 cm
440410 Merocel® Standard Nasal Dressing, 8 cm
440411 Merocel® Doyle Nasal Dressing, 8 cm
440412 Merocel® Doyle Nasal Dressing, 5.5 cm
440413 Merocel® Doyle Nasal Dressing, 1 cm
440416 Merocel® Doyle STAXI-STAT® Epistaxis Pack
440424 Merocel® Doyle Nasal Dressing
450141 Merocel® HemoX Pope Ear Wick, 9 mm x 15 mm
450146 Merocel® HemoX Pope Ear Wick, 9 mm x 24 mm
450355 Merocel® HemoX Schindler Ear Packing, 12 mm x 15 mm, Drawstring
450356 Merocel® HemoX Schindler Ear Packing, 9 mm x 13 mm, Drawstring
450400 Merocel® HemoX Nasal Dressing, 4.5 cm
450402 Merocel® HemoX Nasal Dressing, 8 cm
450406 Merocel® HemoX Pope Epistaxis Packing, 10 cm
450407 Merocel® HemoX Baron Sinus-Pak, 2.5cm x 1.2cm x 2.0cm
450409 Merocel® HemoX Nasal Dressing, 4.5 cm
450410 Merocel® HemoX Nasal Dressing, 8 cm
450411 Merocel® HemoX Doyle Nasal Dressing, 8 cm
450413 Merocel® HemoX Slim-Line Doyle Nasal Dressing, 8 cm
450416 Merocel® HemoX STAXI-STAT® Epistaxis Packing
450421 Merocel® HemoX Weimert Epistaxis Packing, 5.5 cm
450422 Merocel® HemoX Kennedy Sinus-Pak, 3.5cm x 1.2cm x 1.2cm
450424 Merocel® HemoX Doyle Nasal Dressing, 8 cm
450426 Merocel® HemoX Kennedy Sinus-Pak, 3.5cm x 0.9cm x 1.2cm
450428 Merocel® HemoX Toffel Sinus-Pak, 4.5cm x 0.9cm x 2.0cm
450530 Merocel® HemoX Kennedy Sinus-Pak, 3.5cm x 0.6cm x 1.2cm
450531 Merocel® HemoX Baron Sinus-Pak, 2.5cm x 0.6cm x 2.0cm
460406 Merocel® Pope FLEX-PAK® Epistaxis Packing
470401 MEROCEL® Merocel® 2000® Laminated Nasal Dressing, 4.5cm
470404 MEROCEL® Merocel® 2000® Laminated Nasal Dressing, 8 cm
470405 MEROCEL® Merocel® 2000® Laminated Nasal Dressing, 8 cm
470408 MEROCEL® Merocel® 2000® Laminated Nasal Dressing, 4.5 cm

470530 Meroce[®]l 2000[®] Kennedy Laminated Sinustent Dressing, 3.5 cm x 0.6cm x 1.2cm
470531 Meroce[®]l 2000[®] Baron Laminated Sinustent Dressing, 2.5 cm x 0.6cm x 2.0cm
1425008 Meroce[®]l Pope OTO-WICK[®] 9mm x 15mm
1425010 Meroce[®]l Pope OTO-WICK[®] 9mm x 24mm
1520000 Meropack[™] Bioresorbable Nasal Dressing and sinus Stent
1520001 Meropack[™] Bioresorbable Nasal Dressing and sinus Stent

3. Descripción del Producto

Indicaciones de Uso

Compresa nasal, compresa para epistaxis, compresa para seno, compresa para oído y mechas para oído para epistaxis, cirugía posoperatoria y traumatismo, que se expanden al humedecerse para facilitar el taponamiento y la hemostasia.

DESCRIPCION

Compresas y mechas de esponja absorbente de varios estilos y tamaños con hilos y tubos endotraqueales y sin ellos. Todas las dimensiones de la esponja absorbente son aproximadas y se basan en el producto en estado totalmente hidratado.

INSERCIÓN

- Las compresas y las mechas pueden recortarse al tamaño deseado.
- Recubra el borde delantero con un lubricante antibiótico.
- Sujete los hilos localizadores (si los hay) a la mejilla con esparadrapo.

Compresa nasal y compresa para epistaxis

- Inserte hilo de sutura hasta el extremo distal de la compresa como hilo localizador, si éste no se suministra.
- Sujete la compresa con unas pinzas e insértela por completo con cuidado a lo largo del suelo nasal.

Compresa para seno

- Con unas pinzas, sujete el extremo de la compresa que tiene el hilo e insértela (en posición lateral respecto al cornete medio) en el meato medio.

Compresa y mechas para oído

- Insértelas en el canal auditivo mediante espéculo ótico y unas pinzas.
- Instile lubricante antibiótico abundante alrededor de la compresa dejando el extremo proximal sin recubrir para permitir la hidratación.

EXPANSIÓN

Compresa nasal, compresa para epistaxis y compresa para seno

- Si las compresas no se expanden por completo, hidrátelas con 5-10 ml de agua estéril, solución salina o gotas de antibiótico.
- La temperatura del agua estéril, la solución salina o las gotas de antibiótico pueden afectar a la tasa de expansión del vendaje o de la compresa nasal. Una solución hidratante más fría se traduce

en una tasa de expansión más lenta. Una solución hidratante más caliente da lugar a una tasa de expansión más rápida.

IMPORTANTE

- Para mantener los tubos endotraqueales libres de obstrucciones, pruebe con irrigación, aceite mineral, gotas de silicona o vaselina.
- Para la compresa para seno Toffel, cree un canal a lo largo del suelo nasal utilizando un espéculo largo y estrecho. Inserte el extremo suave del tubo en primer lugar, hasta que el extremo con reborde quede al nivel del borde del orificio nasal.

Compresa para oído

- Hidrate el extremo proximal de la compresa con agua estéril, solución salina o gotas de antibiótico y diga al paciente que se instile gotas de antibiótico al menos dos veces al día.

Mechas para oído

- Hidrate con suspensión ótica acuosa y diga al paciente que se instile suspensión ótica en la mecha periódicamente hasta que ésta se extraiga.

DISPOSITIVO TIEMPO TÍPICO IN SITU

Compresa para seno Hasta 7 días

Compresa para epistaxis y compresa nasal 3-4 días

Compresa para oído Hasta 3 semanas

EXTRACCIÓN

Sature con agua estéril o solución salina, o con solución ótica para mechas para oído, y espere diez minutos. Sujete la mecha con unas pinzas y extraígalas con cuidado.

PRECAUCIÓN

No se recomienda utilizar la mecha para oído como cirugía posoperatoria.

NOTA: PARA LA CORRECTA UTILIZACION DEL DISPOSITIVO POR FAVOR LEER EL INSERTO DEL PRODUCTO

Originado por: Nombre: Alexandra García Cargo: Regulatory Affairs Specialist	Fecha: 22-Jun-2016	Aprobado por: Nombre: Natalia Valbuena Tovar Cargo: Regulatory Affairs Sr. Manager Latinoamerica	Fecha: 23-Jun-2016
Revisado por: Nombre: Fabiola Pacheco Cargo: Market Development Specialist	Fecha: 23-Jun-16		