

DIRECCION TECNICA

FICHA TECNICA INHALOCAMARA Código: FT-DT-024 Versión: 0

Fecha: 2021 Sep 01 Página: 1 de 1

INFORMACIÓN GENERAL		COMPONENTES DEL PRODUCTO		
Nombre:	INHALOCAMARA			
Fabricante:	BIOPLAST S.A.S			
Marca:	BIOLĬFE	1 Recipiente	1	
Vida Útil:	5 años	(parte 1)	2	
Procedencia:	Colombia	2 Recipiente		
Registro Sanitario INVIMA:	2019DM-0003863-R1	(parte 2) 3 Mascara	3	
Vigencia:	25 Enero 2029			
Clasificación de riesgo:	I			
Método de esterilización	No aplica			
Descripción y uso del producto	Desmontable para facilitar su limpieza, mascara ergonómica, suave y flexible, adaptable a la cara del paciente, diseñada exclusivamente para la anatomía del adulto, niño y recién nacido con una capacidad de 500ml. Cuenta con válvula unidireccional de flujo (opcional). Producto para la óptima dosificación de medicamentos en aerosol (mediante inhalación). Su propósito es mejorar la coordinación y disminuir la cantidad de partículas grandes que se pueden acumular en la cavidad bucal y en la garganta, al tiempo que permite el paso de las partículas terapéuticas más pequeñas, lo anterior elimina la necesidad de coordinar el movimiento de inhalación y la administración del medicamento. La Inhalocamara permite disminuir la presión de impacto del inhalador en la cavidad bucal y faríngea, facilitando la dispersión de partículas del tamaño óptimo para ser inhalada.			
Indicaciones y precauciones de uso	 Modo De Empleo: 1. Agite el inhalador. 2. Ajuste la boquilla. 3. Dispare la dosis. 4. Inhale lenta y profundamente. 5. Retenga la inhalación. 6. Repita el procedimiento hasta agotar el medicamento. Aseo y desinfección: Se debe limpiar el dispositivo y sus partes de acuerdo a los protocolos establecidos por el comité de epidemiología de la Institución. Al momento de desechar, realizar la limpieza del dispositivo de la misma forma que se enuncia en el punto anterior Uso bajo supervisión de un profesional del área médica. Conservar en un lugar fresco y seco. Uso de un solo paciente. 			
Advertencias	Ninguna conocida.			
Composición	Recipiente de polipropileno, Mascara de PVC			
Contraindicaciones	Ninguna conocida.			
Numero de Re-usos	Un solo uso. Producto Descartable.			
Presentación comercial:	 Envase: unidad en bolsa plástica Empaque: Adulto: 60 unidades en la caja de cartón corrugado. Pediátrica: 75 unidades en la caja de cartón corrugado. Neonato: 80 unidades en la caja de cartón corrugado. 			
Condiciones de almacenamiento	 Conservar el producto e humedad e iluminación Se debe utilizar estibas, fin de evitar la contamin 	Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos. Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no altere las características físicas del mismo. Se debe utilizar estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento del producto con el fin de evitar la contaminación directa con paredes y pisos. I disposición final de este producto se debe realizar según el protocolo interno de la institución		
Disposición final:	garantizado el cumplimier	tizado el cumplimiento del decreto 351 del 2014 (Febrero 19) del Ministerio de salud "Por la se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en la atención en salud y		

	ELABORO	REVISO	APROBO
CARGO	Asistente SGC	Director Técnico	Gerente General
NOMBRE	Maicol Perilla Triana	Nicolás Pinzón Hernández	Gustavo Pinzón Díaz