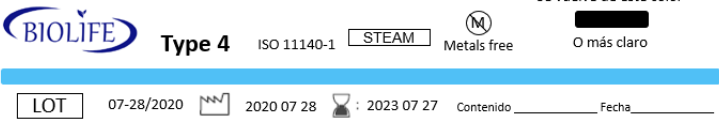


	DIRECCION TECNICA	Código: FT-DT-156
	FICHA TECNICA TIRAS INDICADORAS PARA VAPOR	Versión: 0 Fecha: 2021 Sep 01 Página: 1 de 1

INFORMACIÓN GENERAL		COMPONENTES DEL PRODUCTO
Nombre:	TIRA INDICADORA PARA VAPOR	 
Fabricante:	ANQING YIPAK PACKAGIN MATERIAL CO	
Marca:		
Vida Útil:	NO APLICA	
Procedencia:	CHINA	
Registro Sanitario INVIMA:	2014 DM-0011878	
Vigencia:	24 Septiembre 2024	
Clasificación de riesgo:	I	
Método de esterilización	No aplica	Distinto cambio de color azul a negro / marrón cuando se expone al proceso de esterilización por vapor. La tira está perforada, por lo que se puede usar en toda su longitud o en la mitad, según el tamaño del paquete. Un indicador químico de clase 4 ANSI / AAMI / ISO 11140-1: 2005 utilizado para determinar si las condiciones del proceso de esterilización se cumplieron dentro de cada paquete. Puede usarse en todos los ciclos de esterilización por vapor de 250-273 ° F. Asegúrese que en el momento de usar la cinta indicadora se encuentre con el color indicado antes de su uso. Este es un indicador químico. No es un indicador biológico. Papel crepe, adhesivo, químico impreso. Ninguna conocida Producto desechable Caja por 100 tiras. • Almacene en lugares frescos y secos, protegida de la luz solar. • Almacene lejos de fuentes de calor. • Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos. La disposición final de este producto se debe realizar según el protocolo interno de la institución garantizado el cumplimiento del decreto 351 del 2014 (Febrero 19) del Ministerio de salud "Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en la atención en salud y otras actividades".
Descripción y uso del producto		
Indicaciones y precauciones de uso		
Advertencias		
Composición		
Contraindicaciones		
Numero de Re-usos		
Presentación comercial:		
Condiciones de almacenamiento		
Disposición final:		

	ELABORO	REVISO	APROBO
CARGO	Asistente SGC	Director Técnico	Gerente General
NOMBRE	Maicol Perilla Triana	Nicolás Pinzón Hernández	Gustavo Pinzón Díaz

Toda copia magnética de este documento que se encuentre fuera de la RED \\192.168.0.6\Compartida\SGC BIOPLAST S.abackup\DOCUMENTACION PROCESOS debe entenderse como COPIA NO CONTROLADA y está fuera del alcance del Sistema de Gestión de BIOPLAST S.A.S., por lo tanto, es responsabilidad de la persona que la posea, comprobar la veracidad de la Información para garantizar que se encuentra actualizada.