

	FICHA TÉCNICA	FT- DT 061
		Versión: 4
		18-03-2021

GUANTE DE LÁTEX MULTIUSOS BAJO EN TALCO ®



NOMBRE GENÉRICO	Guante de Látex Multiusos Bajo en Talco
NOMBRE COMERCIAL	Guante de Látex Multiusos
MARCA	ALFASAFE ®
TIPO DE PRODUCTO	DISPOSITIVO MÉDICO
REGISTRO SANITARIO	2013DM-0002025-R1
VIGENCIA DEL REGISTRO	27 de Agosto de 2023
TIPO DE RIESGO	Clase IIa - Riesgo Moderado
VIDA ÚTIL	5 años



FICHA TÉCNICA

FT- DT 061

Versión: **4**

18-03-2021

DESCRIPCIÓN	• Guante examen de látex con talco. • Fabricados de látex de caucho natural grado alto de color blanco y/o natural por proceso de inmersión. • Ambidiestros. • Biodegradables. • Textura lisa, suave y ligero. • Dedos nivelados polvoreados con USP Silicato de Magnesio. • El puño reforzado minimiza el deslizamiento, mejora la resistencia y facilita el revestimiento del guante.
CARACTERÍSTICAS	• Máxima Calidad AQL 1.5 • Resistentes a la elongación. • Excelente resistencia a la punción y a la rotura. • Característico por su impermeabilidad, estabilidad y duración. • Guante antialérgico.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	• Humedad Relativa: MÁXIMA 70% • Temperatura: MÁXIMA 32C° • Almacenar en lugar fresco y seco, evitando los rayos directos del sol. • Inadecuadas condiciones de almacenamiento, carga y descarga brutal probablemente afectará la calidad de los productos.
ESTÁNDARES NORMATIVOS	Los guantes de látex multiusos cumplen con la norma ISO ASTM D3578-05 / ISO 2859-1 / EN 455
USOS	• El guante de látex multiusos ALFASAFE® puede ser utilizado en primeros auxilios, uso escolar, estética, jardinería, mascotas, hogar, mecánica. • Verificar que el dispensador se encuentre en buen estado, con el fin de garantizar la asepsia del producto. • Verificar que el guante esté dentro del periodo de vencimiento y que no presente pegajosidad, decoloración u otra característica anormal. • Abrir el dispensador por la línea punteada. • Tomar el guante que sobresale, halando de él hacia arriba y luego lateralmente. • Ponerse el guante en la mano dominante, ajustándolo hasta el sitio exacto con la otra mano. • Retirar el otro guante del dispensador y repetir el procedimiento para la mano no dominante. • Ajustar los guantes entrelazando las manos. • Para retirarlos, tomar el primer guante de la cara externa y el segundo de la cara interna.
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS	• Dispositivo para un solo uso. • Este producto contiene látex natural lo cual puede causar reacciones alérgicas. • Antes de su uso retirar de las manos cualquier objeto que pueda ocasionar rotura. • No aplicar algún tipo de sustancia antes de colocar el guante. • Una vez abierta la unidad utilizarlos en el menor tiempo posible. <i>"Todos los pacientes y sus fluidos corporales deben ser considerados como potencialmente infectantes y se debe tomar las precauciones necesarias para prevenir que ocurra transmisión."</i>

	FICHA TÉCNICA	FT- DT 061
		Versión: 4
		18-03-2021

DISPOSICIÓN FINAL	•Según la Norma Técnica de Manejo de Residuos Sólidos Hospitalarios se debe desechar como residuos peligrosos biológico-infecciosos. •En caso de que el producto se encuentre contaminado con residuos radioactivos, se colocarán en recipientes rígidos, los cuales deben estar rotulados con el símbolo de "peligro radioactivo".
--------------------------	--

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Talla size	Longitud / Largo Length (mm)	Ancho Width (mm)	Espeso (pared sencilla) (mm)			Gramaje unid.	Residuo de polvo	cantidad Humedad
			Punta dedo Finger tip (mm)	Palma Palm (mm)	Manga Cuff (mm)			
M	Min 240 ± 10	Min 95 ± 10	Min 0.08	Min 0.08	Min 0.08	Min 6.5	Max 10mg/dm²	Máximo 0.8% por guante

PROPIEDADES FÍSICAS

Antes de la fecha de vencimiento. Resistencia a la atracción: Min 18 MPa Elongación máxima: Min 650% Fuerza del quiebre: Min 9	Después de la fecha de vencimiento. Resistencia a la atracción: Min 14 MPa Elongación máxima: Min 500% Fuerza del quiebre: Min 6
---	---

PRESENTACIÓN COMERCIAL

CODIGO DE BARRAS	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN COMERCIAL	UNIDAD DE EMBALAJE (Unidad mínima de despacho)
770722836484 (EAN 13) 1770722836484 (EAN 14)	GULU001	GUANTE LATEX MULTIUSOS ALFASAFE TALLA M	Caja x 24 UND	Cartón x 88 cajas x 24 Unidades
770722836914 (EAN 13) 1770722836337 (EAN 14)	GULU002	GUANTE LATEX MULTIUSOS ALFASAFE TALLA S	Caja x 24 UND	Cartón x 88 cajas x 24 Unidades
770722836342 (EAN 13) 1770722836342 (EAN 14)	GULU003	GUANTE LATEX MULTIUSOS ALFASAFE TALLA L	Caja x 24 UND	Cartón x 88 cajas x 24 Unidades