


	FICHA TÉCNICA	FT-DT 078
		Versión: 7
		28-04-2021

JERINGA SIN AGUJA ALFA SAFE®

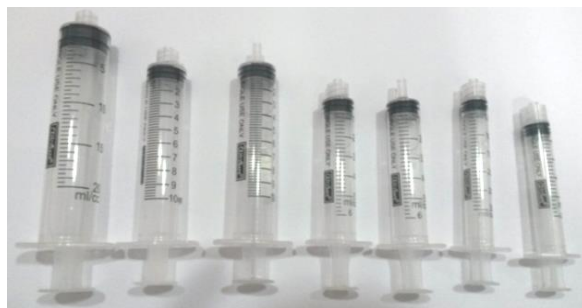

NOMBRE GENÉRICO	Jeringa sin aguja de tres partes
NOMBRE COMERCIAL	Jeringa Desechable sin Aguja
MARCA	ALFASAFE®
TIPO DE PRODUCTO	Dispositivo Médico
REGISTRO SANITARIO	2018DM-0001797-R1
VIGENCIA	06 de Febrero de 2028
TIPO DE RIESGO	Clase IIA Riesgo moderado
VIDA ÚTIL	5 AÑOS

DESCRIPCIÓN	•Dispositivo Médico estéril de un solo uso. •Tubo transparente con un conector de acople macho (LUER LOCK) en uno de sus extremos. •En el extremo cuenta con un pistón con embolo, movable. •Consta de empaque en papel grado médico, hermético, individual de fácil apertura, apirógeno. •El tipo de esterilización es ETO.
CARACTERÍSTICAS	•Alas de sujeción para fácil manejo, lo cual permite que la jeringa no se deslice en una superficie inclinada. •Embolo con disco estriado para mejor agarre. •Impresión de escala en tinta inyect, no borrrable, no removible, no contaminante, indeleble lo cual permite mayor exactitud en la dosificación. •Sistema Luer lock.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	•Humedad Relativa: MÁXIMA 70% •Temperatura: MÁXIMA 30C° •Almacenar en lugar fresco y seco. •Inadecuadas condiciones de almacenamiento, carga y descarga brutal probablemente afectará la calidad del producto.
ESTÁNDARES NORMATIVOS	Las jeringas Alfa Safe cumplen con la norma ISO7886-1:1993/CPJ-S,

	FICHA TÉCNICA	FT-DT 078
		Versión: 7
		28-04-2021

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS	•Dispositivo para un solo uso. •Una vez abierto el empaque estéril utilizarlo en el menor tiempo posible con el fin de evitar contaminación. •No almacenar en ambientes húmedos. •No utilizar si el empaque se encuentra abierto.
DISPOSICIÓN FINAL	•Según la Norma Técnica de Manejo de Residuos desechar como residuos peligrosos biológico-infecciosos. •En caso de que el producto se encuentre contaminado con residuos radioactivos, se colocarán en recipientes rígidos, los cuales deben estar rotulados con el símbolo de "peligro radioactivo"
USOS	•Verifique que el empaque de la jeringa no esté dañado y/o abierto. En cualquier de estos casos deséchela. •Abra el extremo del empaque y retire la jeringa. •Mantenga la punta de la aguja en el líquido en todo momento, no dejando que entre aire a la jeringa. Podría causar una dosis incorrecta. •Hale el émbolo lentamente para llenar la jeringa. El émbolo se detendrá automáticamente justo después de la marca de los ml. •Para eliminar las burbujas de aire y sosteniendo la jeringa en posición vertical, golpee la camisa para desplazar las burbujas hacia la punta de la jeringa. •Hale el émbolo para permitir que entre aire a través de la punta hasta que dicho aire entre en contacto con el aire en la camisa de la jeringa. Luego empuje con cuidado el émbolo hasta la dosis (ml), expulsando así la burbuja de aire. •Empuje el émbolo hasta el final para administrar la dosis correcta. El émbolo se bloqueará automáticamente para prevenir que la jeringa vuelva a ser utilizada. •Deseche la jeringa inmediatamente en un recolector.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

CAPACIDAD	GRADUACIÓN MÍNIMA	GRADUACIÓN NUMÉRICA	TIPO DE CONEXIÓN		CUERPO	
			LUER LOCK	LUER SLIP	Longitud mm	Diámetro mm
2 ml /cc	0.1 ml	cada 0.5 ml	X		60 ± 5	11 ±5
3 ml /cc	0.1 ml	cada 0.5 ml	X		60 ± 5	11 ±5
5 ml /cc	0.2 ml	cada 1 ml	X	X	63 ± 5	14 ±5
10 ml /cc	0.2 ml	cada 1 ml	X	X	67 ± 5	16,5 ±5
20 ml /cc	0.5 ml	cada 5 ml	X		94,5 ± 5	21 ±5

	FICHA TÉCNICA	FT-DT 078
		Versión: 7
		28-04-2021

PRESENTACIÓN COMERCIAL

CODIGO DE BARRAS	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN COMERCIAL (Unidad Mínima de Venta)	UNIDAD DE EMBALAJE
7707228366859 (GTIN 13) 17707228366856 (GTIN 14)	JESL001	JERINGA DESECHABLE SIN AGUJA 2 ML LUER LOCK	100 UNIDADES	3000 und. X 30 PLEGADIZAS
7707228366866 (GTIN 13) 17707228366863 (GTIN 14)	JESL002	JERINGA DESECHABLE SIN AGUJA 3 ML LUER LOCK	100 UNIDADES	3000 und. X 30 PLEGADIZAS
7707228366873 (GTIN 13) 17707228366870 (GTIN 14)	JESL003	JERINGA DESECHABLE SIN AGUJA 5 ML LUER LOCK	100 UNIDADES	2400 und. X 24 PLEGADIZAS
7707228366880 (GTIN 13) 17707228366887 (GTIN 14)	JESL004	JERINGA DESECHABLE SIN AGUJA 10 ML LUER LOCK	100 UNIDADES	1600 und. X 16 PLEGADIZAS.
7707228366910 (GTIN 13) 17707228366917 (GTIN 14)	JESL005	JERINGA DESECHABLE SIN AGUJA 20 ML LUER LOCK	50 UNIDADES	800 und. X 16 PLEGADIZAS.
770722836692 (GTIN 13) 17707228366894 (GTIN 14)	JESS001	JERINGA DESECHABLE SIN AGUJA 5 ML LUER SLIP	100 UNIDADES	2400 und. X 24 PLEGADIZAS
7707228366903 (GTIN 13) 17707228366900 (GTIN 14)	JESS002	JERINGA DESECHABLE SIN AGUJA 10 ML LUER SLIP	100 UNIDADES	1600 und. X 16 PLEGADIZAS.