

Máscara Nebulizadora

o Kit de Nebulización







CARACTERÍSTICAS

- Dispositivo utilizado para administrar medicamentos líquidos de rehabilitación pulmonar que convertidos a vapor son inhalados por el paciente.
- · Incluye contenedor nebulizador de 6cc para el medicamento. Compuesto por 3 piezas: Cuerpo, disyuntor y tapa.
- Su disyuntor permite romper las partículas a menos de 0.5 micras para mayor eficacia de la inhalación en un menor tiempo.
- Máscara con orificios laterales abiertos para la salida del vapor de la nebulización.
- · Clip metálico para ajuste a la nariz.
- · Incluye manguera de 2mt con diseño de dirección bilateral del oxígeno que permite que el oxígeno fluya de forma directa.
- Incluye acople de unión entre la máscara y el micronebulizador.
- · Desechable, para un solo uso.
- · Disponible en presentación: Pediátrica Estándar, Pediátrica Elongada, Adulto Estándar y Adulto Elongada.

RECOMENDACIONES DE USO

- · Coloque la medicación prescrita dentro del nebulizador.
- · Asegure el nebulizador enroscandolo a la tapa correctamente.
- · Conecte un extremo del tubo al nebulizador y el otro extremo a la fuente de oxígeno.
- Coloque la máscara en la cara del paciente, la banda alrededor de la cabeza por encima de las orejas, hale la banda y ajuste el soporte nasal hasta que la sienta segura.
- · Ajuste el flujo de oxígeno según lo indicado por el médico.
 - · No use si el empaque esta dañado o abierto.
 - · Para un solo uso. Deseche después de su uso.
 - · No almacene a temperaturas altas ni húmedas.
 - · Almacene en un lugar fresco y seco.
 - · Asegure que las conexiones esten seguras y que el aire circule libremente por la manguera.

PRESENTACIÓN	EAN 13 / Unidad	EAN 14 / Caja x 100 Uds.
Mascara Nebulizadora Estandar - S	770 727036 964 8	2 770 727036 964 2
Mascara nebulizadora elongada - M	770 727036 965 5	2 770 727036 965 9
MASCARA NEBULIZADORA ADULTO - L	770 727036 966 2	2 770 727036 966 6
Mascara nebulizadora adulto elon XL	770 727036 967 9	2 770 727036 967 3