

Máscara de Oxígeno



INCLUYE MANGUERA DE 2MT CON CONECTOR UNIVERSAL



CARACTERÍSTICAS

- · Dispositivo utilizado para administrar oxígeno, conformado por una máscara, un conector y una manguera.
- Diseñado para ajuste sobre boca y nariz mediante banda elástica.
- · Clip metálico para ajuste a la nariz.
- · Puerto de unión entre la máscara de oxígeno y la manguera para asegurar un óptimo ajuste.
- · Desechable, para un solo uso.
- Orificios laterales para inhalación y exhalación del paciente e intercambio del oxígeno administrado con el oxígeno del ambiente.
- · Incluye manguera de 2mt con diseño de dirección bilateral del oxígeno que permite que el oxígeno fluya de forma directa.
- · Con conector universal en ambos extremos.
- · Disponible en presentación unicolor: Pediátrica Estándar, Pediátrica Elongada, Adulto Estándar y Adulto Elongada.
- · Equipo con 5 años de vida útil luego de su fecha de fabricación.

RECOMENDACIONES DE USO

- · Conecte el tubo a la fuente de oxígeno y ajuste el flujo de oxígeno según la indicación médica prescrita.
- · Revise el flujo de oxígeno a través del dispositivo.
- · Coloque la máscara en la cara del paciente, la banda alrededor de la cabeza por encima de las orejas, hale la banda y ajuste el soporte nasal hasta que la sienta segura.
 - · No use si el empaque esta dañado o abierto.
 - · Para un solo uso. Deseche después de su uso.
 - · No almacene a temperaturas altas ni húmedas.
 - · Almacene en un lugar fresco y seco.
 - · Asegure que las conexiones esten seguras y que el aire circule libremente por la manquera.

PRESENTACIÓN	EAN 13 / Unidad	EAN 14 / Caja x 100 Uds.
MASCARA DE O ₂ ESTANDAR - S	770 727036 991 4	2 770 727036 961 1
MASCARA DE ${\rm O_2}$ PEDIATRICA ELONGADA - ${\bf M}$	770 727036 961 7	2 770 727036 961 1
MASCARA DE O ₂ ADULTO - L	770 727036 962 4	2 770 727036 962 8
MASCARA DE O, ADULTO ELONGADA - XL	770 727036 963 1	2 770 727036 963 5