

LÍNEA TERAPIA RESPIRATORIA

Tubo Endotraqueal con Balón





CARACTERÍSTICAS

- · Ideal para la entubación de pacientes que requieren de ventilación mecánica administrada.
- Mantiene permeable la vía aérea superior proporcionando al paciente una adecuada ventilación y oxigenación hacia los pulmones.
- · Consta de las siguientes partes:

Conector universal intermedio entre el tubo y el respirador o reanimador.

Cuerpo que constituye la parte principal, conductora del flujo entre el paciente y el respirador. Presenta una luz normalmente redonda que le confiere un diámetro interno a partir de los 2 mm.

Marcas de profundidad que nos indican a qué distancia se encuentra la punta del tubo desde la comisura labial.

Punta, parte distal del tubo y la primera que entra en contacto con el paciente. Su punta es biselada y tiene orificio de Murphy. La angulación de su bisel provoca un menor traumatismo en la vía aérea.

Balón: Ideales para intubaciones prolongadas. No apto para niños menores de 8 años.

- Estéril.
- Disponible en diámetro interno de 3.5mm, 4.0mm, 4.5mm, 5.0mm, 5.5mm, 6.0mm, 6.5mm, 7.0mm, 7.5mm, 8.0mm, 8.5mm, 9.0mm.
- · Vida Útil: 5 años.

RECOMENDACIONES DE USO

- · Antes de entubar desinfle el balón completamente.
- · Luego de la entubación infle el balón utilizando el volumen mínimo de aire requerido para asegurar un sellado efectivo.
- · Inmediatamente después de inflar, ausculte ambos pulmones. Si la respiración se siente disminuida en un pulmón o ausente en uno o ambos pulmones ajustar el tubo debidamente.
- La colocación del tubo endotraqueal debe ser confirmada observando la posición del extremo del tubo en una radiografía de tórax.

EMPAQUE: CAJA X10 UN.	MASTER X100 UN.
TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALÓN 3.5MM	770 727036 968 6
TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALÓN 4.0MM	770 727036 969 3
TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALÓN 4.5MM	770 727036 970 9
TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALÓN 5.0MM	770 727036 992 1
TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALÓN 5.5MM	770 727036 993 8
TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALÓN 6.0MM	770 727036 994 5
TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALÓN 6.5MM	770 727036 995 2
TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALÓN 7.0MM	770 727036 996 9
TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALÓN 7.5MM	770 727036 976 1
TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALÓN 8.0MM	770 727036 977 8
TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALÓN 8.5MM	770 727036 978 5
TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALÓN 9.0MM	770 727036 979 2

ADVERTENCIAS

- · Estéril si el empague no ha sido dañado o abierto.
- · No re-esterilice.
- · Para un solo uso. Deseche después de su uso.
- · Almacene en un lugar fresco y seco.

CERTIFICADOS: ISO 13485: 2003 - ISO 14155-1: 2003 - ISO 14155-2: 2003 EN 980: 2008 - EN1041: 2008 - ISO 14971: 2007

CERTIFICADOS DE ANALISIS DE ACUERDO CON LA EN1782: 1998 ISO 11607

