

SUPREME®


LÍNEA TERAPIA RESPIRATORIA

Cánula Nasal de Oxígeno



PUNTA ESTANDAR - TUBO DE 2MT.

Registro Sanitario INVIMA 2014DM-0012112

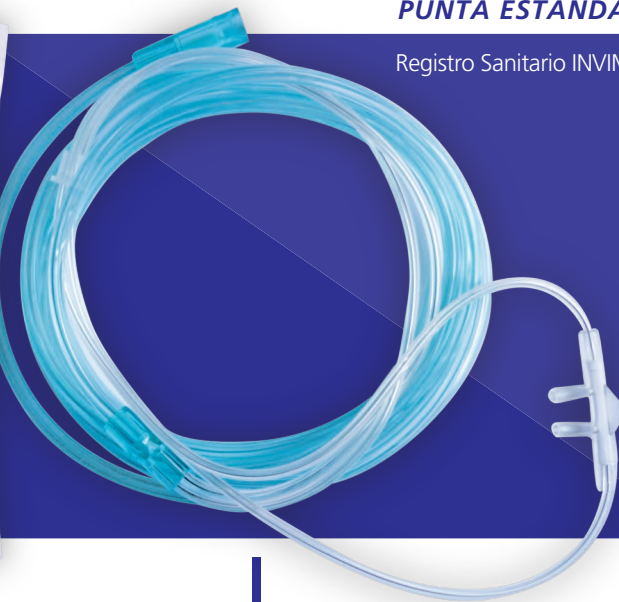

CARACTERÍSTICAS

- Ideal para administrar oxígeno en un porcentaje inferior al 40%.
- Ajuste cómodo y seguro.
- Elaborado con material suave, flexible, ajustable y delicado desde el conector hasta las narinas.
- Conector ajustable para acomodar longitud de la cánula bajo el mentón.
- Diseño de narinas redondo que permite mejor ajuste en las fosas nasales.
- Disponible con conector de tubería estándar o universal que permite la unión directa a medidor de flujo.
- Incluye manguera de 2mt con diseño de dirección bilateral del oxígeno que permite que el oxígeno fluya de forma directa.
- Desechable, para un solo uso.
- Disponibles en presentación para Neonato, Niño, Joven y Adulto.
- Equipo con 5 años de vida útil luego de su fecha de fabricación.

RECOMENDACIONES DE USO

- Conecte el tubo a la fuente de oxígeno.
- Revise el flujo de oxígeno a través del dispositivo.
- Ubique la cánula en las fosas nasales del paciente y el tubo detrás de las orejas y por debajo de la barbilla.
- Ajuste el flujo según indicación médica.

- No use si el empaque está dañado o abierto.
- Para un solo uso. Deseche después de su uso.
- No almacene a temperaturas altas ni húmedas.
- Almacene en un lugar fresco y seco.
- Asegure que las conexiones estén seguras y que el aire circule libremente por la manguera.

PRESENTACIÓN	EAN 13 / Unidad	EAN 14 / Caja x 100 Uds.
CÁNULA NASAL DE OXÍGENO NEONATO	770 727036 873 3	2 770 727036 873 7
CÁNULA NASAL DE OXÍGENO NIÑO	770 727036 874 0	2 770 727036 874 4
CÁNULA NASAL DE OXÍGENO JOVEN	770 727036 875 7	2 770 727036 875 1
CÁNULA NASAL DE OXÍGENO ADULTO	770 727036 876 4	2 770 727036 876 8

Importado y comercializado por:

PROTEX S.A.S.
medica

www.protexsa.com.co servicioalcliente@protexsa.com.co - PBX: (57-1) 5925544
Parque Industrial San José - Bodega 10 - 12 Manz. C Km.4 Vía Funza Siberia. C/marca, Colombia