

SUPREME[®]

TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALÓN

Endotracheal Tube - Cuffed

Instrucciones de Uso:

- Antes de intubar desinfecte el balón completamente.
- Luego de la intubación infle el balón utilizando el volumen mínimo de aire requerido para asegurar un sellado efectivo.
- Inmediatamente después de inflar, ausculte ambos pulmones.
- Si la respiración se siente disminuida en un pulmón o ausente en uno o ambos pulmones ajuste el tubo debidamente.
- La colocación del tubo endotraqueal debe ser confirmada observando la posición del extremo del tubo en una radiografía de tórax.

Sterile / Estéril / Stérile

Vías Aéreas Artificiales

- Esteril si el empaque no ha sido dañado o abierto.
- No Re-esterilice.
- Para un solo uso Deseche después de su uso.
- Almacene en un lugar seco y fresco.


Diámetro Interno (ID):

- | | | | |
|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| ☐ 3.5mm | ☐ 4.0mm | ☐ 4.5mm | ☐ 5.0mm |
| ☒ 5.5mm | ☐ 6.0mm | ☐ 6.5mm | ☐ 7.0mm |
| ☐ 7.5mm | ☐ 8.0mm | ☐ 8.5mm | ☐ 9.0mm |

20200531

PROTEX
www.protex.com.co info@protex.com.co
P.B. (57-1) 802644 Fax (57-1) 4287301
Paseo Interoceánico Sur, zona 1, Bogotá 19-1
Ruta 4, Km 4, Via Pácora, Bogotá, Colombia
Regimen Tributario 80106, 01-0268017111

LOT 20200531
MM 20200531
20250531

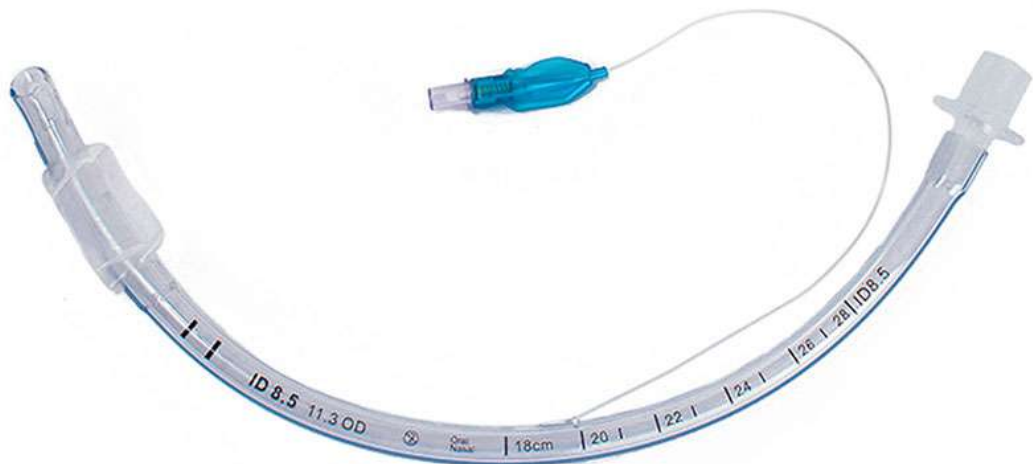

SUPREME[®]

TUBO ENDOTRAQUEAL SIN BALÓN

Endotracheal Tube - Uncuffed

Sterile / Estéril / Stérile

Vías Aéreas Artificiales

Recomendaciones de Uso:

- Seleccione el tubo de tamaño adecuado.
- Después de intubar ausculte ambos pulmones.
- Si la respiración se siente disminuida en un pulmón o ausente en uno o ambos pulmones ajustar el tubo según se requiera.
- La colocación del tubo endotraqueal debe ser confirmada observando la posición de la punta del tubo en una radiografía de tórax.

- Estéril si el empaque no ha sido dañado o abierto.
- No Re-esterilice.
- Para un solo uso Deseche después de su uso.
- Almacene en un lugar seco y fresco.

Diámetro Interno (DI):

- ☐ 2.0mm ☐ 2.5mm ☒ 3.0mm ☐ 3.5mm
☐ 4.0mm ☐ 4.5mm ☐ 5.0mm ☐ 5.5mm

Importado por **PROTEX**
www.protexsa.com.co info@protexsa.com.co
PSE: 05-11-802504 Fax: 05-11-808750
Parque Industrial San José - Bogotá 18 y 11
Manizales Km 4 Vía Pácora Suroeste, Colombia
Registro Sanitario: PROTEX 2514506-0012112

LOT 20200531
MM 20200531
20250531



Verificar Año

