

  		FICHA TÉCNICA DISPOSITIVOS MÉDICOS																					
																							
INDICACIONES: REALIZAR PROCESOS DE FRESADO Y SHAVER EN CIRUGIAS DE DIFERENTE TIPO PARA APLICACIONES EN OTORRINO, NEUROLOGIA, CIRUGIA PLASTICA, MAXILO FACIAL, RECONSTRUCCION DE CARA, CABEZA Y CUELLO, PEQUEÑAS CIRUGIAS DE MANO, PIE, COLUMNA, ETC.																							
INFORMACIÓN GENERAL																							
NOMBRE	SISTEMA DE FRESAMIENTO Y/O SHAVER PARA APLICACIONES EN MICROCIRUGIA-BIEN-AIR SURGERY SA																						
NOMBRE GENÉRICO	SISTEMA DE FRESAMIENTO Y SHAVER																						
MARCA	BIEN-AIR SURGERY SA.																						
PERMISO DE COMERCIALIZACIÓN	INVIMA EBC-0020415																						
COMPONENTES	EL PRESENTE REGISTRO AMPARA LOS MODELOS: OSSEOPRO, OSSEODUO, MODELOS DE PIEZA DE MANO: RECTA, CURVA, FISCH PM MICRO, PIEZA DE MANO RECTA Y CURVA INTRANASAL, PIEZA RECTA Y CONTRA ANGULO, PIEZA DE MANO OSSEOSTAP, OSSEOUNO Y OSSEOSTAP ADICIÓN DE REFERENCIA, Y TODAS SUS FRESAS MICROMOTOR RÁPIDO, ACCESORIOS Y REPUESTOS EXCLUSIVOS DEL EQUIPO																						
TIPO DE DISPOSITIVO	EQUIPO BIOMEDICO TERAPEUTICO																						
CLASIFICACION DE RIESGO	I	IIA	<table border="1"> <tr> <td>IIB</td> <td>III</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td></td> </tr> </table>	IIB	III	X																	
IIB	III																						
X																							
PAIS DE PROCEDENCIA	PRESENTACIÓN COMERCIAL																						
SUIZA	UNIDAD																						
																							
REFERENCIAS Y TAMAÑOS DISPONIBLES EN CUCHILLAS NASALES																							
 DOBLE SIERRA SIERRA SENCILLA LISA																							
IMAGEN		DIMENSIONES, PRODUCTOS CODIGOS Y ACCESORIOS																					
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ø mm</th> <th>DOBLE SIERRA</th> <th>SIERRA SENCILLA</th> <th>SUAVE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>5 pces/box</td> <td>5 pces/box</td> <td>5 pces/box</td> </tr> <tr> <td>3.0</td> <td>REF 1600538-005</td> <td>REF 1600541-005</td> <td>REF 1600544-005</td> </tr> <tr> <td>3.5</td> <td>REF 1600539-005</td> <td>REF 1600542-005</td> <td>REF 1600545-005</td> </tr> <tr> <td>4.0</td> <td>REF 1600540-005</td> <td>REF 1600543-005</td> <td>REF 1600546-005</td> </tr> </tbody> </table>		Ø mm	DOBLE SIERRA	SIERRA SENCILLA	SUAVE		5 pces/box	5 pces/box	5 pces/box	3.0	REF 1600538-005	REF 1600541-005	REF 1600544-005	3.5	REF 1600539-005	REF 1600542-005	REF 1600545-005	4.0	REF 1600540-005	REF 1600543-005	REF 1600546-005
Ø mm	DOBLE SIERRA	SIERRA SENCILLA	SUAVE																				
	5 pces/box	5 pces/box	5 pces/box																				
3.0	REF 1600538-005	REF 1600541-005	REF 1600544-005																				
3.5	REF 1600539-005	REF 1600542-005	REF 1600545-005																				
4.0	REF 1600540-005	REF 1600543-005	REF 1600546-005																				
REFERENCIAS Y TAMAÑOS DISPONIBLES EN CUCHILLAS NASALES																							
IMAGEN		DIMENSIONES, PRODUCTOS CODIGOS Y ACCESORIOS																					
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Dou DOBLE SIERRA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Desmontable para una limpieza óptima</td> <td>1 pce/box</td> </tr> <tr> <td>Ø mm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.0</td> <td>REF 1600579-001</td> </tr> <tr> <td>3.5</td> <td>REF 1600580-001</td> </tr> <tr> <td>4.0</td> <td>REF 1600581-001</td> </tr> </tbody> </table>		Dou DOBLE SIERRA		Desmontable para una limpieza óptima	1 pce/box	Ø mm		3.0	REF 1600579-001	3.5	REF 1600580-001	4.0	REF 1600581-001								
Dou DOBLE SIERRA																							
Desmontable para una limpieza óptima	1 pce/box																						
Ø mm																							
3.0	REF 1600579-001																						
3.5	REF 1600580-001																						
4.0	REF 1600581-001																						

TIPOS
DE
CUCHILLA

CONCAVA

CONVEXA



REFERENCIAS Y TAMAÑOS DISPONIBLES EN CUCHILLAS NAALES


IMAGEN	DIMENSIONES, PRODUCTOS CODIGOS Y ACCESORIOS		
	Ø mm	CONCAVA	CONVEXA
		5 pces/box	5 pces/box
	4.0	REF 1600570-005	REF 1600571-005
	15 ° - cuchilla curva - Doble sierra		
	Ø mm	CONCAVA	CONVEXA
		5 pces/box	5 pces/box
	3.0	REF 1600548-005	-
	4.0	REF 1600550-005	REF 1600559-005
	40 ° - cuchilla curva - Doble sierra		
	Ø mm	CONCAVA	CONVEXA
		5 pces/box	5 pces/box
	3.0	REF 1600573-005	-
	4.0	REF 1600574-005	REF 1600575-005
	40 ° - cuchilla curva - Doble sierra		
	CUCHILLA CORTANTE 3.0 mm		
	TUBO EXTERNO 3.5 mm		
	LARGO UTIL 10 mm		
	3 pces/box		
	REF 1600577-003		

REFERENCIAS Y TAMAÑOS DISPONIBLES EN CUCHILLAS NAALES

IMAGEN		DIMENSIONES, PRODUCTOS CODIGOS Y ACCESORIOS	
	CUCHILLA CORTANTE : 3.0 mm		
	LARGO UTIL : 3.5 mm		
	TUBO EXTERNO 110 mm		
	3 pces/box		
	REF 1600650-003		
	CUCHILLA CORTANTE 3.0 mm		
	LARGO UTIL 3.5 mm		
	TUBO EXTERNO 20 mm		
	3 pces/box		
	REF 1600576-003		
		cuchilla cilíndrica	

 Medinistros Equpos y dispositivos mcdicos			FICHA TCDICA DISPOSITIVOS MCDICOS 
---	---	---	--

REFERENCIAS Y TAMAOS DISPONIBLES EN CUCHILLAS NASALES	
---	--

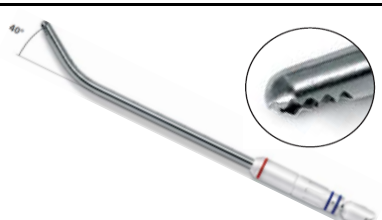IMAGEN	DIMENSIONES, PRODUCTOS CODIGOS Y ACCESORIOS
	CUCHILLA CORTANTE 3.0 mm LARGO UTIL 3.5 mm TUBO EXTERNO 30 mm 3 pces/box REF 1600578-003
	DOBLE SIERRA ORIENTACION CONVEXA TUBO EXTERNO 4.0 mm LARGO UTIL 120 mm 5 pces/box REF 1600572-005


REFERENCIAS Y TAMAOS DISPONIBLES EN CUCHILLAS LARINGEAS

	Ventana de orientaci3n c3ncava Tubo externo: Ø 3,5 mm 1 ud./caja Longitud 3til 220 mm: REF. 1600568-001 Longitud 3til 270 mm: REF. 1600569-001
--	--

REFERENCIAS Y TAMAOS DISPONIBLES EN CUCHILLAS NASALES

	El mando OSSEODUO est3 compuesto por una caja cerrada que incluye una pantalla de visualizaci3n de LCD en su cara frontal y diversas teclas de funci3n que permiten ajustar el aparato para la operaci3n prevista. En el lateral derecho del mando se encuentran las entradas para la conexi3n de los accesorios PIEZA DE MANO DE SHAVER-S80 y MICROMOTOR-80K, mientras que el pedal se conecta en la parte trasera. La bomba perist3ltica va montada en la parte trasera, donde tambi3n se encuentra el interruptor principal de encendido y el porta fusible.	Tensi3n de alimentaci3n 100- 240 VAC Frecuencia nominal 50/60Hz Fuente de Alimentaci3n Motores 2 conexiones r3pidas de tipo push-pull / <50 Vdc Clase de aislamiento I tipo B, seg3n EN 60601-1 Nivel de Protecci3n IP 41 Dimensiones Exteriores 370 x 115 x270mm / Altura con pescante: 485 mm Peso 4.6Kg Pantalla de visualizaci3n LED Opci3n de selecci3n entre SHAVER y perforaci3n Micromotor 80k Control de velocidad 4.000 a 80.000 rpm Ajuste de torque 0 a +/- 40 Nm Bomba de irrigaci3n de 15 a 130ml/min
	Este es un equipo diseado para microdebridaci3n, modelado de hueso y resecci3n de tejidos blandos y duros en el marco de intervenciones quir3rgicas de otorrinolaringolog3a	Tensi3n de alimentaci3n 100-240 V CA/ 2A-1A/ Frecuencia Nominal 50 / 60Hz Clase de aislamiento el3ctrico clase I Nivel de Protecci3n IP 41 Dimensiones Exteriores Altura con soporte: 520 mm Pesos 4.1 kg Bomba perist3ltica de 15 a 130 ml/min Soporte de acero inoxidable, altura 450mm

PIEZA DE MANO

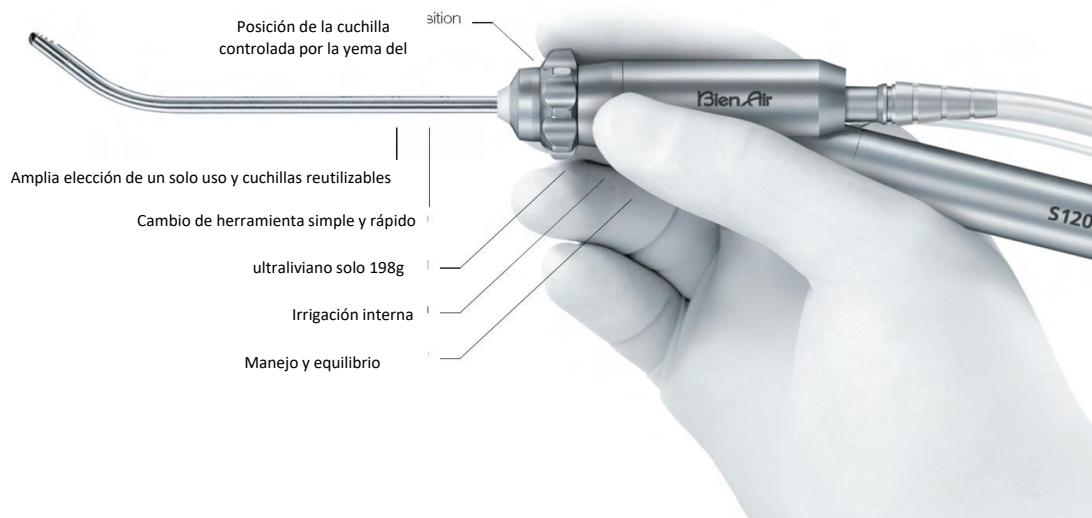


S120 Pieza de mano con cable Ref 1700302-001

LA PIEZA DE MANO S120: REDEFINIENDO ERGONOMÍA, CONFORT Y PRECISIÓN

La pieza de mano S120 con micromotor integrado es notable por su peso ligero, precisión extrema y facilidad de manejo. Con su ergonomía única e irrigación integrada, el S120 está marcado por su excepcional facilidad de manejo y perfecto equilibrio. Asegura operaciones de alta precisión, incluso en áreas de difícil acceso. Con un peso de sólo 198 g, la pieza de mano S120 es notablemente ligero. Estarás particularmente impresionado con él durante procedimientos largos, y notará una reducción considerable en la fatiga.

REFERENCIAS Y TAMAÑOS DISPONIBLES EN CUCHILLAS LARINGEAS

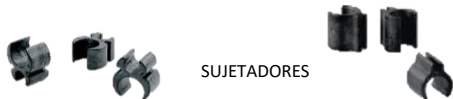

LUBRICANTE
Y
LIMPIADOR



ADVERTENCIAS



Único uso



Las cuchillas deben ser almacenadas a temperaturas entre 10°C y 30°C, humedad relativa de 25% a 75% condensación incluida y presión atmosférica de 500hPa hasta 1060hPa.