

ROMET - LARINGE ELECTRONICA

código interno	Descripción
162639	LARINGE ELECTRONICA ROMET REF RL-01 UND FT

INDICACIONES: DESPUÉS DE SOMETERSE A UNA CIRUGÍA POR LARINGECTOMÍA TOTAL O PARCIAL DEBIDO A CÁNCER DE GARGANTA O DAÑO ACCIDENTAL A LA LARINGE, CON LA CONSIGUIENTE ELIMINACIÓN DE LAS CUERDAS VOCALES, YA NO SE PUEDE HABLAR. ESTA CONDICIÓN SE DEBE A LA AUSENCIA DE VIBRACIONES PRODUCIDAS PREVIAMENTE POR LAS CUERDAS VOCALES. PARA SUPERAR ESTE DESAFÍO, NO HAY OTRA SOLUCIÓN QUE PRODUCIR ARTIFICIALMENTE ESTAS VIBRACIONES. LA ROMET® ELECTRONIC LARYNX O ELECTROLARINGE PRODUCE TALES VIBRACIONES Y PERMITE AL USUARIO EMITIR SONIDOS VOCALES CLAROS Y MUY COMPENSIBLES.

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE	ROMET ELECTRONIC LARYNX/ LARINGE ELECTRÓNICA ROMET -ELECTROLARINGE			
NOMBRE GENÉRICO	LARINGE ELECTRÓNICA ROMET -ELECTROLARINGE			
MARCA	FOUNTAIN HEAD MARKETING INC			
REGISTRO SANITARIO	2017DM-0017384			
CLASIFICACION DE RIESGO	I	IIA	IIB	III
		X		
VIDA ÚTIL	7 Años			
TIPO DE DISPOSITIVO	EQUIPO DE USO TERAPEUTICO			

PARTES Y COMPONENTES

1. MODELO RL-01 INSPIRATION
2. MODELO R310
3. MODELO R120
4. MODELO R310
5. MODELO R220



ACCESORIOS

PAIS DE PROCEDENCIA

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

PRESENTACIÓN COMERCIAL

UNIDAD POR CAJA CON ACCESORIOS

REFERENCIAS Y TAMAÑOS DISPONIBLES

REF.	IMAGEN	DIMENSIONES, PRODUCTOS CODIGOS Y ACCESORIOS
MODELO R120		• Interruptor encendido / apagado (Sin controles de volumen / tono) • 2 baterías de ion de litio • Cargador inteligente • Adaptador oral y 5 tubos • Cordón Cargue las baterías de Li-Ion en solo un cargador de Li-Ion. NO intente recargarlos con ningún otro cargador. NO coloque ninguna otra batería en el cargador, es decir, NiMH. Las pilas alcalinas normales de 9V funcionarán en su Laringe Electrónica Romet®.

REFERENCIAS Y TAMAÑOS DISPONIBLES

REF.	IMAGEN	DIMENSIONES, PRODUCTOS CODIGOS Y ACCESORIOS																										
MODELO R220		• Barril de aluminio pulido • Controles de volumen y tono • 2 baterías de ion de litio • Cargador inteligente • Adaptador oral y 5 tubos • Cordón Es fácil controlar su discurso con una sola mano. NO HAY HERRAMIENTAS NECESARIAS. Rueda de afinación: (a la izquierda) Gire la rueda para un fácil ajuste a un tono más alto o más bajo. No es necesario realizar ajustes adicionales después de haber alcanzado el nivel de tono deseado. Rueda de volumen: (a la derecha) Gire la rueda para facilitar el ajuste mientras habla para aumentar o disminuir su volumen de conversación para enfatizar.																										
MODELO R310		• Delrin Barrel con Soft Touch Grip • Controles de volumen y tono • 2 baterías de ion de litio • Cargador inteligente • Adaptador oral y 5 tubos • Cordón Puede estar en muchos lugares, ya sea en el cuello o en el costado de la boca; cada persona es diferente dependiendo de la textura de la piel y la cantidad de radiación que ha recibido.																										
MODELO R310		• 4 horas de tiempo de voz por carga • Paso ajustable • Volumen ajustable • Cuerpo pesado a prueba de golpes • Resistente al agua y al polvo • 2 baterías Li-Io en la caja • Estación de carga inteligente • 3.4 onzas con batería de iones de litio de 9V Unidad más liviana del mundo. • 9.5cm 3.75 "Más pequeño en longitud y diámetro • Tecnología 100% digital Fácil de ajustar Subida de volumen																										
MODELO INSPIRATION		<table><tr><th>Parámetros globales</th><th>Inspiración</th></tr><tr><td>Tono ajustable</td><td>Si</td></tr><tr><td>Volumen ajustable</td><td>Si</td></tr><tr><td>Rango total de tono</td><td>70-195Hz</td></tr><tr><td>Rango de tono base</td><td>70-121Hz</td></tr><tr><td>Rango de tono dinámico</td><td>45-70Hz</td></tr><tr><td>Rango de volumen</td><td>60-83dB</td></tr><tr><td>Rango de volumen dinámico</td><td>base +0,11dB</td></tr><tr><td>Tiempo de habla por carga</td><td>20-24h</td></tr><tr><td>Botones mecánicos</td><td>No</td></tr><tr><td>Botón táctil</td><td>1</td></tr><tr><td>Control deslizante táctil</td><td>1</td></tr><tr><td>carga USB</td><td>Si</td></tr></table>	Parámetros globales	Inspiración	Tono ajustable	Si	Volumen ajustable	Si	Rango total de tono	70-195Hz	Rango de tono base	70-121Hz	Rango de tono dinámico	45-70Hz	Rango de volumen	60-83dB	Rango de volumen dinámico	base +0,11dB	Tiempo de habla por carga	20-24h	Botones mecánicos	No	Botón táctil	1	Control deslizante táctil	1	carga USB	Si
Parámetros globales	Inspiración																											
Tono ajustable	Si																											
Volumen ajustable	Si																											
Rango total de tono	70-195Hz																											
Rango de tono base	70-121Hz																											
Rango de tono dinámico	45-70Hz																											
Rango de volumen	60-83dB																											
Rango de volumen dinámico	base +0,11dB																											
Tiempo de habla por carga	20-24h																											
Botones mecánicos	No																											
Botón táctil	1																											
Control deslizante táctil	1																											
carga USB	Si																											

ADAPTADOR ORAL

El adaptador oral y los tubos provistos con su laringe electrónica le permitirá comenzar a hablar mientras su cuello se esta curando tras la cirugía. Coloque firmemente el adaptador de tapa de goma en la parte superior de su Laringe electrónica. Inserte un tubo en el pequeño agujero en la parte superior del adaptador. Empuje el tubo firmemente en el orificio. El tubo debe estar seguro en el orificio del adaptador mientras habla. Coloque el extremo del tubo en la esquina de la boca, dirigiendo la punta hacia la parte superior de la boca. Los tubos transparentes tienen una puntas para evitar que las partículas de alimento se alojen en el tubo mientras se usa, Se puede quitar fácilmente esta punta o acortar el tubo con tijeras



ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

- * Evitar los golpes fuertes, pueden dañar el dispositivo
- * No sumergir el dispositivo en líquidos
- * Cargar la batería al nivel máximo antes de usarla a plena capacidad

CONTRAINDICACIONES

A la fecha no presenta ninguna contraindicación

ESTERILIZACIÓN

Estos dispositivos estan exentos de esterilización ya que se utilizan fuera del cuerpo, no son para uso interno

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Mantener en un lugar seco y a temperatura ambiente

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

No presenta riesgo de reacciones alérgicas. No es tóxico para el ser humano

DISPOSICIÓN FINAL

Todas las unidades estan fabricadas con materiales de alta calidad y circuitos sin plomo. Para su eliminación es preferible desechar la unidad entregando el producto a empresas de eliminación de residuos calificadas, que separan las piezas y reutilizan los materiales según lo exigen las reglamentaciones locales.

FARMINISTROS SAS **NIT: 900.720.163-6**
CALLE 72 No 22 -42 Ofc. 302 **TELEFONO: 5404920 ext 112**
TELEFAX: 2 17 42 39 **MOVIL: 316 467 00 29**
e-mail: direcciontecnicafarministros@gmail.com
Bogotá D.C. Colombia

