

ATOS MEDICAL - BOTON LARINGEO

código interno	Descripción
391259	BOTON LARINGEO PROVOX DE 14/8 mm REF. 7672 - FT
158706	BOTON LARINGEO PROVOX DE 16/18 mm REF. 7687 -FT
145357	BOTON LARINGEO PROVOX DE 16/8 mm REF. 7673 - FT
145450	BOTON LARINGEO PROVOX DE 16/8 mm REF. 7673 - FT
55163	BOTON LARINGEO PROVOX DE 18/18 mm REF. 7688 -FT
54902	BOTON LARINGEO PROVOX DE 18/8 mm REF. 7674 - FT
Por Asignar	BOTON LARINGEO PROVOX DE 12/18 mm REF. 7685 -FT
Por Asignar	BOTON LARINGEO PROVOX DE 12/8 mm REF. 7671 -FT
Por Asignar	BOTON LARINGEO PROVOX DE 14/18 mm REF. 7686 -FT

FICHA TÉCNICA BOTON LARINGEO- LARYBUTTON

1. DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO PROVOX LARYBUTTON



Es una cánula traqueal de silicona corta y autosujetable con mecanismos de autorretención para dispositivos del Provox HME. Mantiene el estoma abierto y actúa como soporte para otros dispositivos de rehabilitación del sistema Provox incluidos los HME cassettes (intercambiadores de calor y humedad) y los HME Provox Freehands (intercambiadores de calor y humedad Provox Manos Libres).

Larybutton está autoretenido en el estoma. Una vez insertado, permanece en su posición, aprovechando la propia elasticidad del tejido de la apertura traqueal, o que ayuda a que se mantenga en su posición proporcionando un sellado hermético. Naturalmente, también ayuda a prevenir el cierre del estoma.

2. INDICACIONES DE USO

Diseñado para la rehabilitación vocal y pulmonar después de una laringectomía.

Está particularmente recomendado para pacientes con una lámina de piel alrededor de la estoma (denominada “labio”), sin embargo otros usuarios pueden beneficiarse también de sus prestaciones.

No estéril, diseñado para utilizarse en un solo paciente. Vida máxima del dispositivo 6 meses.

3. MEDIDAS DISPONIBLES

LaryButton (tamaño)	REF
Provox LaryButton 12/8	7671
Provox LaryButton 14/8	7672
Provox LaryButton 16/8	7673
Provox LaryButton 18/8	7674
Provox LaryButton 12/18	7685
Provox LaryButton 14/18	7686
Provox LaryButton 16/18	7687
Provox LaryButton 18/18	7688
Provox LaryButton Medidor	7690

4. CONTRAINDICACIONES

Provox LaryButton no está diseñado para utilizarse en pacientes:

- Con cualquier tipo de ventilación mecánica
- Con tejido traqueal o de traqueostoma dañado


5. ADVERTENCIAS

- **NO** reutilice el dispositivo provox LaryButton en otro paciente. Este dispositivo se ha diseñado para utilizarse en un solo paciente. Su reutilización en otro paciente podría provocar contaminación cruzada.
- **NO** utilice geles lubricantes si el paciente tiene alergias relacionadas con estas sustancias.
- **ASEGÚRESE** de que el paciente se haya formado en el uso del dispositivo. El paciente deberá demostrar la capacidad para comprender y seguir de forma sistemática las instrucciones de uso sin la supervisión de un médico.

6. PRECAUCIONES

- Utilice siempre un Provox LaryButton del tamaño adecuado.

- Si el dispositivo Provox LaryButton es demasiado ancho, demasiado estrecho, demasiado largo o demasiado corto, es posible que provoque daño tisular, hemorragia o irritación. Así mismo, podría ser más difícil hablar, ya que el dispositivo LaryButton podría obstruir la prótesis de voz. La inserción, extracción y presión sobre el cassette HME puede presionar la prótesis de voz si el provox LaryButton no es del tamaño adecuado. Un LaryButton demasiado estrecho puede provocar el cierre del estoma.
- **NO** utilice la fuerza durante la inserción. Inserte y extraiga siempre el dispositivo provox LaryButton de acuerdo con las instrucciones siguientes. Si el producto se empuja demasiado lejos hacia el interior de la tráquea, podría obstruir la respiración. El uso de la fuerza durante la inserción puede provocar daño tisular, hemorragia o irritación, así como un desplazamiento accidental de la prótesis de voz o de Xtraflange, en su caso.
- Los pacientes con trastornos hemorrágicos o tratados con anticoagulantes no podrán usar el dispositivo si este provoca hemorragias recurrentes.
- **No** limpie nunca el dispositivo mientras se encuentre dentro del estoma, ya que esto podría provocar daños tisulares. Extraiga siempre el dispositivo del estoma antes de limpiarlo.
- **No** corte las pestañas ni modifique mecánicamente de ningún otro modo el dispositivo Provox LaryButton, ya que esto cambiará el diámetro externo o la estabilidad mecánica del producto.
- **No** perforo el dispositivo LaryButton, ya que dicha fenestración podría provocar el desplazamiento de la prótesis de voz o de XtraFlange (anillo de silicona destinado a reducir el escape periprotésico).
- Extraiga siempre el dispositivo del estoma antes de limpiarlo. No intente nunca limpiar el dispositivo mientras se encuentre dentro del estoma, ya que esto podría provocar daños tisulares y el desplazamiento de la prótesis de voz.

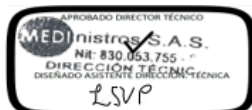

direcciontecnica@medinistros.com

Calle 72 No. 22 – 42 Oficina 301 Ed. Gioto

Bogotá D.C., Colombia

Teléfono: +57 (1) 540 4920 / 217 4253 Ext. 112

Móvil: +57 316 4670029 Fax: +57 (1) 217 42 39

www.medinistros.com