

INDICACIONES: ESTAS TOALLITAS ESTAN FABRICADAS CON ALCOHOL, PARA ASÍ LOGRAR UN ADECUADO HIGIENE, EN DONDE PRIME LA DESINFECCIÓN DEL ÁREA DE LIMPIEZA Y ASÍ LOGRAR UN PERFECTO HIGIENE.

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE	PROVOX TUBE BRUSH			
NOMBRE GENÉRICO	CEPILLO PROVOX			
MARCA	ATOS MEDICAL AB			
REGISTRO SANITARIO	INVIMA 2016DM-0014231			
COMPOSICIÓN	ALAMBRE, ALGODÓN, NYLON			
CLASIFICACION DE RIESGO	I	IIA	IIB	III
	X			
LUGAR DE FABRICACIÓN	SUECIA			
	PRESENTACIÓN COMERCIAL			
	6 UNID X EMPAQUE			



TOALLITAS PROVOX

IMAGEN	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
	Uso previsto El Provox Brush (cepillo) es un dispositivo para uso en un solo paciente indicado para la limpieza de la prótesis de voz Provox, la inserción del Provox Plug (tapón) y el Provox Vega Plug (tapón), la aplicación de lubricantes y agentes anticándida y la limpieza de los orificios de fenestración de la Provox LaryTube (cánula). No estéril, reutilizable. Para uso de un sólo paciente. Limpieza y desinfección Limpie el cepillo Provox después de cada uso como se indica en las figs. 4-7, con agua potable. Desinfecte el cepillo Provox (fig. 8) mediante uno de los métodos siguientes: • Etanol al 70 % durante 10 minutos • Alcohol isopropílico al 70 % durante 10 minutos • Agua oxigenada al 3 % durante 60 minutos No utilice el dispositivo hasta que esté completamente seco. Nota: limpie y desinfecte siempre antes de usar	7660 7661

PRECAUCIONES

- El dispositivo se ha diseñado para utilizarse en un solo paciente. Su reutilización en otro paciente podría provocar una contaminación cruzada.

DISPOSICIÓN FINAL

Al desechar un dispositivo médico usado, siga siempre la práctica médica y los requisitos nacionales sobre peligros biológicos