

The RUMI System® Disposable Uterine Manipulator Tip (HTA X LAP)



1. DESCRIPCIÓN

La punta de manipulación uterina RUMI® (punta) es un dispositivo estéril y de un solo uso que se conecta al asa reutilizable de manipulación uterina RUMI, RUMI Arch o Advincula Arch™. Los dos componentes juntos constituyen el sistema The RUMI System®, el cual permite la manipulación uterina.

Hay disponibles puntas en seis tamaños diferentes, los cuales se ilustran en el gráfico de arriba y se listan en la tabla de la página siguiente.

Las puntas de manipulación uterina de un solo uso RUMI se fabrican con un cuerpo de silicona USP clase VI (grado médico) con balón y una varilla de soporte interna de acero inoxidable. Al inflarse correctamente, el balón afianza la punta en el útero.

Dos catéteres de silicona se extienden desde la punta. Ambos catéteres incluyen un acoplamiento Luer Lock para conectar una jeringa. El catéter con balón posee una pinza de tubo para mantener la presión en el balón. El otro catéter permite infundir un tinte en el útero.

Fabricado sin látex de caucho natural

2. INTENCIÓN DE USO

La punta está diseñada para usarse solo con los mangos RUMI, RUMI II, RUMI Arch® y Advincula Arch™.

3. CÓDIGOS / REFERENCIAS / N° DE PARTE

N° DE PARTE	NOMBRE
UMY514	The RUMI System® Disposable Uterine Manipulator Tip, 5.1mm x 3.75cm
UML516	The RUMI System® Disposable Uterine Manipulator Tip, 5.1mm x 6cm
UMW676	The RUMI System® Disposable Uterine Manipulator Tip, 6.7mm x 6cm
UMB678	The RUMI System® Disposable Uterine Manipulator Tip, 6.7mm x 8cm
UMG670	The RUMI System® Disposable Uterine Manipulator Tip, 6.7mm x 10cm
UMO672	The RUMI System® Disposable Uterine Manipulator Tip, 6.7mm x 12cm

4. CONDICIÓN BIOLÓGICA

Estéril por Óxido de Etileno

5. VIDA ÚTIL

3 años

6. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Mantener seco. Almacenar a temperatura ambiente.

7. FORMA DE PRESENTACIÓN

Caja de cartón x 5

8. REGISTRO INVIMA

INVIMA 2022DM-0025761

9. NUMERO DE LOTE

El número de lote se verificara al momento de la entrega