



RUMI® II Koh-Efficient – Uterine Manipulator HTA X LAP



1. DESCRIPCIÓN

El RUMI® II Koh-Efficient™ es un delineador de fórnices vaginales, estéril y de un solo uso con un Colpo-Pneumo Occluder™ integrado. Está fabricado de plásticos de calidad médica con un KOH Cup™ rígido de resina polimérica Ultem®. La versión compatible con láser/bisturí armónico (KCS-RUMI) está equipada con una superficie distal de acero inoxidable. Fabricado sin látex de caucho natural. Fabricado sin látex de caucho natural. El RUMI II Koh-Efficient (Koh-Efficient) es compatible con el asa RUMI® II (asa) y la punta de manipulación uterina RUMI® (punta). Estos tres productos, usados en conjunto con el medidor cervical (medidor), permiten la inserción sin obstrucciones de una punta estándar en el útero. Una vez colocado, se hace avanzar el Koh-Efficient a lo largo del brazo del asa hasta que se fija en su lugar alrededor del cuello uterino.



2. INTENCIÓN DE USO

El Koh-Efficient es una combinación de KOH Cup y Colpo-Pneumo Occluder que está indicada para uso en procedimientos laparoscópicos cuando se necesita ubicar la posición de los fórnices vaginales, generalmente durante una histerectomía laparoscópica e histerectomía laparoscópica supra-cervical.

3. CÓDIGOS / REFERENCIAS / N° DE PARTE

N° DE PARTE	NOMBRE
KC-RUMI-25	RUMI® II Koh-Efficient – 2.5 cm, for use with the RUMI® II Handle
KC-RUMI-30	RUMI® II Koh-Efficient – 3.0 cm, for use with the RUMI® II Handle
KC-RUMI-35	RUMI® II Koh-Efficient – 3.5 cm, for use with the RUMI® II Handle
KC-RUMI-40	RUMI® II Koh-Efficient – 4.0 cm, for use with the RUMI® II Handle
KCS-RUMI-25	RUMI® II Koh-Efficient – 2.5 cm, for use with the RUMI® II Handle
KCS-RUMI-30	RUMI® II Koh-Efficient – 3.0 cm, for use with the RUMI® II Handle
KCS-RUMI-35	RUMI® II Koh-Efficient – 3.5 cm, for use with the RUMI® II Handle
KCS-RUMI-40	RUMI® II Koh-Efficient – 4.0 cm, for use with the RUMI® II Handle

4. CONDICIÓN BIOLÓGICA

Estéril por óxido de etileno

5. VIDA ÚTIL

3 años

6. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar a temperatura ambiente.

7. FORMA DE PRESENTACIÓN

Caja de cartón x 5

8. REGISTRO INVIMA

INVIMA 2022DM-0025761

9. NUMERO DE LOTE

El número de lote se verificara al momento de la entrega