


FICHA TÉCNICA

EPIX® TIJERA LAPAROSCÓPICA

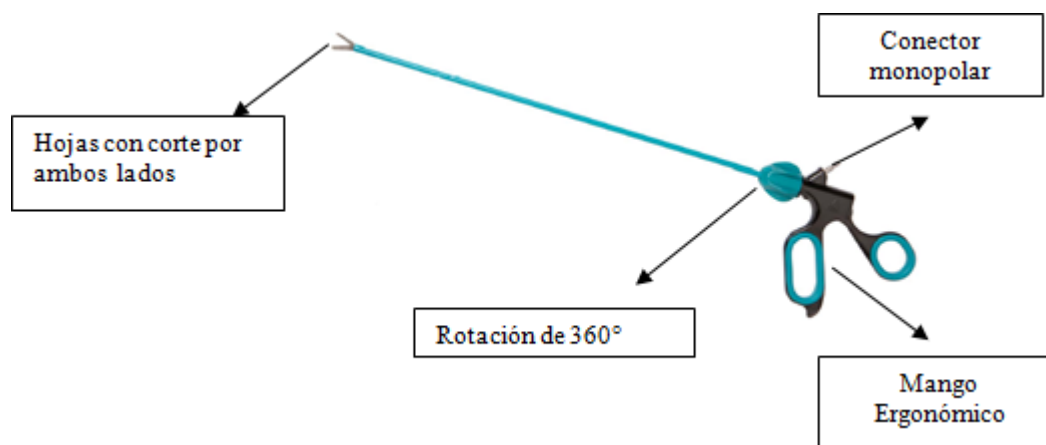

Descripción

La tijera Epix® es un dispositivo estéril y de un solo uso.

Es la única tijera con hojas con doble filo, que permite hacer una transección delicada de tejido usando el extremo distal de las hojas y con la parte proximal permite el corte de tejido fibrótico, o material de sutura si se requiere, sin alterar el contacto de las hojas y su posterior desempeño.

El alto grado del acero inoxidable que constituye las hojas, permite un corte definido, incluso por encima del amplio uso. Mediante la eliminación de las ranuras y salientes, las tijeras Epix® cuentan con un diseño de bajo perfil, que facilita su paso a través del sello del trocar.

Indicaciones

Las tijeras están indicadas en intervenciones por laparoscopia de cirugía general, abdominal, ginecológica, urológica y torácica, mínimamente invasivas, con el propósito de realizar disección y corte de tejidos. Todos los componentes están elaborados en materiales libres de látex.

Descripción Materiales

Parte	Material
Mango	Policarbonato Acero Inoxidable Colorante negro MKS-7005PC Colorante Omni color, azul marino UN 66088 Poliamida Kraton G2705Z Grasa de silicona
Tubo	Lustran ABS natural 452 Colorante Omni color, azul marino UN 66088 Tinta negra PG1NT Acero inoxidable
Punta (Tijeras)	Acero Inoxidable
Cubierta	Meliflex XS119-72 ^a Colorante Amarillo sunflower UN 1625
Protector de la punta	Polietileno de baja densidad

FICHA TÉCNICA

Características y Beneficios

- Precisión y fuerza
- Gracias al conector monopolar permite realizar electrocoagulación antes de cortar.
- Posee un dial que permite una rotación de 360°, y permite una simple manipulación digital con una sola mano.
- Mango ergonómico: Aumenta la comodidad del cirujano, por su diseño y los insertos suaves en el mango.



HOJAS CON CORTE POR AMBAS CARAS

- Permite dividir el tejido fibrótico sin destruir la unión de la tijera
- Permite corte transversal y disección de tejido fino
- Mantiene el corte a pesar de un uso extenso.



MECANISMO BAJO PERFIL

- Elimina ranuras y prominencias, asegurando completo aislamiento hacia las hojas de corte.
- Vaina completamente aislada

Advertencia

- No utilice el producto si está defectuoso o si su empaque estéril está dañado.

Precauciones

- Debe verificarse que las hojas sean completamente visibles
- Puede surgir daños si se intenta recortar clips o grapas.
- No insertar o retirar por los sistemas trocar las tijeras con las hojas abiertas.
- Aplicar corriente en las tijeras directamente a grapas o clips.
- Maneje este producto con cuidado.
- Guárdelo en áreas limpias, frescas y secas, alejadas de vapores químicos.

Presentación



FICHA TÉCNICA

Estéril con Rayos Gama. Un solo uso.

Todos los productos de Applied Medical están libres de látex.

Manejo y Almacenamiento

Maneje este producto con cuidado. Guarde el producto en un lugar limpio, fresco y seco, al resguardo de vapores químicos.

Disposición final del producto

La tijera Epix[®], se debe desechar después de su uso de acuerdo a la norma vigente en el país o en el caso de Colombia de acuerdo al código de colores.

Información importante sobre la garantía

1. Garantía limitada: Applied garantiza que el producto: (i) se ajustará a las especificaciones suministradas por escrito al comprador, y (ii) cumplirá, en el momento del envío, con los requisitos vigentes del Decreto de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos de EE.UU. y los reglamentos promulgados conforme a dicho decreto.
2. Reclamaciones en garantía: En el caso de que algún producto no cumpla con las especificaciones estipuladas anteriormente en la garantía limitada, Applied a su discreción: (i) reparará o sustituirá el producto corriendo con todos los gastos; o (ii) reembolsará el precio de compra total del producto. Las obligaciones de Applied según esta sección están sujetas al cumplimiento, por parte del comprador, de todas las instrucciones y requisitos relacionados con el uso del producto.
3. Exclusión de otras garantías y recursos: salvo lo estipulado anteriormente, Applied excluye todas las demás garantías, sean expresas o implícitas, impuestas por las leyes o por cualquier otro conducto, incluidas (sin limitaciones) las garantías implícitas de comercialización o idoneidad para un fin determinado. Applied, no se responsabilizará en ninguna circunstancia, de pérdidas, perjuicios o gastos fortuitos o secundarios que se originen directa o indirectamente del uso del producto.

Referencias

Referencia	Descripción del producto
CB030	EPIX [®] TIJERA LAPAROSCÓPICA DESECHABLE DE 5mm x 35 cm
CB040	EPIX [®] TIJERA LAPAROSCÓPICA DESECHABLE DE 5mm x 45 cm

REGISTRO INVIMA

INVIMA 2018DM-0003344-R1