

 NIPRO MEDICAL CORPORATION COLOMBIA	NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA	CÓDIGO	FI-CCAA-071
		PÁGINA	1 de 3
	FICHA TÉCNICA	VERSIÓN	01
		FECHA APROBACIÓN	08-03-2023
		FECHA VIGENCIA	08-03-2026

BATA QUIRURGICA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	Las batas quirúrgicas para pacientes tienen la finalidad de evitar contacto con las salpicaduras de fluidos y/o sangre.	
CODIGO SAP	HC-SSG-M HC-SSG-L HC-SSG-XL HC-SSG-XXL	
PESO EN GRAMOS	36gsm±2gsm	
MATERIAL	100% SMS	
COLOR	Azul	
APLICACIONES	Alta resistencia a fluidos, con la finalidad de evitar el contacto por salpicaduras de fluidos y/o sangre.	
	No produce partículas, evitando así	
	Problemas alérgicos al contacto con la piel, brindando suavidad. Sellado con ultrasonido, garantizando alta resistencia y protección.	
	Diseño que brinda comodidad, no causa malestar en el usuario, permite movimientos libres en los usuarios	
	Práctico empaque que permite mayor asepsia del producto antes de su manipulación No es tóxico.	
INSTRUCCIONES DE USO	1. Lavar las manos antes de ponerlo y después de utilizarlo. 2. La bata debe cubrir la zona de tronco hasta a la altura de la rodilla preferiblemente 3. La bata no debe quedar forrada al cuerpo.	

1. PRODUCTO

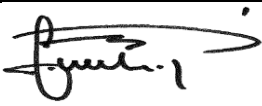
Bata Quirúrgica

2. MARCA

NIPRO

3. FABRICANTES Y ORIGEN

Xiantao Deming Healthcare Products CO., LTD. China.

Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
				 Liliana María Tello Irreño Directora de Calidad y Asuntos regulatorios Dirección Técnica NIPRO MEDICAL CORPORATION COLOMBIA SAS	
Nombre:	Sandra Cortés	Nombre:	Julio Pedraza	Nombre:	Liliana María Tello Irreño
Cargo:	Inspectora de calidad	Cargo:	Gerente División Hospitalaria	Cargo:	Director Técnico
Fecha:	13-01-2023	Fecha:	13-01-2023	Fecha:	13-01-2023

 NIPRO MEDICAL CORPORATION COLOMBIA	NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA		CÓDIGO	FI-CCAA-071
	FICHA TÉCNICA		PÁGINA	2 de 3
			VERSIÓN	01
			FECHA APROBACIÓN	08-03-2023
			FECHA VIGENCIA	08-03-2026

4. REGISTRO SANITARIO

REGISTRO SANITARIO INVIMA INVIMA No.	2021DM-0024592
VIGENCIA	18 noviembre 2031
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	I (Riesgo bajo) Es un dispositivo médico de riesgo moderado, sujeto a controles especiales en la fase de fabricación para demostrar su seguridad y efectividad.

5. INFORMACIÓN DE TALLAS

BATAS QUIRURGICAS DIMENSIONES							
TALLA M				TALLA XL			
Descripción	Medida (cm)	Tolerancia (cm)		Descripción	Medida (cm)	Tolerancia (cm)	
A	Ancho de hombro	22	./-1	A	Ancho de hombro	28.5	./-1
B	Ancho de pecho	75	./-2	B	Ancho de pecho	82	./-2
C	Longitud de las mangas	57	./-2	C	Longitud de las mangas	60	./-2
D	Altura de la sisa	28	./-1	D	Altura de la sisa	30	./-1
E	Longitud del puño elástico	5	./-1	E	Longitud del puño elástico	5	./-1
F	Ancho del cuello	24	./-1	F	Ancho del cuello	25	./-1
G	Ancho de manga	16	./-1	G	Ancho del manga	16	./-1
H	Altura total	125	./-2	H	Altura total	145	./-2
I	Ancho total	150	./-2	I	Ancho total	164	./-2
J	Ancho del velcro	4	./-1	J	Ancho del velcro	4	./-1
K	Ancho del velcro	4	./-1	K	Ancho del velcro	4	./-1
TALLA L				TALLA XXL			
Descripción	Medida (cm)	Tolerancia (cm)		Descripción	Medida (cm)	Tolerancia (cm)	
A	Ancho de hombro	26.5	./-1	A	Ancho de hombro	28.5	./-1
B	Ancho de pecho	77.5	./-2	B	Ancho de pecho	82	./-2
C	Longitud de las mangas	58	./-2	C	Longitud de las mangas	60	./-2
D	Altura de la sisa	29	./-1	D	Altura de la sisa	30	./-1
E	Longitud del puño elástico	5	./-1	E	Longitud del puño elástico	5	./-1
F	Ancho del cuello	24.5	./-1	F	Ancho del cuello	25	./-1
G	Ancho del manga	16	./-1	G	Ancho del manga	16	./-1
H	Altura total	135	./-2	H	Altura total	155	./-2
I	Ancho total	155	./-2	I	Ancho total	164	./-2
J	Ancho del velcro	4	./-1	J	Ancho del velcro	4	./-1
K	Ancho del velcro	4	./-1	K	Ancho del velcro	4	./-1

6. ALMACENAMIENTO

El contenido del paquete podría quemarse en caso de ser expuesto a flama o a un objeto extremadamente caliente

Evite el contacto con fuego o con fuentes de calor de alta intensidad.

Mantener en una temperatura inferior a 30 grados y una humedad entre 40-60%

7. DISPOSICIÓN FINAL

Producto descartable para un solo uso

No reutilizar

Debe ser desechada en recipientes donde se almacenan

Dispositivos médicos

8. PRESENTACIÓN COMERCIAL

Bolsa por unidad caja por 50 unidades

 NIPRO MEDICAL CORPORATION COLOMBIA	NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA	CÓDIGO	FI-CCAA-071
	FICHA TÉCNICA	PÁGINA	3 de 3
		VERSIÓN	01
		FECHA APROBACIÓN	08-03-2023
		FECHA VIGENCIA	08-03-2026

9. METODO DE ESTERILIZACIÓN
ETO

10. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CAMBIO REALIZADO
00	06-12-2021	Documento nuevo
01	08-03-2023	Imagen del producto

COPIA CONTROLADA