

FICHA TÉCNICA

GLUTARALTEC®

Cód. DPF-001 – V. 1.0 – 2016/03/06



GLUTARALTEC® VISOFT® es un desinfectante de alto nivel cuyo principio activo es el Glutaraldehído al 2%, con demostrado poder Bactericida, Esporicida, Fungicida y Tuberculicida. Utilizado en equipos, utensilios e implementos en el sector clínico y odontológico, con el fin de prevenir procesos infecciosos.

El espectro biocida del GLUTARALTEC es más efectivo en un pH alcalino (8 - 10), por tanto, se requiere usar una sal activadora para complementar este producto. Esta sal activadora tiene como principio activo sales de amonio cuaternario cuya función es aumentar el pH ácido (3,2 – 4,2) del glutaraldehído.



COMPOSICIÓN:

➤ **GLUTARALTEC**

Glutaraldehído

Inertes

➤ **SAL ACTIVADORA**

Colorante

Excipientes



PRESENTACIONES:

1.000 mL, 3.800 mL, 19.000 mL, tambor 60 L, tambor 55 Gal.

Utilizando tapa de seguridad y/o dispensador.



REGISTRO SANITARIO INVIMA:

No. 2017DM0000346-R1



USOS:

- En Elementos Críticos: Como los Instrumentos Quirúrgicos u otros objetos que penetran tejidos estériles del cuerpo.
- En Elementos Semicríticos: Aquellos que entran en contacto con mucosas sin efectuar procedimientos invasivos, por ejemplo: equipos de terapia respiratoria, endoscopios de fibra óptica (broncoscopio, gastroscopio, colonoscopia) e instrumental odontológico entre otros.



INSTRUCCIONES DE USO:

1. Active la cantidad de GLUTARALTEC a utilizar adicionando la Sal Activadora necesaria según la proporción establecida y agite. Por ejemplo: Por cada 1000 ml que requiera activar adicione 5 ml de Sal Activadora.



HB Supplier S.A. Distribuidor Autorizado
Dirección: Carrera 21a No. 172 - 17 Bogotá D.C, Colombia
PBX: 678 00 40 - Cel: 316 471 38 62
E-mail: corporativo@hbsupplier.com

FICHA TÉCNICA

GLUTARALTEC®

Cód. DPF-001 – V. 1.0 – 2016/03/06

2. Deposite en un envase de plástico el contenido suficiente de GLUTARALTEC activado de tal forma que cubra completamente el instrumental que se va a esterilizar y cierre herméticamente.

Recuerde que ningún esterilizante destruye los microorganismos de forma inmediata, por tanto, se requiere un tiempo mínimo de contacto entre el instrumento a desinfectar y la solución de GLUTARALTEC, así:

Acción Bactericida: 30 minutos.

Acción Tuberculicida: 30 minutos.

Acción Esporicida: 10 horas.

Estos tiempos son efectivos con un proceso previo de eliminación de material orgánico en los instrumentos, superficies y ambientes que son objeto de esterilización.

3. Enjuague con abundante agua.

- ✓ Una vez se haya activado el GLUTARALTEC, el tiempo de expiración del producto se reduce a 30 días.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- Para su manipulación utilice los respectivos elementos de protección personal como guantes, gafas protectoras, máscara facial, gorro y demás indumentaria necesaria.
- En caso de contacto con la piel y/o los ojos, lave inmediatamente con abundante agua. Consulte al médico.
- En caso de inhalación retire a la persona del lugar de exposición y llévela a un lugar ventilado y fresco. Proporcione asistencia médica.
- Manténgase en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Mantenga el envase cerrado para evitar derrames y desprendimiento de vapores. En caso de ocurrir algún derrame limpiar inmediatamente.
- Úsese preferiblemente a temperaturas inferiores a los 80°C



HB Supplier S.A. Distribuidor Autorizado
Dirección: Carrera 21a No. 172 - 17 Bogotá D.C, Colombia
PBX: 678 00 40 - Cel: 316 471 38 62
E-mail: corporativo@hbsupplier.com