

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MARCA REGISTRADA

Wescocide GL 28

### NOMBRE DEL PRODUCTO

Solución desinfectante con 2% de glutaraldehído

### COMPOSICIÓN

Glutaraldehído ----- 2.2 g

### DESCRIPCIÓN GENERAL

Solución desinfectante con 2% de Glutaraldehído que al ser activado se torna alcalino con valores de pH que oscilan entre 6.5 y 7.2 para garantizar una correcta desinfección del instrumental médico quirúrgico, endoscopios flexibles y material odontológico. Su acción desinfectante permite eliminar un amplio espectro de microorganismos.

### MODO DE USO

#### Desinfección por inmersión de equipos e instrumental.

1. Active el producto adicionando la cantidad total del activador suministrado con el galón de **WESCOCIDE GL28**. Una vez el producto es activado se torna de color verde
2. Lave y seque completamente los equipos y el instrumental a desinfectar.
3. Sumerja completamente en la solución activada los equipos y el instrumental a desinfectar
4. Permita el tiempo de contacto mínimo de 10 minutos y enjuague con agua potable.

### RECOMENDACIONES

- El instrumental metálico no debe dejarse sumergido en el producto activado, por más de 12 horas.

- El producto conserva su vida útil por 28 días.
- Luego de transcurrir 28 días luego de la activación del producto, independiente si fue o no usado se debe descartar y proceder a una nueva preparación.
- Para manipular el producto se deben utilizar los elementos de protección personal.
- No es aconsejable enjuagar con agua retenida en recipientes el instrumental tratado.
- No aplique parcialmente el activador
- Mantener fuera del alcance de los niños
- No mezclar con otros productos.
- Ante cualquier situación de peligro remitirse a la hoja de seguridad del producto.

### PRIMEROS AUXILIOS

- Contacto con los ojos:

En caso de contacto, lavar inmediatamente los ojos con abundante agua durante al menos 15 minutos. Si usa lentes de contacto retírelos antes de comenzar el lavado. Consulte al especialista de inmediato.

- Contacto con la piel:

En caso de contacto, retire la ropa y el calzado contaminados con el producto. Lave inmediatamente la piel con abundante agua. Cubra la piel irritada con un emoliente. Consulte al especialista. Lave bien la ropa y los zapatos antes de volverlos a usar.

- Inhalación:

Si se inhala el producto debe trasladarse a un lugar al aire libre. Si no respira, administre respiración artificial. Si la respiración es difícil, proporcione oxígeno. Obtenga atención médica inmediatamente.

- Ingestión:

Si se ingiere, no induzca el vómito a menos que lo indique el personal médico. Nunca administre nada por la boca a una persona inconsciente. Afloje la ropa apretada tal como un cuello, un lazo, o un cinturón. Obtenga atención médica inmediatamente.

Carrera 50 No 76 D Sur 52 Km, Autopista sur Km 12, La Estrella -Antioquia

E-MAIL: [info@westquimica.com](mailto:info@westquimica.com)

Línea nacional gratuita de servicio al cliente 01 8000 423693

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN

Mantenga almacenado en el envase original, bien cerrado, en un lugar fresco y con buena ventilación. El envase no debe exponerse a los rayos directos del sol o temperaturas extremas. Para disponer el envase se debe lavar, retirar la etiqueta y disponer de acuerdo a las leyes y disposiciones vigentes.

No descargue el producto en efluentes, lagos, arroyos, estanques, estuarios, océanos u otras fuentes de agua, a menos que se cumpla con los requisitos de los sistemas nacionales de eliminación de contaminantes. No descargue los efluentes que contengan este producto en los sistemas de alcantarillado sin notificar previamente a la autoridad local de la planta de tratamiento de aguas residuales. Los usuarios deben prestar atención a la posible existencia de regulaciones regionales o nacionales sobre eliminación.

### REGISTRO Y VIGENCIA

Colombia: INVIMA: 2009DM-0004019

Carrera 50 No 76 D Sur 52 Km, Autopista sur Km 12, La Estrella -Antioquia

E-MAIL: [info@westquimica.com](mailto:info@westquimica.com)

Línea nacional gratuita de servicio al cliente 01 8000 423693