



## Limpieza y desinfección de dispositivos médicos

Este documento es emitido por Eufar S.A., cualquier reproducción se considera una COPIA NO CONTROLADA.



Detergente y Desinfectante de alto nivel, sin alcohol para dispositivos médicos y equipos biomédicos. Listo para usar. Acción 30 s.

## Descripción

- **EUCIDA® FREE ALCOHOL**
- Contiene mezcla de amonios cuaternarios de quinta generación como agente detergente y desinfectante. Y otro agente potenciador.

## Características

- **EUCIDA® FREE ALCOHOL** actúa como detergente y desinfectante en mínimo 30 segundos, comprobado científicamente.
- Debido a su pH neutro, es compatible con todos los materiales.
- Incoloro e inodoro.
- Libre de aldehídos, fenoles, fósforo y alcohol.
- No tóxico, ni irritante.
- No corrosivo.
- Biodegradable.
- No mancha.
- Libre de Biguanidas

## Mecanismo de acción

Los compuestos de cloruro de amonio cuaternario se fijan a la superficie de los microorganismos inhibiendo las funciones de la pared celular y de la membrana citoplasmática y por interacción física con la membrana celular. Por esta razón, los compuestos QAS son frecuentemente usados para desinfectar superficies.

## Rendimiento aproximado

750 mL. rinden 99 m<sup>2</sup> o 1071 aspersiones.

Para garantizar mayor rendimiento del producto se recomienda el uso de paños descartables no absorbentes o utilizar los paños humedecidos con Eucida Free Alcohol, disponibles en [www.eufar.com](http://www.eufar.com)

| Actividades                            | Microorganismos                                  | Evidencias en concentración de uso                                                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bactericida</b>                     | <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538           | Bactericida en solo 30 segundos (Método ecométrico).                                                    |
|                                        | <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 9027          |                                                                                                         |
| <b>Fungicida</b><br>Hongos y Levaduras | <i>Candida albicans</i> ATCC 10231               | Fungicida en solo 30 segundos (Método ecométrico).                                                      |
|                                        | <i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 1604        |                                                                                                         |
| <b>Esporicida</b>                      | <i>Bacillus subtilis</i>                         | Esporicida en solo 30 segundos (Método ecométrico).                                                     |
| <b>Tuberculicida</b>                   | <i>Mycobacterium terrae</i> ATCC 15755           | Tuberculicida en solo 30 segundos (Test de deutsche gesellschaft fur hygiene and microbiologie (dghm)). |
| <b>Virucida</b>                        | Hepatitis B y C                                  | Los amonios cuaternarios afectan a los virus envueltos en capa lipídica. <sup>1,2</sup>                 |
|                                        | Herpes Simplex                                   |                                                                                                         |
|                                        | HIV – Varicela – Rubeola – Influenza – Sarampión |                                                                                                         |

1.2 RUTALA William A, Guideline for Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities, 2008. 2. Ewa Okblak, Andrzej Gamian, The biological activity of quaternary ammonium salts (QASs), Postepy Hig Med Dosw, 2010;64: 201-211



Para comprar en línea



Distribuido por Laboratorios EUFAR S.A.  
Línea de servicio al cliente (+57) 601 6254455  
Bogotá, Colombia



**Acciones**  
Bactericida  
Esporicida  
Fungicida  
Tuberculicida  
Virucida

Comprobadas científicamente





Este producto ha sido manufacturado cumpliendo los requisitos de la norma internacional ISO 13485: 2016, la cual garantiza calidad, seguridad y eficacia.

Detergente y Desinfectante de alto nivel, sin alcohol para dispositivos médicos y equipos biomédicos. Listo para usar. Acción 30 s.

### Instrucciones de uso

#### Desinfectante de equipos biomédicos, por contacto:

- Utilice elementos de protección personal (EPP).
- Aplique **Eucida® Free Alcohol**, así:
  - a. Asperjando **Eucida® Free Alcohol** sobre un paño limpio, seco y no absorbente.
  - b. O, Utilícelo listo para uso, con los **Paños Humedecidos - WIPES** con **Eucida® Free Alcohol**.
- Pase el paño en una sola dirección, sin repasar.
- Deje actuar **Eucida® Free Alcohol** por **30 segundos mínimo**. No enjuague.
- El Dispositivo Médico, Equipo Biomédico o superficie, queda listo para ser utilizado.
- Deseche el paño al final del uso.

#### Aspecto físico:

Solución incolora, de olor característico, libre de partículas extrañas.

#### Composición:

Mezcla de amonios cuaternarios de quinta generación 0.3% y excipiente potenciador.

#### Vida Útil:

Líquido / 750mL y Paños : 3 años.

#### Estabilidad:

Para asegurar la estabilidad y acciones del producto no adicione agua, ni mezcle con otros productos.

#### Disposición final:

Terminado el contenido de este envase, enjuague, tape y envíe a reciclaje.

#### Condiciones de almacenamiento:

Manténgase bien tapado, en sitio fresco, protegido de la luz y lejos del alcance de los niños.

#### Precauciones:

- **EUCIDA® FREE ALCOHOL** no debe mezclarse con otros productos de limpieza y desinfección.
- **EUCIDA® FREE ALCOHOL** no está indicado como antiséptico en piel o mucosas, evite el contacto.
- Ver hoja de seguridad en [www.eufar.com](http://www.eufar.com).

#### Clasificación de Riesgo:

IIA

#### Registro sanitario:

Reg. (COL) INVIMA 2022DM-0026097

#### Presentaciones:

- Líquido / 750 mL con atomizador o tapa.
- Paños humedecidos con Eucida Free Alcohol / 160 unidades.