

## FICHA TECNICA

|                    |                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Producto</b>    | Vendas de Yeso Premium                                             |
| <b>Referencias</b> | 3" X 5 YDS<br>4" X 5 YDS<br>5" X 5 YDS<br>6" X 5 YDS<br>8" X 5 YDS |
| <b>Marca</b>       | VITAL MEDIC                                                        |



|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción</b>          | Venda de gasa blanqueada, de algodón puro, sin empates, impregnada con Sulfato de Calcio Hemihidratado, enrolladas sobre una varilla o núcleo de poliestileno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Material/Composición</b> | Gasa 100 % algodón.<br>Masa de yeso compuesta por más de un 85 % de sulfato de calcio, Alcohol desnaturalizado, cloruro de Metileno, Polivinil Acetato, Metil Celulosa, Cloruro de Alquil Dimetil Bencil Amonio, Sulfato de Potasio y yeso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Características</b>      | Impregnada uniformemente con yeso de calidad y de fraguado rápido que produce un molde uniforme y con un acabado excelente. Formula suave y cremosa permite un reparto uniforme de yeso y estéticamente agradable.<br>Propiedades de moldeo mejoradas y excelente acabado<br>Sus bordes en zigzag impiden que se deshilachen y queden hilos sueltos durante la aplicación.<br>El vendaje se enrolla en un núcleo en forma de cruz que permite que el agua humecte las capas internas de la venda y proporciona una estabilidad superior durante el manejo. El embalaje resistente a la humedad mejora la protección de los vendajes y prolonga la vida útil |



# GRUPO VITAL S.A.S

GRUPO VITAL S.A.S

Por una salud llena de vida

NIT: 900.194.982-4

CCAA No. 0194

DEL 05/06/2014 



FT. VENDAYESO

VERSION: 1

Fecha: 29/02/2016

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Características físicas</b> | Venta de yeso de fraguado rápido con varilla interna.<br><br>Tiempo de Inmersión..... 3 a 5 seg<br>Cremosidad..... Buena<br>Tiempo de Fraguado a 12oc..... 120 a 200 seg<br>Pérdida de Yeso en la Inmersión (%): 12% Max                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Indicaciones de Uso</b>     | No cubrir el molde.<br>No use agua tibia, ni agua excesivamente fría.<br>Si va a realizar varios vendajes, cambie frecuentemente el agua donde sumerge las vendas.<br>Proteger la piel del paciente con guata o funda de algodón.<br>No colocar la venda de yeso directamente sobre la piel del paciente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Modo de Uso</b>             | <p>Seleccione y prepare el número de vendas a utilizar, el sitio de trabajo, los materiales y equipos para la protección del paciente e instrumentos a utilizar en la elaboración del molde o enyesado.</p> <p>Coloque una funda de algodón (estoquineta) o un vendaje ortopédico protector (guata) sobre el área del cuerpo a inmovilizar</p> <p>Introduzca la venda en agua limpia sujetándola blicuamente (aproximadamente a 45° de inclinación) durante 2 segundos o hasta cuando deje de burbujear.</p> <p>Para localizar con facilidad el extremo de la venda cuando se saca del agua, se recomienda dejar un dedo separando la última media vuelta del vendaje.</p> <p>Exprima suavemente la venda escurriendo el exceso de agua de un extremo a otro utilizando el pulgar e índice para expulsar el exceso de humedad, cuanto más exceso de agua elimine más rápido secara el molde.</p> <p>Aplique el vendaje húmedo, desenrollándolo sobre la parte del cuerpo a inmovilizar, de manera uniforme, en vueltas circulares y espirales, presionando y alisando el vendaje, de manera que se adapte a su forma y asegurando la unión entre las capas sucesivas hasta obtener un molde sólido y bien laminado.</p> |





# GRUPO VITAL S.A.S

GRUPO VITAL S.A.S

Por una salud llena de vida

NIT: 900.194.982-4



CCAA No. 0194

DEL 05/06/2014

FT. VENDAYESO

VERSION: 1

Fecha: 29/02/2016

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precauciones de uso</b>           | <p>No cubrir el molde.</p> <p>No use agua tibia, ni agua excesivamente fría.</p> <p>Si va a realizar varios vendajes, cambie frecuentemente el agua donde sumerge las vendas.</p> <p>Proteger la piel del paciente con guata o funda de algodón.</p> <p>No colocar la venda de yeso directamente sobre la piel del paciente.</p> |
| <b>Advertencia</b>                   | <p>Producto de uso único</p> <p>Desechar después de su uso</p> <p>No Reutilizar.</p>                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Método de desecho</b>             | <p>No debe ser arrojada a fuentes de agua</p> <p>Depositar en recipientes indicados para desechos solidos</p>                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Contraindicaciones</b>            | <p>No aplicar directamente sobre heridas abiertas</p>                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Condiciones para su uso</b>       | <p>Verificar que el empaque de la venda a utilizar se encuentre sellado en todos sus extremos.</p> <p>Utilizar agua limpia con una temperatura entre 20°C y 25°C.</p> <p>Utilizar guata protectora sobre la piel del paciente previa la colocación del yeso</p>                                                                  |
| <b>Condiciones de Almacenamiento</b> | <p>Consérvese en un lugar fresco y seco con temperaturas entre 10° a 35°C;</p> <p>Evitar contacto directo con la luz</p> <p>Almacenar sobre estibas</p>                                                                                                                                                                          |
| <b>Registro Sanitario</b>            | 2019DM-0020103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Presentación</b>                  | Caja x 24 Unidades                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Nivel de Riesgo</b>               | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Vida del Producto</b>             | 5 Años                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

