

FICHA TÉCNICA

FT-PT-ASG-019 • Rev.35
Vigente desde Mayo 25/23

Este documento es emitido por Eufar, está limitada su reproducción y es un DOCUMENTO NO CONTROLADO



DESINFECTANTE POR INMERSIÓN DE MATERIAL E INSTRUMENTAL TERMOSENSIBLE



LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
DE ALTO NIVEL



en
sólo **5**
minutos

Acciones:
Tuberculicida
Bactericida
Fungicida
Virúcida
Esporicida

Comprobadas
científicamente

Beneficios

La mejor opción precio-beneficio entre los desinfectantes de alto nivel. **GLUTFAR Plus HLD**, se recomienda para la desinfección de alto nivel de:

- Instrumental médico, odontológico, quirúrgico (pinzas, porta agujas, espéculos, retractores, separadores, exploradores, tijeras y afines).
- Dispositivos médicos y elementos termosensibles (endoscopios, resucitadores, hojas de laringoscopia con fibra óptica, cubetas plásticas, prótesis dentales y afines).

PRUEBAS MICROBIOLÓGICAS

ACTIVIDADES	MICROORGANISMOS	PRUEBAS	TIEMPO CONTACTO
Bactericida Gram + Gram - (pseudomonocida)	<i>Clostridium difficile</i> ATCC 9689	Método Ecometrico - CEDIMI	5 min
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 9027 <i>Staphylococcus aureus</i> 6538 <i>Escherichia coli</i> ATCC 8739	USP 44 <1072> - BIFAR	5 min
	<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538 <i>Escherichia coli</i> ATCC 10536 <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 9027	Estudio Laboratorios CAM Venezuela (1)	5 min
Fungicida Hongos Levaduras Mohos	<i>Candida albicans</i> ATCC 10231 <i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 16404	USP 44 <1072> - BIFAR	5 min
	<i>Candida albicans</i> ATCC 10231	Estudio Laboratorios CAM Venezuela (1)	5 min
Virúcida Con y sin envoltura lipídica	<i>Herpes Simplex Virus 1</i> , (HSV-1) ATCC VR-260 <i>Human Rotavirus Group A</i> ATCC VR-2018 <i>Hepatitis B y C</i> <i>Herpes felin - Herpes simplex</i> <i>VIH - Varicela - Rubeola - Influenza - Sarampión</i> <i>SARS - Covid-2 (Covid 19)</i>	Se encuentra la actividad virúcida del Glutaraldehído en la bibliografía.	5 min
Tuberculicida Microbacterias	<i>Mycobacterium terrae</i> , ATCC 15755, reemplaza al <i>Mycobacterium tuberculosis</i> , según Norma UNE-EN 14348	TEST DE DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR HIGIENE AND MICROBIOLOGIE (DGHM) - CEDIMI	5 min
Esporicida	<i>Bacillus subtilis</i> ATCC 19659	USP 44 <1072> - BIFAR	5 min
	<i>Bacillus cereus</i>	Estudio INHEM (2)	5 min

1. Estudio Laboratorios CAM C.A. Venezuela, realizado por laboratorio independiente, a solicitud de un cliente, determinando el número de reducciones logarítmicas para determinar de forma cuantitativa la eficacia bactericida y fungicida.
2. INHEM, Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y Microbiología, Centro colaborador de la OMS en las áreas de Salud de la Vivienda y Prevención del Dengue, Ciudad de La Habana, Cuba. Los estudios realizados por el INHEM corresponden a inhibición del crecimiento de los microorganismos de prueba en presencia y ausencia de materia orgánica (plasma sanguíneo).
la desinfección de instrumentos* GMS Hygiene and Infection Control 2020, Vol. 15, ISSN 2196-5226
Spire B, Barré-Sinoussi F, Montagnier L, Chermann J. Inactivation of lymphadenopathy associated virus by chemical disinfectants. Lancet. 1984;2:899-901.

Gerald McDonnell. (2021). Block's Disinfection, Sterilization, and Preservation: Vol. Sixth edition. Wolters Kluwer Health.

FICHA TÉCNICA

FT-PT-ASG-019 • Rev.35
Vigente desde Mayo 25/23

Este documento es emitido por Eufar; está limitada su reproducción y es un DOCUMENTO NO CONTROLADO



DESINFECTANTE POR INMERSIÓN DE MATERIAL E INSTRUMENTAL TERMOSENSIBLE



LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
DE ALTO NIVEL

Descripción

GLUTFAR Plus HLD, es un desinfectante de alto nivel, ha sido formulado en solución acuosa, contiene 2% de glutaraldehído y agente inhibidor de la corrosión. El ingrediente activo de este producto es un compuesto que consta de una cadena de cinco carbonos con dos grupos funcionales aldehído en sus extremos. Su actividad desinfectante se atribuye a la alquilación de grupos sulfhidrilo, hidroxilo, carboxilo y amino de algunas proteínas, lo que altera de forma irreversible la síntesis de ADN, ARN y proteínas de los microorganismos.

Instrucciones de Uso

- Use elementos de protección personal (EPP).
- Agregue a este envase todo el contenido del activador adjunto.
- Tape y agite fuertemente, para que **GLUTFAR Plus HLD** se active. El tiempo de duración activado es de 30 días. Anote la fecha de expiración en el cuadro inferior de la etiqueta.
- Lave los elementos con detergente enzimático **BONZYME** y enjuague muy bien antes de sumergirlos en **GLUTFAR Plus HLD**.
- Seleccione recipientes, preferiblemente plásticos con tapa.
- Luego sumerja en **GLUTFAR Plus HLD**, de forma que quede completamente cubierto; tape el recipiente y deje en inmersión por 5 minutos, para garantizar la desinfección de alto nivel.
- Enjuague los elementos con agua potable o agua destilada y úselos dentro del menor tiempo posible.
- Es reusable, si se verifica previamente la concentración con tirillas indicadoras.

Aspecto físico

- Líquido transparente, olor característico a limón.
- Una vez activado el **GLUTFAR Plus HLD** es de color azul y pH alcalino.

Composición

- Ingrediente activo: Glutaraldehído 2%.
- Auxiliares de formulación: Agente tamponante para potenciación del producto. Agente antioxidante y Fragancia limón.

Vida útil

33 meses sin activación.

Estabilidad

- **GLUTFAR Plus HLD**, es estable en condiciones normales de uso y almacenamiento.
- **GLUTFAR Plus HLD** una vez activado tiene un tiempo de duración o uso máximo de **30 días**.
- Para asegurar la estabilidad del producto no adicione agua ni mezcle con otros productos diferentes al activador.

Biodegradabilidad y disposición final

- **GLUTFAR Plus HLD** es biodegradable. Comprobado mediante prueba OECD (301A).

Condiciones de almacenamiento

Manténgase bien tapado, a temperatura ambiente, protegido de la luz y lejos del alcance de los niños.

Precauciones

- Use elementos de protección personal (EPP), en caso de tener contacto, enjuague con abundante agua.
- No lo ingiera y evite el contacto con alimentos.
- **GLUTFAR Plus HLD** no está recomendado para aspersión, debido a su toxicidad por vía respiratoria.

Clasificación de riesgo

- Clase IIa.

Registros sanitarios

- Reg. (COL.) INVIMA 2022DM-0008954-R1
- Reg. (ECU.) DM-1324-03-07
- Reg. (PER.) DM1071E
- Reg. (GTM.) PHH-25
- Reg. (PAN.) 89811
- Reg. (HON.) HN-DM-1220-0055
- Reg. (DOM.) PS2018-0107
- Reg. (CRI.) EMB-CO-21-01620
- Reg. (BOL.) DI-45507/2022
- Reg. (NIC.) II04-040822-9682

Presentación

- 500 mL.
- Litro.
- Galón (3.8 L.)
- 5 L.



Contáctanos

☎ (601) 625 4455
✉ ventas@eufar.com
📞 +57 304 462 8755

