



**FABRICANTES:**  
**ETERNA S.A. –Colombia**

**REGISTRO SANITARIO:**

**INVIMA 2021DM-0022863**

Clasificación de Riesgo: I –Invasivo de uso transitorio.

**PROPÓSITO:** Producto diseñado para lavados vaginales.

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:** La Ducha Intima es un dispositivo diseñado para permitir el envasado de agua y así efectuar a través de los accesorios el lavado íntimo que se requiera, brindando confort. Sus condiciones de diseño garantizan la seguridad del dispositivo para el almacenamiento del agua.

**COMPONENTES Y MATERIALES:**

Bomba látex natural Cánula PP

**VIDA UTIL : 2 años.**

La vida útil de este producto se garantiza siempre y cuando el empaque este intacto y se mantengan las condiciones de almacenamiento indicadas por el fabricante.

**INDICACIONES DE USO:**

- Lavarse las manos antes del uso de la ducha vaginal.
- Meterse en la ducha, para evitar que parte de la solución se derrame en el suelo, quedarse dentro de la ducha durante todo el proceso.
- Llenar del dispositivo con agua destilada o hervida a temperatura corporal (36°C).
- Enjuagar la cavidad vaginal utilizando la cánula. Insertar el extremo más fino de la cánula y apretar para que salga la solución. Continuar enjuagando el interior de la vagina hasta utilizar toda la solución.
- Lavar el exterior de la vagina, utilizando un jabón suave y agua templada.
- Limpiar el material utilizado y guardarlos para futuros usos.
- Utiliza la solución solo una vez si la has hecho en casa y desecha lo que sobre después de la ducha vaginal.
- Visitar al médico si aparece dolor, ardor o picor después de la ducha vaginal.



Guantes



Infusión



Respiratoria



Laboratorio



Urología



Cuidado Personal



Digital



Electrocirugía

**CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO**

- Conservar el producto en el empaque original.
- No almacenar ni utilizar este producto si esta vencido.
- Protegerlo de temperaturas superiores a 30°C.
- Humedad relativa permanente: máximo 80%
- Protegerlo de la luz directa y de la humedad.
- No exponga esta unidad a contacto con antisépticos a base de aceites, fenoles o sus derivados, grasas, derivados del petróleo o compuestos relacionados.

**ADVERTENCIAS, PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES**

- Después de su uso, realizar la esterilización del producto.
- No utilizar si el producto excede la fecha de expiración
- No utilizar si el empaque está roto o dañado
- Evitar contacto continuo o soluciones concentradas de detergentes, álcalis, ácidos, y solventes orgánicos.
- No exponer bolsa a la luz solar.
- **ESTANDARES CALIDAD FABRICANTE:**
- Certificado de producción para este tipo de productos **APROBADO POR EL INVIMA**

**PRESENTACIONES COMERCIALES**

CODIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDADES DE MEDIDA					
		UNIDAD	1	SUBEMPAQUE	12	CORRUGADO	144
450601011	Ducha intima Eterna	7702037530460		17702037530467		27702037530464	

Elaboró y revisó: Asuntos regulatorios  
Aprobó: Dirección técnica



Guantes



Infusión



Respiratoria



Laboratorio



Urología



Cuidado Personal



Digital



Electrocirugía