

Roche



ACCU-CHEK®
Softclix

Suavidad a tu medida



ACCU-CHEK®

Funcionamiento con un solo botón.

Este dispositivo integra tres funciones distintas en un único botón: carga, punción y expulsión de lancetas utilizadas.

Menos dolor y mayor facilidad de utilización.

Penetración a gran velocidad con retracción activa de la aguja. El sistema de guiado de la lanceta evita la oscilación y la ruptura innecesaria de los tejidos.

Especificaciones Técnicas

Dispositivo:

Profundidad de penetración ajustable:	Sí
Fijación de la profundidad de penetración:	11 niveles mediante esfera giratoria
Nivel de penetración:	0,8 a 2,3 mm
Peso:	21 g

Lanceta:

Diámetro de la aguja:	0,4 mm
Recubrimiento de silicona:	Sí

Utilización

El medidor Accu-Chek Softclicx es fácil de utilizar, gracias a su pequeño tamaño ya que puede cargarse con una sola mano.

- Retire el capuchón.
- Introduzca una nueva lanceta en su sitio y presiónela hasta oír como queda encajada.
- Vuelva a colocar el capuchón hasta que quede encajado. Compruebe que la esfera giratoria está fijada en el nivel de penetración deseado.
- Pulse el botón de carga hasta el fondo.
- Presione con suavidad Softclicx contra el dedo y pulse el botón de administración.
- Después de medir su nivel de glucosa en sangre, retire el capuchón de Softclicx y desplace hacia adelante la parte anterior del puncionador para extraer la lanceta.

Tecnología Clixmotion

- Permite realizar punciones a gran velocidad sin vibraciones
- Minimiza el daño que sufre la piel mediante un movimiento lineal controlado
- Produce menos dolor y esto promueve un mejor control



ACCU-CHEK, ACCU-CHEK SOFTCLIX y CLIXMOTION,
son marcas comerciales de Roche. © 2011

www.accu-chek.com.co

Roche Diabetes Care - Colombia

ACCU-CHEK®