

Ficha Técnica

BD Q-SYTE™

Descripción

BD Q-Syte™ es un adaptador libre de agujas, transparente, diseño liviano y compacto (2 cms), libre de válvulas mecánicas, conexión cerrada universal luer lock, tecnología Split Septum (Membrana esplitable).

Indicación de Uso

BD Q-Syte™ Es un dispositivo de acceso intravenoso libre de agujas con sistema cerrado.

Composición de Producto

BD Q-syte™ Está fabricado en Policarbonato, Polipropileno, Silicón, Cloruro de Polivinilo, Libre de Látex.

Características

Diseño: Ergonómico, facilita la manipulación y fijación: Peso 1.0g y 20.06 mm

Doble rosca con mejor acople: Evita desconexiones accidentales del sistema. Conexión Luer Slip y Luer Lock conformes a la ISO.

Libre de agujas : Evita la utilización de agujas para la administración de medicamentos.

Membrana esplitable: No depende de partes móviles o mecánicas para la apertura y cierre del sistema.

Estructura transparente: Facilita la visualización del interior del dispositivo, permite la detección visual e inmediata de la sangre.

Flujo no restringido: una vez penetra el pivote tipo luer la membrana abre una ruta de flujo directo, sin restricción ofreciendo altas tasas de flujo 32 litros/hora, Índice de flujo (caudal) 525 ml/min, Volumen de purgado ml: 0.10ml.

Superficie: Cóncava y sin irregularidades que facilita la limpieza.

Recomendaciones de Uso

- Terapia intravenosa intermitente y continua.
- Terapia de reemplazo renal (Hemodiálisis)
- Pacientes adultos y pediátricos.
- Máximo 45 PSI.
- Uso máximo 72 horas o 100 activaciones.
- Compatible para toma de muestras sistema cerrado BD Vacutainer™
- Debe desinfectarse antes de cada uso con un agente antiséptico adecuado al 70% . No usar acetona.

Medidas de Seguridad

En conexiones luer Slip cerciórese que la punta del equipo este asegurado hasta el fondo del adaptador para evitar desconexiones accidentales.

No puncionar con agujas, cánulas romas, o conexiones de tipo Luer que no cumplan las normas ISO o que tengan defectos visibles ya que puede reducirse pérdida de líquido o fallo del dispositivo.

Desechar cualquier porción sin usar.

Condiciones de Almacenamiento

Manténgase en un lugar libre de humedad y evitando temperaturas extremas.

SKU	Descripción	Unidad De Empaque
385100	BD Q-SYTE™ Dispositivo cerrado con acceso Luer	Caja por 200

Información General



Nombre Genérico

Adaptador Libre De Agujas

Registro Invima

INVIMA 2016DM-0000250-R1

Fecha Vigencia Registro*

26 de Septiembre de 2026

Fabricante

Becton Dickinson Infusion Therapy Systems INC.

Importador

BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA

Tipo de Dispositivo

NO INVASIVO

Clasificación Riesgo

Ila

Vida útil

5 AÑOS

Técnica de Esterilización

Oxido de Etileno



Responsable: Marketing MDS No. Revisión: 02 Ficha No. 0028

