

HOJA DE INFORMACIÓN TÉCNICA



**BD MICROTAINER®
CONTACT ACTIVATED
LANCET.**

**Becton Dickinson de
Colombia Ltda.
Sistemas Integrados de
Diagnósticos – IDS
Versión: 2021 - 12**



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Lanceta de seguridad con cuerpo en acero inoxidable gradomédico, cubierta por soporte plástico ergonómico, con sistema retráctil, profundidad controlada, pabellón ergonómico de un solo uso.

REGISTRO SANITARIO:

Número: INVIMA2019-DM 0019211

Tipo De Dispositivo: Invasivo

Vigencia: Enero de 2029

Fabricante: Becton Dickinson & Company

Titular: Becton Dickinson de Colombia Ltda.

Dispositivo: No Reutilizable

Esterilización: Esterilización: Gamma radiación

ESPECIFICACIONES DE EMPAQUETADO

CATALOGO	PRODUCTO	CALIBRE	PRESENTACIÓN	COLOR
366592	Lanceta para dedo, flujo bajo	30G x 1.5 mm	Caja x 200 unidades	LILA
366593	Lanceta para dedo, flujo medio	21G x 1,8 mm	Caja x 200 unidades	AZUL
366594	Lanceta para dedo, flujo abundante	1.5 mm x 2.0 mm	Caja x 200 unidades	ROSADO

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Cuerpo de Lanceta	Acero Inoxidable, grado médico
Pabellón	Polipropileno
Barril	Poliestireno
Tapa Protectora de Punta	Policarbonato
Almacenamiento	4 a 25°C - No exponer a la luz directa del sol
Estándares y números de certificación	ISO 13485, FM79169
Empaque	Individual que garantiza esterilidad e integridad del producto
Etiqueta	Todas las etiquetas cumplen con los requisitos de la Directiva Europea de Dispositivos Médicos 93/42 / EEC e incluyen el marcado CE.

MODO DE USO

USO PREVISTO

Guía de uso de la lanceta BD Microtainer® Contact Activated

- 1** Identifique el área a puncionar y asegúrese que esté limpia y desinfectada. 
- 2** Gire el dispositivo plástico que asegura la esterilidad de la lanceta. Deséchelo. 
- 3** Posicione firmemente la lanceta en el sitio de punción. Para activar, presione la lanceta contra el sitio de punción. No remueva la lanceta del lugar hasta que escuche el "click" que indica su activación. 
- 4** Deseche la lanceta en el contenedor de punzocortantes. 
- 5** Proceda a realizar la recolección de muestra. Para facilitar el flujo sanguíneo y la recolección, coloque la mano hacia abajo. 

Lanceta de seguridad con contacto para punción capilar con retracción irreversible. Estéril y de un sólo uso. Evita lesiones en el hueso del paciente.

Su diseño ergonómico facilita el confort del usuario y su activación por contacto hace más intuitiva su colocación y activación.



Becton Dickinson de Colombia Ltda.

NIT 860020309-6

Parque Industrial CLIS. Vereda Vuelta Grande a 150 mts de la Glorieta de Siberia. Vía Cota

Cota- Cundinamarca

Fax Gerencia: (571) 5723650

Fax Servicio al Cliente: (571) 5724250 - 5732908

Apartado Aéreo: 57680

Cota – Cundinamarca.

Tel: (571) 7566060

www.bd.com