



**TORNIQUETE STRETCH®
BD VACUTAINER®**

**Becton Dickinson de Colombia
Ltda.**

**Soluciones de Diagnóstico
Integradas -IDS**

Versión: 2023-I



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Banda elástica de poli-Isopreno sintético, libre de látex reduciendo riesgo de alergia. Facilita la visualización de la vena en pacientes a los cuales se les practicará extracción Sanguínea.

CERTIFICADO NO REQUIERE INVIMA:

Número: 2010016224 de Fecha Emisión Julio 21 de 2010. Catalogo 367203

Número: 2019007587 de Fecha Emisión enero 28 de 2019. Catalogo 367198

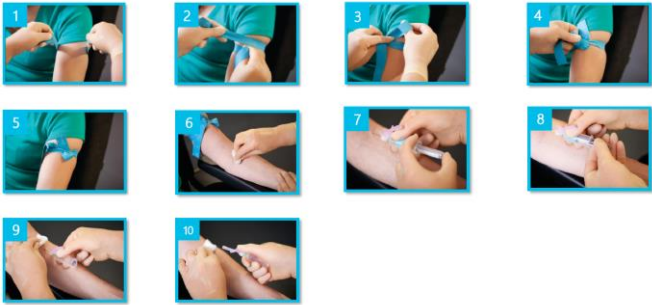
Titular: Becton Dickinson de Colombia Ltda.

ESPECIFICACIONES DE EMPAQUETADO

CATALOGO	PRODUCTO	DIMENSIONES	PRESENTACIÓN
367203	Torniquete Stretch	45 cms x 2.5 cms	Caja X 25 unidades
367198	Torniquete Stretch	45 cms x 2.5 cms	Caja X 25 unidades

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Material	Poli-Isopreno sintético
Almacenamiento	4 a 35°C - No exponer a la luz directa del sol
Certificación – Estándares	ISO 13485, MD19.2137

MODO DE USO	USO PREVISTO
	El torniquete Stretch® BD Vacutainer® se utiliza para la fijación de la vena con el fin de facilitar la localización para el procedimiento de extracción sanguínea, es simple, fácil de usar y está diseñado pensando en la seguridad del trabajador de la salud y del paciente. El torniquete debe ser aplicado solamente cuando se requiere. Se coloca aproximadamente de 8 a 10 cm por encima del sitio de la venopunción. El tiempo de aplicación no debe exceder de un minuto. Es aconsejable que el torniquete se retire apenas empiece a fluir sangre dentro del primer tubo. El uso excesivo del torniquete puede llevar a un aumento en varios analitos, como la proteína total, albumina, potasio, creatinina y ácido láctico, disminución de glucosa, cambios en la eritrosedimentación y las pruebas de estallido respiratorio de leucocitos.

