

Recortadora de vello quirúrgica

Clipper™

Ficha Técnica



Descripción

Recortadora de vello quirúrgica, elimina con rapidez el vello en tan solo una pasada, ayuda a reducir el riesgo de irritación, lesiones e infecciones en la piel. Recortadora preoperatoria más durable y eficiente en el consumo de energía, su versatilidad, higiene y rendimiento la hace idónea para todo tipo de especialidad.



Composición

- Recortadora de vello eléctrica recargable que maneja accesorios desechables para su uso y adaptador de corriente.
- Fuente de alimentación: 100-240 V CA, 50-60 HZ.
- *Corriente nominal de entrada:* 30mA. Tiempo de carga máximo 17 Horas.
- *Modo de funcionamiento:* Funcionamiento continuo.
- *Tiempo de funcionamiento continuo:* una carga máxima proporciona 80 minutos de funcionamiento, dura 120 minutos si usamos la cuchilla general (4406).
- *Peso de la cortadora:* 121 gramos (4,3oz).
- *Dimensiones de la cortadora:* 153 mm (6") de altura x 49 mm (1,9") de ancho x 39 mm (1,5") de profundidad.
- *Tipo de protección contra descarga eléctrica:* Adaptador de carga clase II.
- *Cortadora:* alimentación interna.
- *Piezas aplicadas:* cuchilla desechable, cuerpo de la cortadora.
- *Grado de protección contra la entrada dañina de agua:* Equipo impermeable (IPX7).
- *Grado de seguridad en presencia de mezcla anestésica inflamable:* El equipo no es adecuado para usar en presencia anestésico inflamable.
- No sumerja la cortadora en agua u otra solución a una profundidad de más de 1 mt durante más de 30 min.



Uso

Máquina eléctrica para uso preoperatorio que elimina el vello con rapidez y en un solo paso, ayudando a reducir el riesgo de lesiones en la piel e infección en compañía con las cuchillas de afeitar tradicionales.



Características

- **Ergonomía:** Mango de 40° permite un uso más intuitivo que facilita la eliminación homogénea del vello en una sola pasada.
- **Materiales de uso duraderos:** Los materiales aumentan la compatibilidad del instrumento con los desinfectantes habituales, asegurando la duración del dispositivo.
- **Tecnología:** La batería de Ion- Litio proporciona un mayor tiempo de funcionamiento y mejora la eficiencia energética.
- **Seguridad:** Recomendaciones de prestigiosas instituciones sanitarias y evidencia científica, afirma que el rasurado en lugar del afeitado, reduce el riesgo de infección en el paciente y la posibilidad de lesiones en la piel.



Almacenamiento

En lugar fresco y seco, Condiciones de almacenamiento: -10°C(+14°F), Humedad Relativa del 10% al 100%, de 50 a 106 Kpa. Condiciones de Funcionamiento: de +5°C (+41°F) a + 35°C (+95°F) Humedad relativa del 30% al 75%.





Advertencias

- Debe ser usado por personal previamente capacitado.
- Asegúrese que el recortador esta apagado antes de colocar la cuchilla.
- Compruebe si el cortador y la cuchilla presenta vibración.
- Clipper no va a presentar interferencia con otros equipos.



Presentación del producto

REFERENCIA CLIPPER RECORTADORA QUIRÚRGICA

Presentación	Catálogo	Unidad de
Recortadora Clipper Recargable	5513E	Caja x 1 Unidad
Adaptador de caja	5514A	Caja x 1 Unidad



Aspectos técnicos

Registro sanitario	INVIMA 2015014132
Presentación comercial	Caja por unidad completa de rasuradora.



REFERENCIAS ACCESORIOS DESCARTABLES

Presentación	Catálogo	Unidad de
Accesorio descartable Quirúrgico de uso gral.	4406	Caja x 50 Unidades
Accesorio descartable Quirúrgico para pieles	4403A	Caja x 20 Unidades
Accesorio descartable Quirúrgico para Neurocirugía	4412A	Caja x 20 Unidades

