

	FICHA TÉCNICA ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO										20201002
	MANUAL DIVISION TECNICA										PAGINA 1 DE 1

NOMBRE PRODUCTO: TENA SLIP ULTRA	NOTIFICACIÓN SANITARIA: NSOA08382-20CO VIGENTE HASTA: 23/01/2027	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL FABRICANTE: FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S.	CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO: PRODUCTO ABSORBENTE DE HIGIENE PERSONAL
---	---	--	--

COMPONENTES: Cuerpo Absorbente; Cubierta interna; Cubierta Externa; Adhesivo de Construcción; Elásticos; Superabsorbente; Adhesivo de Elásticos; Barreras; Cintas.	ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES: Producto para uso externo, de uso único. En caso de irritación suspender el uso y consultar con el médico. Conservar el producto en lugar fresco y seco. Mantener fuera del alcance de los niños. No arrojes los pañales usados al sanitario, arrojálos al cesto de basura.
INSTRUCCIONES DE USO: 1. Persona de pie: Sostenga el pañal en la parte trasera del cuerpo mientras ajusta las cintas en la parte frontal. 2. Persona sentada: Coloque el pañal sobre una superficie, siente a la persona sobre él y ajústelo en la parte frontal. 3. Persona acostada: Coloque el pañal sobre la cama a un costado de la persona, gírela recostándola sobre la espalda y ajuste en la parte frontal.	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Debe almacenarse sobre estiba y bajo techo, en un lugar seco y limpio. No debe ser almacenado al lado de productos perecederos y/o productos de aseo, donde los pañales puedan contaminarse por un inadecuado manejo de los anteriores productos mencionados

PROCLAMAS:	
Tecnología PROskin piel sana, superficie seca, rapida absorción, máxima seguridad	Nuevas cintas pega-despega / New double multi-fixation system. Más anchas para un mejor ajuste*
Suave elástico posterior/ Soft Elastic waist band. Que se ajusta cómodamente al cuerpo.	Cubierta exterior suave / Fresh and soft external cover. Proporciona frescura y suavidad con la piel evitando irritaciones
Barreras Laterales / Stading Gathers. Evitan los escapes de orina.	Indicador de humedad / Wetness Indicator Cuando la línea pasa de amarillo a azul, se debe cambiar el pañal.
Sistema ULTRA absorbente / Double pulp + GEL absorbent System. Gel superabsorbente TENASORB que gelatiniza los líquidos y ayuda a neutralizar el olor de la orina. Zona de ultrabsorbencia / Ultra absorbent Area.	Tecnología PROskin / PRO SKIN Technology Qué es la Tecnología Proskin: Es un sistema de componentes de los productos TENA que se enfocan en el cuidado y protección de la piel de las personas, para evitar su deterioro y procurar su calidad de vida
Dermatológicamente comprobado	3x TRIPLE PROTECCION: Sequedad / Suavidad / Seguridad
* Vs TENA Slip anterior	

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO										
TALLA	LARGO PRODUCTO (mm)	ANCHO PRODUCTO (mm)	LARGO NÚCLEO (mm)	PESO PRODUCTO (g)	CAPACIDAD DE ABSORCIÓN (g)	TIEMPO DE ABSORCIÓN (s)	RETORNO DE HUMEDAD (g)	SELLADO DE EXTREMOS (N)	PEEL DE CINTAS (N/30MM)	SHEAR DE CINTAS (N/30mm)
S	694	480	550	88.7	Mín. 1400	Máx. 9	Máx. 20	Mín. 1.6	Mín. 1.0	Mín. 5.0
M	828	635	630	115.0	Mín. 1400	Máx. 9	Máx. 20	Mín. 1.6	Mín. 1.0	Mín. 5.0
L	992	785	730	130.3	Mín. 1400	Máx. 9	Máx. 20	Mín. 1.6	Mín. 1.0	Mín. 5.0
XL	992	830	730	131.2	Mín. 1400	Máx. 9	Máx. 20	Mín. 1.6	Mín. 1.0	Mín. 5.0

VIDA UTIL: 36 meses despues de su fecha de fabricación
--