




SONDA FOLEY

Una sonda de Foley es un tipo común de sonda permanente. Es una sonda suave de plástico o caucho que se introduce en la vejiga para vaciarla de orina.

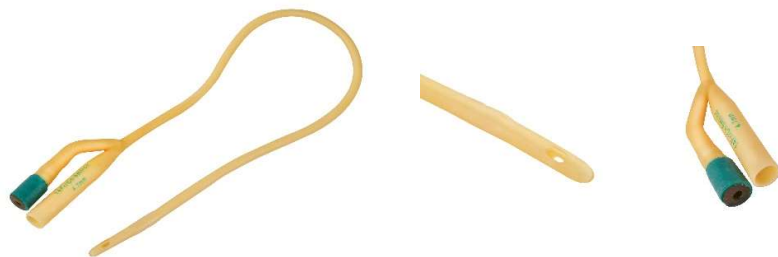

INDICACIONES

Este procedimiento necesita un profesional de experiencia, un colaborador y buena iluminación.

- Obtener una muestra de orina estéril para examinarla.
- Determinar el volumen de orina residual contenida en la vejiga.
- Controlar estrictamente la diuresis de un paciente.
- Aliviar los episodios de retención urinaria.
- Tratamiento de la incontinencia.

•Administrar contraste radiopaco o medicamentos directamente a la vejiga.

•Irrigar la vejiga.

USO

Para introducir la sonda:

- En la mujer: separe los labios mayores y menores con la mano no dominante (esta mano ya no es estéril) hasta visualizar el meato urinario, e introduzca suavemente 5 a 7 cm hasta que fluya orina, luego introduzca dos centímetros más y recolecte la orina en el riñón.
- En el hombre: retraiga el prepucio con su mano no dominante (esta mano ya no es estéril), coloque una gasa bajo el glande (en el surco balano prepucial) para una adecuada manipulación, con la misma mano no dominante eleve el pene en un ángulo de 60 a 90 grados y lubrique la uretra introduciendo una jeringa de 10 mL de lidocaína en gel, e inserte suavemente la sonda entre 17 a 22 cm hasta que fluya la orina, luego introduzca dos centímetros más y recolecte la orina en el riñón.



ALMACENAMIENTO

Evitar exposición directa a los rayos del sol, lluvia, humedad, fuentes de calor y vapores.

Almacenar en condiciones normales de temperatura

PRECAUCIONES / RESTRICCIONES

- No utilizar si el empaque se encuentra abierto, roto o vencido.
- Desechar el producto una vez utilizado.
- Un solo uso.
- Usar por personal calificado.
- Estos dispositivos se desecharán después de un único uso, siguiendo la normativa que rige de acuerdo a su naturaleza.
- Ya que se considera un residuo de tipo hospitalario, es considerado como residuo peligroso y su disposición debe realizarse de acuerdo normativa legal vigente.



CONTRAINDICACIONES O

ADVERTENCIAS

- Estenosis uretral.
- Traumatismo uretral previo.
- Infección de vías urinarias existente en el momento del sondaje.
- Reconstrucción uretral o cirugía vesical.
- Antecedentes de dificultad para colocación de catéter previo.

Fabricado por:

MEDITEC SA

Carrera 97 No 24c - 75 Bod 43-44-45

Bogotá - Colombia

