




SONDA NELATON

Es un tipo de sonda urinaria de uso único. Está hecha de látex o silicona y se utiliza para drenar la orina de la vejiga. La sonda es de forma recta, con un extremo afilado y un orificio en la punta para permitir el paso de la orina.

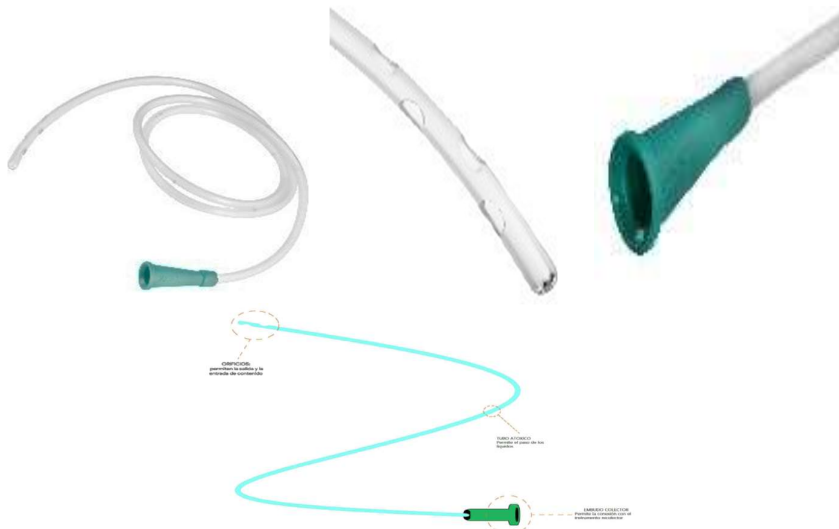

Parte	Material
Sonda	PVC Grado Médico
Embudo	PVC Grado Médico


INDICACIONES

La sonda de Nelaton se emplea para descongestionar la vejiga en casos de hematuria macroscópica y vaciar la vejiga en pacientes con estenosis uretral.

Se emplea también en obstetricia, para la inducción del parto.

USO

Antes de insertar la Sonda Nelaton, es importante lavarse las manos y usar guantes estériles. Se debe preparar una solución antiséptica para limpiar la uretra y el área genital del paciente.

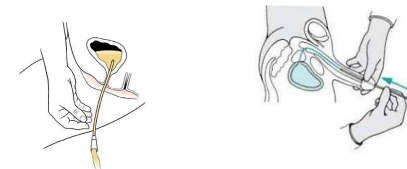

La Sonda Nelaton se inserta suavemente en la uretra del paciente y se avanza hasta que llega a la vejiga. Una vez en la vejiga, se permite que la orina fluya a través de la sonda y se recolecte en una bolsa de drenaje. Una vez que se ha completado el procedimiento, se retira suavemente la sonda y se descarta.

Este proceso debe ser realizado por profesional capacitado.



ALMACENAMIENTO

Evitar exposición directa a los rayos del sol, lluvia, humedad, fuentes de calor y vapores.

Almacenar en condiciones normales de temperatura.

PROPIEDADES FÍSICAS					
Código	Talla (fr)	Largo (cm)	Diámetro externo (mm)	Peso (gr)	Código de barras
SN04	4	40 cm	1,4	4,2	7707221291745
SN05	5	40 cm	1,7	4,5	7707221291752
SN06	6	40 cm	2,0	5,4	7707221290007
SN07	7	40 cm	2,3	5,8	7707221291905
SN08	8	40 cm	2,7	6,2	7707221290014
SN10	10	40 cm	3,3	7,8	7707221290021
SN12	12	40 cm	4,0	8,5	7707221290038
SN14	14	40 cm	4,7	10,0	7707221290045
SN16	16	40 cm	5,3	10,8	7707221290052
SN18	18	40 cm	6,0	12,3	7707221290069
SN20	20	40 cm	6,7	14,8	7707221290076
SN22	22	40 cm	7,3	16,2	7707221290083
SN24	24	40 cm	7,8	16,8	7707221290090

PRECAUCIONES / RESTRICCIONES

- No utilizar si el empaque se encuentra abierto, roto o vencido.
- Desechar el producto una vez utilizado.
- Un solo uso.
- Usar por personal calificado.
- Estos dispositivos se desecharán después de un



único uso, siguiendo la normativa que rige de acuerdo a su naturaleza.

- Ya que se considera un residuo de tipo hospitalario, es considerado como residuo peligroso y su disposición debe realizarse de acuerdo normativa legal vigente.

CONTRAINDICACIONES O ADVERTENCIAS

- El uso de una Sonda Nelaton puede aumentar el riesgo de infecciones del tracto urinario. Para prevenir esto, es importante seguir una adecuada higiene y limpieza antes de insertar la sonda.
- El uso de una Sonda Nelaton también puede aumentar el riesgo de lesiones uretrales. Para prevenir esto, es importante asegurarse de que la sonda se coloca correctamente y se fija adecuadamente en su lugar.
- La retención urinaria es otra complicación asociada con el uso de una Sonda Nelaton. Para prevenir esto, es importante monitorear adecuadamente el flujo de orina a través de la sonda.

Fabricado por:

MEDITEC SA

CR 7 155C 30 TO E OF 3108

Bogotá - Colombia