

Agujas de anestesia espinal regional - punta quincke

País de procedencia: Estados Unidos

Unidad de venta: Unidad.



Uso:

- Hospitales
- Clínicas
- EPS
- IPS
- Urgencias
- Salas de cirugía

Características:

- Estéril en óxido de etileno.
- Acero inoxidable.
- Bisel tipo quincke.
- Bisel corto, con punta integra sin imperfecciones, diseñado para proveer mayor sensibilidad durante el procedimiento y evitar lesión en los tejidos.
- Ajuste preciso entre el mandríl y la aguja para minimizar el efecto de biopsia.
- Pabellón de polipropileno transparente con acabado mate para permitir la visualización líquido cefalorraquídeo.

- Pabellón liviano con código de color dependiendo del calibre.
- Estilete o mandríl metálico.
- El mandríl evita la obstrucción de la canula y refuerza la aguja durante el paso e introducción por los tejidos.
- El estilete posee un sistema de llave/muesca entre el estilete y la canula que facilitan la adecuada orientación de la posición del bisel de la aguja.
- Vida útil de 5 años a partir de la fabricación.
- Clasificación de riesgo: III
- Desechable.
- Único uso.

Aplicación:

- Insumo médico usado para realizar administración de anestesia espinal regional y/o punción lumbar.

Agujas de anestesia espinal regional - punta quincke

País de procedencia: Estados Unidos

Unidad de venta: Unidad.

Instrucciones de uso:

- Validar la integridad y esterilidad del empaque.
- Manipular con las respectivas normas y protocolos de asepsia y esterilidad.
- Realizar la administración de anestesia espinal regional y/o lumbar según corresponde.
- Posterior al uso, desechar de manera correcta en los contenedores correspondientes.

Recomendaciones y advertencias:

- Evitar almacenar en ambientes con polvo, temperaturas extremas, humedad y productos químicos nocivos.
- Mantener el paquete totalmente sellado para preservar la esterilidad.
- Almacenar en un lugar seco alejado de fuentes de calor.
- Posterior al uso, desechar la aguja en guardianes y/o recolectores según corresponde.

Descripción	Código Imcolmedica	Referencia
Aguja para anestesia espinal regional, punta tipo quincke, 18 Ga x 3.1/2	01000451-02	405184
Aguja para anestesia espinal regional, punta tipo quincke, 20 Ga x 3.1/2	01000453	405182
Aguja para anestesia espinal regional, punta tipo quincke, 22 Ga x 3.1/2	01000455	405181
Aguja para anestesia espinal regional, punta tipo quincke, 23 Ga x 3.1/2	01000457	400106
Aguja para anestesia espinal regional, punta tipo quincke, 25 Ga x 3.1/2	01000459	405180
Aguja para anestesia espinal regional, punta tipo quincke, 26 Ga x 3.1/2	01000461	405164
Aguja para anestesia espinal regional, punta tipo quincke, 27 Ga x 3.1/2	01000463	405259



**Agujas de anestesia espinal regional -
punta quincke**

País de procedencia: Estados Unidos

Unidad de venta: Unidad

Soporte comercial:

 311 231 29 66

 soporte.comercial1@imcolmedica.com.co

