

LÍNEA DEL PRODUCTO	Medico Quirurgico		
PRODUCTO	NEBULIZADOR (COMPRESOR) PORTATIL		
REFERENCIA	NEB-RITE4	CÓDIGO IMCOLMEDICA	01004596-10
UNIDAD DE VENTA	UNIDAD		
REGISTRO SANITARIO	2019DM-0019926	MARCA / FABRICANTE	
PAÍS PROCEDENCIA		ROSCOE MEDICAL	


DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
USO DEL PRODUCTO
CARACTERÍSTICAS

EL MOTOR DEL COMPRESOR TIENE UN PROTECTOR TÉRMICO, QUE APAGARÁ LA UNIDAD ANTES DE QUE SE SOBRECALIENTE. CUANDO EL PROTECTOR TÉRMICO APAGUE LA UNIDAD, HAGA LO SIGUIENTE: A. APAGUE LA UNIDAD. B. DESENCHUFE LA UNIDAD DEL TOMACORRIENTE. C. ESPERE 40 MINUTOS HASTA QUE EL MOTOR SE ENFRÍE ANTES DE INICIAR OTRO TRATAMIENTO. D. ASEGÚRESE DE QUE LAS ABERTURAS DE AIRE NO ESTÉN OBSTRUIDAS. - EVITE EL USO SI ESTA UNIDAD TIENE EL CABLE O EL ENCHUFE DAÑADO, SI SE HA CAÍDO O SI HA ESTADO, DE ALGÚN MODO, EN EL AGUA O SI NO FUNCIONA CORRECTAMENTE. DEVUÉLVALA A UN CENTRO DE SERVICIO PARA SU REPARACIÓN. - SI OCURRE ALGUNA ANORMALIDAD EN LA UNIDAD, SUSPENDA SU USO INMEDIATAMENTE HASTA QUE SE LA HAYA REVISADO Y REPARADO. - SIEMPRE DESENCHUFE EL PRODUCTO INMEDIATAMENTE LUEGO DE SU USO. - NUNCA PERMITA QUE SE TIRE, SACUDA, TENSE, RETUERZA O DOBLE SEVERAMENTE EL CABLE, ESPECIALMENTE SI ESTÁ ENCHUFADO. SE PRODUCIRÁN DAÑOS EN EL PUNTO DE ALTA FLEXIBILIDAD DE LA ENTRADA DEL DISPOSITIVO QUE CAUSARÁN RUPTURAS Y CORTOCIRCUITOS. MANIPULE EL CABLE CON CUIDADO PARA MANTENER SU VIDA ÚTIL. - EVITE TAPAR LAS ABERTURAS DE AIRE EN LA UNIDAD PRINCIPAL O COLOCAR LA UNIDAD EN UN LUGAR DONDE SE PUEDAN OBSTRUIR LAS ABERTURAS DE AIRE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ALIMENTACIÓN CA DE 120 V, 60 HZ
 CONSUMO DE ENERGÍA 1.3 A CAPACIDAD DE MEDICAMENTO 5 ML. TAMAÑO DE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

GARANTIA 1 (UN) AÑO POR DEFECTO DE FABRICACION

ACCESORIOS

0

INSTRUCCIONES DE USO
RECOMENDACIONES DE CUIDADOS Y LIMPIEZA
ESPECIFICACIONES ADICIONALES
DATOS TEMPERATURA
RANGO TEMPERATURA DE TRABAJO
DATOS ELÉCTRICOS
VOLTAJE CONSUMO ELÉCTRICO
ESPECIALISTA DEL PRODUCTO

IMCOLMEDICA S.A.	(601) 288 9858
info@imcolmedica.com.co	

SOPORTE COMERCIAL

Calle 36 N° 15-42 Bogotá D.C. - Colombia
PBX: (601) 288 9858 / **Call Center:** (601) 287 1811 (línea para pedidos)
E-mail: info@imcolmedica.com.co
www.imcolmedica.com.co



