

	FICHA TÉCNICA CONSUMIBLES			Código:	BIO-GCOM-FOR-022
				Versión:	1.0
				Vigencia:	3/03/2023
NOMBRE PRODUCTO	FABRICANTE	DISTRIBUIDOR	NO. DE REGISTRO SANITARIO	VENCIMIENTO REGISTRO	RIESGO
STENT URETERAL C-FLEX DOBLE PIGTAIL PEDIATRICO	COOK MEDICAL	BIOTRONITECH COLOMBIA	2021DM-0007355-R1	20310813	RIESGO ALTO (IIB)

DESCRIPCIÓN	IMAGEN
El equipo de stent ureteral C-FLEX incluye: • Stent radiopaco • Catéter ureteral radiopaco • Posicionador de stents • Guía Guía de alambre recto: acero inoxidable, 145 cm de largo con punta flexible de 3 cm de largo, 0,025 pulgadas (0,64 mm) de diámetro • Catéter – Poliuretano radiopaco, 70 cm de largo, 4 Fr • Posicionador de stent – 50 cm de largo • Enderezador de pigtail	
INDICACIONES Se utiliza para el drenaje interno temporal de la unión ureteropélvica a la vejiga. Los juegos de stent ureteral C-Flex Double Pigtail se han empleado para aliviar la obstrucción en una variedad de afecciones benignas, malignas y postraumáticas. Estos stents se pueden colocar mediante técnicas quirúrgicas endoscópicas, percutáneas o abiertas. Los stents 3.7 Fr están indicados para pacientes pediátricos.	

CONTRAINDICIONES																						
No se han descrito																						
COMPLICACIONES POSIBLES																						
Las complicaciones de la colocación de stents ureterales están documentadas. Dichas complicaciones incluyen, entre otras: Extravasación, oclusión, migración, hemorragia, sepsis, perforación de las vías urinarias, peritonitis, formación de costras, infección de las vías urinarias o pérdida de la función renal																						
ALMACENAMIENTO	ESTERILIZACION																					
Almacénelo en un lugar fresco, seco y oscuro. Evite la exposición prolongada a la luz	El producto se suministra esterilizado con óxido de etileno en envases de apertura rápida. Producto indicado para un solo uso. El producto se mantendrá estéril si el envase no está abierto y no ha sufrido ningún daño																					
DISPOSICION FINAL	PRESENTACION																					
Residuo contaminado peligroso	Sobre con una Unidad																					
REFERENCIAS COMERCIALIZADAS																						
<table><tr><th>Número de pieza de referencia</th><th>Fr</th><th>Longitud cm</th></tr><tr><td>036308</td><td>3.7</td><td>8</td></tr><tr><td>036310</td><td>3.7</td><td>10</td></tr><tr><td>036312</td><td>3.7</td><td>12</td></tr><tr><td>036314</td><td>3.7</td><td>14</td></tr><tr><td>036316</td><td>3.7</td><td>16</td></tr><tr><td>036318</td><td>3.7</td><td>18</td></tr></table>		Número de pieza de referencia	Fr	Longitud cm	036308	3.7	8	036310	3.7	10	036312	3.7	12	036314	3.7	14	036316	3.7	16	036318	3.7	18
Número de pieza de referencia	Fr	Longitud cm																				
036308	3.7	8																				
036310	3.7	10																				
036312	3.7	12																				
036314	3.7	14																				
036316	3.7	16																				
036318	3.7	18																				