



DESCRIPCIÓN:

Los hemostáticos son agentes o dispositivos que se emplean con la finalidad de producir hemostasia acelerando el proceso de coagulación de la sangre.

Los hemostáticos son de uso único, estériles y están desarrollados para acelerar el proceso de coagulación en el momento en que entra en contacto con la sangre.

Los hemostáticos Cura Medical están disponibles en tres versiones diferentes, al momento de abrir el empaque, ya estarán listos para usarlos una vez llenados y purgados de aire estarán listos para ser utilizados. La elección del tipo de Hemostático apropiado dependerá del tipo de cirugía y los protocolos definidos en cada institución.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Preparation	Dimensions	Reference code	Packaging
Curacel® Standard knit	12,5 x 50 mm	Ref CC-501	Boxes of 12 pieces
Curacel® Standard knit	25 x 25 mm	Ref CC-503	Boxes of 12 pieces
Curacel® Standard knit	25 x 50 mm	Ref CC-505	Boxes of 12 pieces
Curacel® Standard knit	50 x 75 mm	Ref CC-507	Boxes of 12 pieces
Curacel® Standard knit	50 x 350 mm	Ref CC-535	Boxes of 12 pieces
Curacel® Standard knit	75 x 100 mm	Ref CC-537	Boxes of 12 pieces
Curacel® Standard knit	100 x 200 mm	Ref CC-540	Boxes of 12 pieces

	HEMOSTÁTICO CuraCel CuraMedical®	Versión: 1 Septiembre 01 de 2018
---	--	--

MATERIALES

El hemostático absorbible CuraCel® es un producto estéril hecho de celulosa oxidada regenerada (ácido polioxianhidro glucurónico). El mecanismo de acción de CuraCel® es independiente del mecanismo de coagulación de la sangre del cuerpo. Cuando entra en contacto con la sangre, CuraCel® forma una masa gelatinosa de color marrón o negro que ayuda a la formación de coágulos. Esta masa gelatinosa actúa como una matriz física a la que pueden adherirse las plaquetas. Con la agregación plaquetaria y la formación de un tapón de plaquetas y fibrina, se produce hemostática.

ALMACENAMIENTO

El producto se suministra estéril y a pirógeno. Las condiciones de esterilidad permanecen intactas siempre que el envase no se haya abierto o deteriorado y no haya vencido la fecha de caducidad del producto. Hasta su utilización, el producto debe almacenarse en un lugar fresco y seco protegido de la luz solar directa. Temperatura de almacenamiento prescrita: +10 °C a 30 °C (+50 °F - 86 °F)

REGISTRO SANITARIO

REGISTRO SANITARIO No.	VIGENTE HASTA	RIESGO
2019DM-0019912	12/06/2029	III

PRODUCTO

Código	Descripción	Presentación
CC-507	CuraCel Standard 50 x 75 mm	Caja por 12
CC-535	CuraCel Standard 50 x 350 mm	Caja por 12
CC-540	CuraCel Standard 100 x 200 mm	Caja por 12

General Médica de Colombia S.A., como Distribuidor Autorizado de Cura Medical B.V.

Calle 103 No. 14 A – 43 - PBX: (57 1) 390 2029 Ext: 129-130

Bogotá, D.C.

www.bimedco.com