








1	NOMBRE DEL PRODUCTO	SAFEDRESSING® INCISE IODINE
2	COMPOSICIÓN	El campo Safedressing® Incise Iodine es una película color ámbar de poliuretano, recubierta con adhesivo hiperalérgico y con PVP-yodo para reducir el riesgo de contaminación por la flora cutánea durante la intervención quirúrgica, empaquetado individualmente estéril. Permite la transpiración de la piel que cubre con una actividad antimicrobiana de amplio espectro contra bacterias gram positivas y gram negativas, SARM (Staphylococcus aureus resistente a la meticilina), levaduras y hongos. Además, el efecto antimicrobiano perdura durante procesos prolongados. (8 horas).
3	CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS	<p>El efecto antimicrobiano se debe a la presencia de yodo molecular (forma libre del yodo elemental). Se considera que el yodo hace precipitar las proteínas de los microorganismos al formar sales mediante el mecanismo de halogenación. Un 90 % del yodo absorbido por las bacterias se reconvierte en yodo, lo que confirma, por tanto, que la interacción oxidativa es el mecanismo bactericida principal del yodo de uso tópico.</p> <p>BENEFICIOS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reduce el riesgo de contaminación de la herida y la tasa de infecciones del sitio operatorio • Se adhiere justo hasta el borde de la herida • Superficie ámbar sin brillo. • Es resistente a la ruptura, pero se puede cortar limpiamente con un bisturí. • Ayuda a mantener estéril el sitio de la cirugía en la que los órganos internos pueden ser colocados sin temor a contaminación. • Continúa actividad antimicrobiana de amplio espectro.
4	MODO DE USO	 <p>Remueve el empaque manteniendo la técnica estéril previa asepsia de piel según protocolo.</p>  <p>Despliega Safedressing Incise Iodine completamente (si es necesario ayúdese de alguien más)</p>  <p>Remueve lentamente el papel protector del adhesivo de forma distal a proximal evitando generar burbujas en el producto</p>  <p>Posterior a la fijación del adhesivo, ejerza presión fijándolo del centro hacia afuera con ayuda de una compresa estéril, eliminando cualquier burbuja del lugar de incisión.</p>  <p>Finalmente retire el papel protector lateral izquierdo</p>  <p>Finalmente retire el papel protector lateral derecho.</p>
5	INDICACIONES DE USO	<p>Safedressing® Incise Iodine está indicado para su uso en los procedimientos quirúrgicos en los que exista la preocupación acerca de la contaminación bacteriana de la herida de la flora de la piel y la actividad antimicrobiana continua. Estos procedimientos quirúrgicos pueden incluir cirugías como:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ortopedia • Neurocirugía • Abdominal Mayor • Cirugía Plástica • Corazón abierto y Torácico • Oftálmica • Pediátrica
6	PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS	Es para uso único y sólo para uso externo. Se debe mantener la técnica estéril durante la colocación de Safedressing Incise Iodine, al retirar evitar provocar cualquier lesión asociada a los adhesivos, se recomienda como antiséptico de elección Iodofoam® y Iodopovidol® con el fin de utilizar el mismo principio activo que tiene impregnado Safedressing Incise Iodine.
7	CONTRAINDICACIONES	No emplear el apósito en pacientes con hipersensibilidad al compuesto
8	REGISTRO SANITARIO No.	INVIMA 2016DM-0015629
9	TIPO DE DISPOSITIVO	NO INVASIVO MÉTODO DE ESTERILIZACIÓN: RADIACIÓN GAMA
10	FABRICADO POR	PHARMAPLAST S.A.E con domicilio en Egipto
11	DISTRIBUIDO POR	ASEPSIS PRODUCTS DE COLOMBIA -PROASEPSIS S.A.S con domicilio en Bogotá D.C
12	CONDICIONES DE VENTA	CLASIFICACIÓN DE RIESGO III

VIGENCIA DEL DOCUMENTO
2026/SEP

ME-FT-100 V02



REFERENCIA PROASEPSIS	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE EMPAQUE
IY 3028	Safedressing® Incise Iodine 30cm x 28cm	CAJA x 10 UNIDADES
IY 4555	Safedressing® Incise Iodine 45cm x 55cm	CAJA x 10 UNIDADES

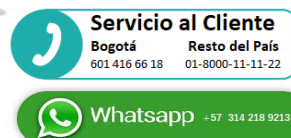

ASEPSIS PRODUCTS DE COLOMBIA S.A.S
"PROASEPSIS" S.A.S
Av Calle 63 N° 74B-42 Bodegas 7.8.9 y 18
Parque Empresarial Normandía
E-mail: proasepsis@proasepsis.com
Bogotá D.C., Colombia