



WELLEAD®

Catéter Externo Masculino

1	NOMBRE DEL PRODUCTO	Wellead® Catéter externo Masculino
2	COMPOSICIÓN:	El catéter externo masculino de silicona no contiene latex esta hecho de Silicona de grado medico 100%.
3	DESCRIPCIÓN	Catéter masculino externo es autoadhesivo y diseñado para la gestión de incontinencia urinaria masculina. Esta fabricado de una silicona respirable la cual proporciona confortabilidad al llevarlo y previene irritaciones en la piel del paciente. La apariencia transparente ofrece constante visibilidad de la piel, así que puede permanecer monitoreando que el catéter este en su lugar. Es fácil de poner y quitar y proporciona buen ajuste al paciente.
4	ESTABILIDAD	Vida útil de cinco años a partir de la fecha de fabricación.
5	INDICACIÓN	Incontinencia urinaria masculina, indicado para uso en servicios de cuidados intensivos, unidades de cuidado renal, indicado para la cuantificación de líquidos eliminados en pacientes masculinos. Cateterización uretral para el uso externo de pacientes masculinos con incontinencia urinaria y personas ancianas con discapacidad. Se aplica clínicamente en urología, neurología, departamentos de rehabilitación, departamento de geriatría, comunidad.
6	INSTRUCCIONES DE USO	<p>1. Luego de lavado de manos, realizar la higiene perineal y genital del usuario se debe realizar medición del diametro del pene con el fin de utilizar el tamaño adecuado para cada paciente.</p> <p>2. Retraer el prepucio para una mejor higiene, utilice un jabón muy suave y una vez terminada la limpieza, retire completamente residuos de jabón.</p> <p>3. Seque muy bien el área genital pene y piel circundante.</p> <p>4. Tome el dispositivo en las manos e inicie la colocación tomándolo de la punta y colocándolo sobre el pene, detrás del glande, luego aplíquelo o desenróllelo completamente sobre todo el cuerpo del pene para asegurar su adherencia.</p> <p>5. Una vez instalado el colector, inserte la bolsa recolectora de orina en el extremo superior de este y sujételo de forma segura al paciente, evitando traumatismos o lesiones de piel en su fijación.</p> <p>6. RETIRO: Si no es adhesivo simplemente desconecte con cuidado la bolsa recolectora, retire el colector desde la base del pene hacia el glande y retire totalmente. Si es con adhesivo, puede apoyarse con agua tibia para retirar el producto evitando lesiones en pieles vulnerables.</p>
7	PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS	<ul style="list-style-type: none"> En caso de irritación o malestar local suspenda el uso del producto. Uso externo e individual solamente, es de único uso, se sugiere realizar el cambio cada 24 horas con el baño general del paciente
8	CONTRAINDICACIONES	Hipersensibilidad a la Silicona
9	REGISTRO SANITARIO No.	INVIMA 2018DM-0019163
10	TIPO DE DISPOSITIVO	INVASIVO
11	FABRICADO POR	WELL LEAD MEDICAL CO. LTD CON DOMICILIO EN CHINA
12	DISTRIBUIDO POR	ASEPSIS PRODUCTS DE COLOMBIA SAS. PROASEPSIS SAS. CON DOMICILIO EN BOGOTÁ - D.C.
13	CONDICIONES DE VENTA	RIESGO I

VENCIMIENTO
DOCUMENTARIO
2026/SEP

V4

ME-FT-18



REFERENCIA	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE EMPAQUE
36302	29 mm	UNIDAD
36306	32mm	UNIDAD
36304	36 mm	UNIDAD


ASEPSIS PRODUCTS DE COLOMBIA S.A.S "PROASEPSIS" S.A.S

Av Calle 63 N° 74B-42 Bodegas 7,8,9 y 18

Parque Empresarial Normandía

E-mail: proasepsis@proasepsis.com

Bogotá D.C., Colombia

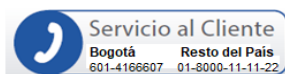

+57 3142189213

www.proasepsis.com.co