

1	NOMBRE DEL PRODUCTO:	VENA VEND®. - VENDA IMPREGNADA CON ÓXIDO DE ZINC CON O SIN CALAMINA
2	COMPOSICIÓN:	Venda con Óxido de Zinc. Venda con Óxido de Zinc con calamina
3	DESCRIPCIÓN:	Venda extensible impregnada con Óxido de Zinc en un rollo de venda de algodón 100% de tejido plano, saturado con una pasta de Óxido de Zinc con y sin Calamina . Sin Calamina 100 gr de Pasta = 27 gr Óxido de Zinc y 100 gr Vehículo c.b.p. Con Calamina 100 gr = 2 gr Calamina + 26.5 gr de Óxido de Zinc y 100 gr Vehículo c.b.p.
4	CARACTERÍSTICAS	Bolsa sellada térmica, no se endurece, No se deshilacha, No contiene conservadores.
5	INDICACIÓN	Tratamiento ambulatorio de piernas con úlceras. Estasis venosas. Edema linfático. Tromboflebitis. Eczema de las piernas.
6	INSTRUCCIONES DE USO	1. Valorar y limpiar la herida 2. Colocar al paciente con la pierna elevada y con ángulo recto, colocar venda desde la base de los dedos del pie, sin ejercer presión, sobreponiendo sobre cada giro un 50% de la venda, sin arrugas o pliegues hasta la rodilla. 3. Complemente la curación con venda de alta compresion Elastomedic® Le Roy® o vendaje elastico para generar sostenibilidad.
7	PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS	*En caso de presentar reacción alérgica a alguno de sus componentes suspenda su uso y consulte su medico *Uso externo. *Mantengase fuera del alcance de los niños. *Consérvese en lugar seco y fresco. *Almacene en lugar protegido del sol. *Material de curación NO estéril. *Producto de unico uso. *Requiere prescripción médica *De uso Personal
8	CONTRAINDICACIONES	*Hipersensibilidad al oxido de zinc y / o Calamina *No colocar en ulceras arteriales o mixtas
9	REGISTRO SANITARIO No.	INVIMA 2020DM-0022476
10	TIPO DE DISPOSITIVO	NO INVASIVO
11	FABRICADO POR	LABORATORIOS LE ROY, S.A EN C.V. CON DOMICILIO EN MEXICO
12	DISTRIBUIDO POR	ASEPSIS PRODUCTS DE COLOMBIA SAS. PROASEPSIS SAS. CON DOMICILIO EN BOGOTÁ - D.C.
13	CONDICIONES DE VENTA	Riesgo IIA



REFERENCIA	CODIGO DE BARRAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE EMPAQUE
10758	729513107586	Venda VENA VEND de 7,6 cm x 9,1m (3" x 10 yds) con oxido de zinc	Unidad
10759	729513107593	Venda VENA VEND de 10,2 cm x 9,1m (4" x 10 yds) con óxido de zinc	Unidad
10760	729513107603	Venda VENA VEND con Calamina y óxido de zinc de 7,6 cm x 9,1m (3" x 10 yds)	Unidad
10761	729513107613	Venda VENA VEND con Calamina y óxido de zinc de 10,2 cm x 9,1m (4" x 10 yds)	Unidad

ME-FT-123 V.02



3142189213

ASEPSIS PRODUCTS DE COLOMBIA S.A.S

Av Calle 63 N° 74B-42 Bodega 7,8, 9 Y 18

Parque Empresarial Normandía

E-mail: servicioalcliente@proasepsis.com

Bogotá D.C., Colombia

www.proasepsis.com.co