



SAFEDRESSING® FOAM GENTLE

Apósito de espuma trilaminada absorbente con adhesivo de silicona suave

1	NOMBRE DEL PRODUCTO:	SAFEDRESSING® FOAM GENTLE
2	COMPOSICIÓN:	Safedressing® Foam Gentle es un apósito de espuma de poliuretano, hoja superior de poliuretano y la capa de gel de silicona, superficie exterior de película de poliuretano transpirable, resistente al agua.
3	DESCRIPCIÓN:	<ul style="list-style-type: none"> • El gel suave y ligero de silicona permite que la remoción del apósito sea indolora y no traumática. • La capa de silicona perforada permite el paso del exudado de la herida a la capa de espuma, lo que evita la maceración de la piel. • La espuma de PU tiene capacidad de absorción de exudado leve a moderado. • La capa de extensión difunde el exudado en la capa de retención. • La capa superior es transpirable, lo que permite la evaporación del exudado mejorando la capacidad absorbente del apósito. • Es ideal para la prevención de lesiones por presión.
4	INDICACIÓN	<p>Safedressing® Foam Gentle está indicado en heridas de cualquier etiología con exudado de leve a moderado.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Heridas quirúrgicas. • Heridas traumáticas con pérdida de piel. • También pueden emplearse debajo de vendajes de compresión. • Se puede utilizar como prevención de lesiones por presión. • La pierna y úlceras por presión, úlceras diabéticas • Primero y segundo grado de quemaduras.
5	INSTRUCCIONES DE USO	<ul style="list-style-type: none"> • Limpie y seque la herida cuidadosamente. • Retire la película protectora de la capa de silicona de contacto con la herida. • Se deberá elegir un apósito que sobrepase como mínimo dos centímetros del borde de la herida. Si fuera necesario, Safedressing® Foam Gentle se puede cortar antes de retirar la película protectora para ajustar el tamaño o la forma. Una vez colocado en su sitio, el apósito se puede sujetar con un vendaje u tipo de fijación adecuado.
6	PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS	Es para uso único y sólo para uso externo. En el caso de que exista una infección, se puede seguir empleando Safedressing® Foam Gentle, pero bajo supervisión médica y de forma conjunta con un tratamiento antibiótico.
7	CONTRAINDICACIONES	Los apósitos Safedressing® Foam Gentle no deben emplearse conjuntamente con agentes oxidantes como soluciones de hipoclorito o de peróxido de hidrógeno, ya que puede destruir el componente absorbente de poliuretano del apósito.
8	REGISTRO INVIMA	2016 DM-0015228
9	TIPO DE DISPOSITIVO	NO INVASIVO MÉTODO DE ESTERILIZACIÓN: ETO
10	FABRICADO POR	PHARMAPLAST S.A.E con domicilio en Egipto
11	DISTRIBUIDO POR	ASEPSIS PRODUCTS DE COLOMBIA - PROASEPSIS S.A.S con domicilio en Bogotá D.C
12	CLASIFICACIÓN DEL RIESO	IIb


Vigencia del
Documento 2026/SEP

V01


ME-FT-96



1. Película protectora.
2. Capa de gel de silicona perforada.
3. Espuma de poliuretano.
4. Película de poliuretano.

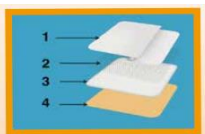

REFERENCIA	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE EMPAQUE
EG 10	Safedressing® FOAM GENTLE 10cm x 10cm	CAJA x 10 UNIDADES
EG 15	Safedressing® FOAM GENTLE 15cm x 15cm	CAJA x 10 UNIDADES

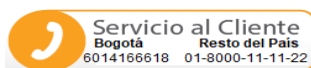

ASEPSIS PRODUCTS DE COLOMBIA S.A.S
"PROASEPSIS" S.A.S

Av Calle 63 N° 74B-42 Bodegas 7, 8, 9 Y 18.

Parque Empresarial Normandía

E-mail: proasepsis@proasepsis.com

Bogotá D.C., Colombia

www.proasepsis.com.co