







1	NOMBRE DEL PRODUCTO	SAFEDRESSING® CHG Apósito de gasa parafinada con Digluconato de Clorhexidina
2	COMPOSICIÓN	Safedressing® CHG es un tejido de gasa hecho de fibra de algodón y lino, impregnado con parafina blanda blanca y Digluconato de Clorhexidina BP al 0,5%.
3	CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS	<ul style="list-style-type: none"> • Esteril a rayos gamma. • Empacado individualmente en bolsas de aluminio. • Esta impregnado con gelatina de parafina que forma una capa independiente de la herida, evitando que se adhiera, brindando una rápida recuperación. • Protege el tejido recientemente formado minimizando el dolor del paciente durante el cambio de apósito. • Se puede cortar de acuerdo a la necesidad.
4	MODO DE USO	 <p>Abra el empaque y saque el apósito</p>  <p>Retire el papel de protección de ambos lados del vendaje y tírelo.</p>  <p>El vendaje deberá sujetarse con ayuda de instrumentos asépticos (pinzas).</p>  <p>Aplique sobre la herida.</p>  <p>Cúbralo con un apósito secundario absorbente, por ejemplo Safedressing® foam.</p>  <p>Fijelo con ayuda de una venda</p>
5	INDICACIONES DE USO	<p>Safedressing® CHG es utilizado:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Como una primera capa de contacto con la herida, en el tratamiento de quemaduras menores y escaldaduras, úlceras, injertos de piel y en diversas lesiones traumáticas. • También se utiliza en calidad de sustrato para el transporte de injertos durante el trasplante de piel. • Puede ser utilizado para el tratamiento de heridas infectadas o heridas con alto riesgo de infección.
6	PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS	<ul style="list-style-type: none"> • Si Safedressing® CHG se mantiene sobre la herida por períodos prolongados de tiempo, puede pegarse a su superficie causando daños en los tejidos al retirar el apósito. • Safedressing® CHG debe almacenarse en un lugar seco y fresco. *Se recomienda dejar el apósito hasta 72 horas en una herida.
7	CONTRAINDICACIONES	<ul style="list-style-type: none"> *A pesar de que no existen contraindicaciones absolutas en el uso de Safedressing® CHG, si el apósito es colocado sobre una herida con abundante exudado, su naturaleza semi-oclusiva puede provocar la maceración tisular. *Safedressing® CHG no debe utilizarse en pacientes con hipersensibilidad a la Clorhexidina.
8	REGISTRO SANITARIO No.	INVIMA 2016 DM-0015611
9	TIPO DE DISPOSITIVO	NO INVASIVO
10	FABRICADO POR	PHARMAPLAST S.A.E con domicilio en Egipto
11	DISTRIBUIDO POR	ASEPSIS PRODUCTS DE COLOMBIA -PROASEPSIS S.A.S con domicilio en Bogotá D.C
12	CONDICIONES DE VENTA	CLASIFICACIÓN DE RIESGO III



REFERENCIA PROASEPSIS	REFERENCIA FABRICANTE	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE EMPAQUE
TL 5	TULLPLUS555	Safedressing® CHG 5cm x 5cm	Caja x 10 unidades
TL 10	TULLPLUS1010	Safedressing® CHG 10cm x 10cm	Caja x 10 unidades
TL 15	TULLPLUS1520	Safedressing® CHG 15cm x 20cm	Caja x 10 unidades
TL R1	TULLPLUS1015	Safedressing® CHG 15cm x 1 Metro	Rollo