



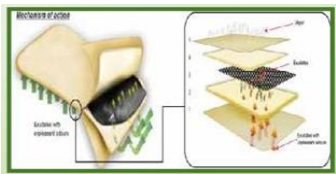

1	NOMBRE DEL PRODUCTO	Safedressing® Foam Silver Carbon
2	COMPOSICIÓN	<p>Producto estéril conformado por:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Película de poliuretano perforada o red de poliuretano con plata.</li> <li>2. Espuma de poliuretano de 5 mm de grosor.</li> <li>3. Almohadilla con carbón activado.</li> <li>4. Espuma de poliuretano de 3 mm de grosor.</li> <li>5. Película de poliuretano de color piel de 25 micrómetros.</li> </ol> 
3	CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• En su interior consta de una capa de carbón activado laminada útil para el control de olores y una red de polietileno con plata iónica que tiene efecto antimicrobiano sobre la colonización de la herida.</li> <li>• Las capas de espuma de poliuretano externa e interna tiene una alta capacidad para la absorción de exudado de moderado a alto.</li> <li>• La película de poliuretano semipermeable más externa actúa como barrera antivirica y antibacteriana que permite la evaporación del exudado y así mantener la humedad óptima.</li> <li>• La capa que está en contacto con la herida es una película de poliuretano perforada, antiadherente que permite retirar el apósito sin causar dolor ni traumatismo; tiene una red de polietileno con plata iónica, con efecto antimicrobiano que actúa en el metabolismo de las bacterias rompiendo la pared celular bacteriana uniéndose al ADN inhibiendo de esta forma la replicación y la probabilidad del desarrollo de resistencia.</li> <li>• Al contacto con el exudado de la herida su interior se gelifica y se asegura en el interior de la matriz, sus bordes externos están sellados con un método especial de fabricación para evitar derrames y maceración de la piel.</li> </ul>
4	MODO DE USO	<div> <div>  <p><b>1</b></p> <p>Abrir el empaque del borde superior, halando las pestañas y saque el apósito</p> </div> <div>  <p><b>2</b></p> <p>Colocar la cara más clara sobre el lecho de la herida No recortar el apósito</p> </div> <div>  <p><b>3</b></p> <p>Requiere de fijación con cinta o vendaje de sujeción; realice cambio de 24 a 72 horas, según exudado de la herida.</p> </div> </div> <p>Safedressing® Foam Silver Carbon es un apósito de espuma en poliuretano altamente absorbente, cuando hace contacto con el exudado la espuma absorbe de forma masiva formando un gel suave que se asegura en el interior de la matriz, convirtiéndose en un suave gel que permite la remoción atraumática del apósito. Los bordes del apósito están sellados con un método especial de fabricación para evitar los derrames y la maceración de la piel perilesional.</p>
5	INDICACIONES DE USO	<p>Safedressing® Foam Silver Carbon está indicado en heridas de cualquier etiología con exudado de moderado a alto.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Heridas infectadas o colonizadas.</li> <li>• Heridas de evolución tórpida.</li> <li>• Control de exudado y olor.</li> <li>• Heridas de cualquier etiología.</li> </ul>
6	PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Heridas sin exudado o con tejido necrótico seco.</li> <li>• Heridas que alcanzan huesos o tendinosas</li> <li>• En el caso de Safedressing® Foam Silver Carbon, la experiencia con recién nacidos, niños y durante el embarazo es escasa</li> </ul>
7	CONTRAINDICACIONES	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No usar conjuntamente con agentes oxidantes como las soluciones de hipoclorito o de peróxido de hidrógeno, ya que puede destruir el componente absorbente hidrológico del apósito.</li> <li>• No utilizar conjuntamente con soluciones de hipoclorito o de hidrogeno ya que pueden destruir su composición hidrológica</li> </ul>
8	REGISTRO SANITARIO No.	INVIMA 2016DM-0015497
9	TIPO DE DISPOSITIVO	NO INVASIVO MÉTODO DE ESTERILIZACIÓN: ETO
10	FABRICADO POR	PHARMAPLAST S.A.E con domicilio en Egipto
11	DISTRIBUIDO POR	ASEPSIS PRODUCTS DE COLOMBIA - PROASEPSIS S.A.S con domicilio en Bogotá D.C
12	CONDICIONES DE VENTA	CLASIFICACIÓN DE RIESGO IIB

VIGENCIA DOCUMENTARIA : 2025SEP

ME-FT-98 V03

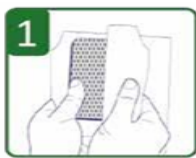

REFERENCIA PROASEPSIS	REFERENCIA FABRICANTE	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE EMPAQUE
SPC 10	SUPERFOAM CAG 100-100	Safedressing® Foam Silver C 10cm x 10cm	CAJA x 5 UNIDADES
SPC 15	SUPERFOAM CAG 150-150	Safedressing® Foam Silver C 15cm x 15cm	CAJA x 5 UNIDADES

**Servicio al Cliente**  
Bogotá Resto del País  
6014166618 01-8000-11-11-22

**Whatsapp** +57 314 218 9213

ASEPSIS PRODUCTS DE COLOMBIA S.A.S  
"PROASEPSIS" S.A.S  
Av Calle 63 N° 74B-42 Bodegas 7,8,9 y 18  
Parque Empresarial Normandía  
E-mail: proasepsis@proasepsis.com  
Bogotá D.C., Colombia