

# **Proasepsis Ltda**

## **BICAKCILAR BTDS -2001**

### **SISTEMA DE DRENAJE TORAXICO**



#### **DESCRIPCIÓN:**

La unidad de drenaje torácico **BTDS-2001**, es una unidad compacta sellada herméticamente utilizada para facilitar la succión pleural continua en el manejo de pacientes sometidos a cirugía de tórax o que la requieran como consecuencia de un hemotórax o neumotórax traumático.

#### **INDICACIONES:**

- \* Evacuación y recolección de fluidos y/o aire de la cavidad pleural y mediastinal en situaciones de trauma y post-operatorias.
- \* Prevención de acumulación de fluidos y/o aire en la cavidad pleural y mediastinal.
- \* Facilitar la re-expansión del pulmón y restaurar las dinámicas normales de respiración.

#### **VENTAJAS:**

- Uso personalizado
- Sello de agua
- Capacidad de recolección de 2000 cc
- Firme posición para evitar volcamientos accidentales
- Extensión del tubo: 150 cm
- Suave y fácil de ordeñar
- Transparente
- Resistente
- Conector de tubo diseñado especialmente para aceptar diferentes tamaños de catéteres torácicos
- Fácilmente manipulable para conveniencia del paciente
- Usted puede escribir el tiempo de drenado sobre la escala de volumen de drenado.

**Asepsis Products de Colombia - Proasepsis Ltda.**

**Servicio al Cliente**

**En Bogotá: 416 6618**

**Resto del país: 01 800 0111122**

# **Proasepsis Ltda**

## **BICAKCILAR BTDS -2001**

**SISTEMA DE DRENAJE TORAXICO**



### **INSTRUCCIONES DE USO:**

- Retire el obturador de ventilación del conector corto
- Llene el sistema de drenaje con una solución estéril hasta el nivel marcado como 0 ml (primer nivel), esto corresponde a una base de 200 cm  
Nota: El nivel del líquido tiene que cubrir la extremidad del tubo interno largo
- Retire el tapón del tubo que se conectará al tubo de tórax del paciente. Éste tubo tiene una conexión plástica blanca con un puerto de entrada para tomar muestras de fluidos. Este puerto de entrada debe permanecer cerrado con la tapa azul.
- Conecte el otro tubo corto al sistema de succión que su institución utilice, utilice un tubo de 3/8" (9.52c,) para realizar ésta conexión.
- Para vaciar el contenido del sistema drenaje BICAKCILAR, retire la tapa blanca que cubre el obturador de evacuación. Como distribuidores de éste producto PROASEPSIS LTDA no recomienda la manipulación para desocupar esta unidad de drenaje cerrado, ya que es considerado un residuo médico contaminado y debe desecharse de acuerdo con los protocolos de cada institución.

### **PRECAUCIONES:**

- El sistema de drenaje BICAKCILAR deberá siempre mantenerse por debajo del nivel de tórax del paciente.
- Asegúrelo siempre utilizando la correa plástica de sujeción.

**Asepsis Products de Colombia - Proasepsis Ltda.**

**Servicio al Cliente**  
**En Bogotá: 416 6618      Resto del país: 01 800 0111122**