

KANGAROO™

SET DE NUTRICIÓN ENTERAL BOLSA 500 ML BOMBA E-PUMP

Ficha Técnica

Marca:	KANGAROO™
Clasificación de riesgo:	IIA
Método de esterilización:	NE
Vida útil:	48 meses

Set para suministrar nutrición enteral, cuenta con bolsa de 500 ml la cuál permite envasar fórmulas nutricionales. El conector del set de alimentación es incompatible con las conexiones luer lock o IV, lo que reduce el riesgo de una conexión o infusión accidental. Disponible con conexiones enterales seguras para abordar la alerta de evento Sentinel de conexiones erróneas de tuberías de la JCAHO de 2006.

1. Información básica del producto

- Material de Poli cloruro de vinilo (P.V.C.) y tubo de silicona transparente.
- Todas las bolsas de alimentación Kangaroo™ son libres de DEHP (Di-2-Etilhexilftalato).
- El tubo de silicona se adhiere al rotor y permite girar y mezclar la fórmula nutricional.
- Tapa de ingreso forma nutricional: es una amplia tapa de cierre hermético que facilita llenar, guardar y trasladar la nutrición sin fugas.
- Reglilla numérica y transparencia de la bolsa: permite registro volumétrico de la fórmula a infundir y evaluar la homeogeneidad de la fórmula nutricional.
- Empaque individual.
- Punta distal con conector ENFit que atiende lineamientos internacionales para promover la seguridad del paciente.
- Apta para uso con Bomba E Pump.

2. Precaución:

Este es un set diseñado para bebés, niños y adultos con algún trastorno que requiera nutrición y/o Hidratación por vía Enteral. No está destinado para uso en Neonatos.

3. Indicaciones de Uso

1. Lávese las manos
2. Llene la bolsa con la cantidad indicada de la fórmula
3. Cierre la bolsa y cuélguela, para utilizar con sistema de Alimentación enteral Kangaroo Epump. La parte inferior del contenedor de alimentación debe estar 46 cm por encima de la parte superior de la Bomba de alimentación.
4. Oprima el botón en el tablero de la bomba de Encendido/Apagado
5. Instale el set de nutrición en la Bomba de alimentación enteral Kangaroo Epump. Y programe la bomba para nutrición.
6. Confirme que el adaptador esté conectado únicamente a un puerto enteral y no a un set intravenoso.
7. Proceda a administrar la fórmula.



4. Nota

- * Este set sirve solo para administrar nutrición enteral.
- * Es recomendable cambiar el equipo cada 24 horas.
- * Si se requieren varias tomas durante el turno, se debe lavar tanto la bolsa como la línea del set al terminar la nutrición, para evitar que se presenten oclusiones.
- * La instalación del set se puede hacer con la Bomba encendida o apagada.
- * Si va a retirar el set debe hacerlo con la bomba de Alimentación Apagada para evitar que se desalineee la válvula del set.

5. Presentación

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE EMPAQUE
772055	Set de alimentación, bolsa de 500ml	Caja x 30 Unidades

Número de Registro INVIMA 2018DM-0018086
Fecha Vencimiento registro 29/ 05/ 2028
Fabricante : CARDINAL HEALTH 200 LLC - USA