

BOMBA DE NUTRICIÓN ENTERAL KANGAROO e-PUMP



CardinalHealth
Essential to care™

*Logistics
Product
Business
Patient*

SETS PARA ALIMENTACIÓN ENTERAL

- Sets para administración de nutrición enteral
 - Conector lila escalonado
 - Set de instalación
 - Capacidad de 500 ml y 1000 ml
 - Elaboradas de PVC
 - Libres de DEHP
 - Tapa y conectores identificados con color morado.
 - Con opción a sistema de doble bolsa Feed& Flush y spike & flush (alimento y agua)
 - No estériles



BOMBAS DE INFUSIÓN PARA NUTRICIÓN ENTERAL

KANGAROO™ EPUMP

LA REVOLUCIÓN EN LA
ADMINISTRACIÓN DE
ALIMENTACIÓN ENTERAL EMPIEZA
CON LAS 4 e



1. e significa fácil (easy)

Indicaciones fáciles paso a paso, interfaz intuitiva con el usuario y carga de configuración simplificada.

2. e significa para todos (everybody)

Apropiado para pacientes pediátricos y adultos.


3. e significa en todas partes (everywhere)

Transportable fácilmente, con paquete de baterías hasta para 15 horas de energía de respaldo.


4. e significa enteral

Alimentación enteral continua o en bolo segura y confiable



PARTES DEL EQUIPO - FRONTAL

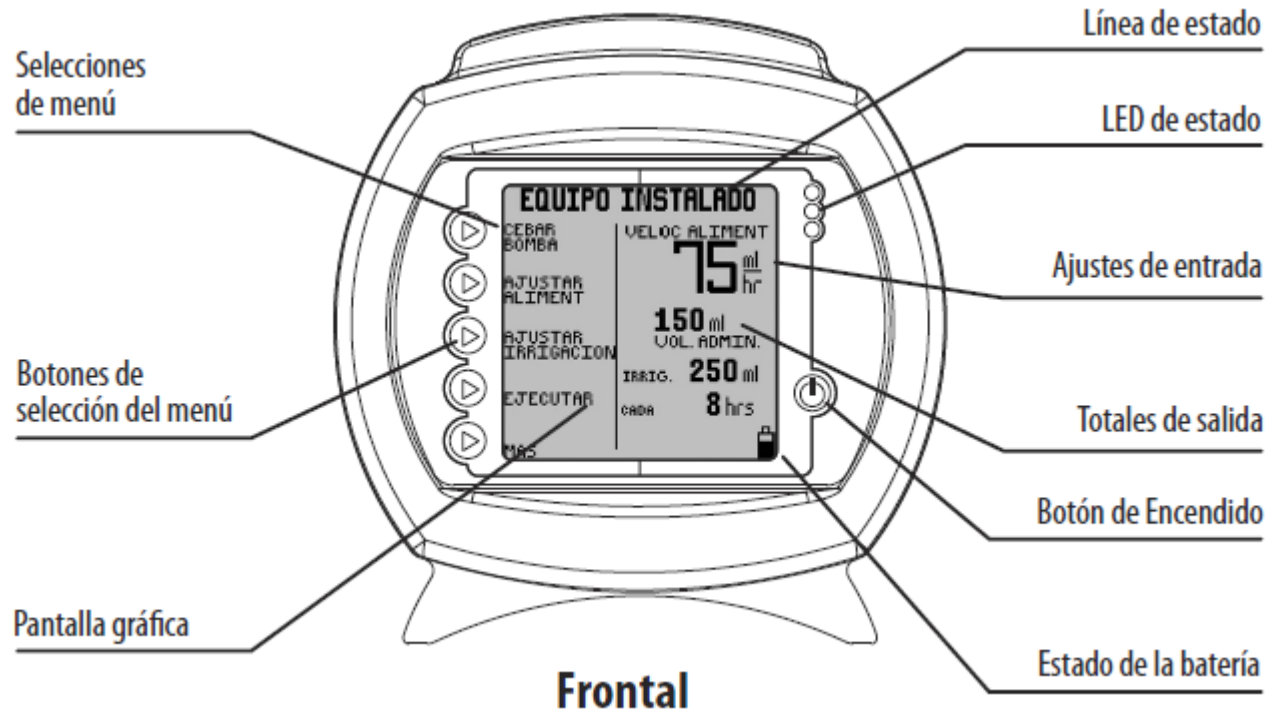


PARTES DEL EQUIPO - POSTERIOR

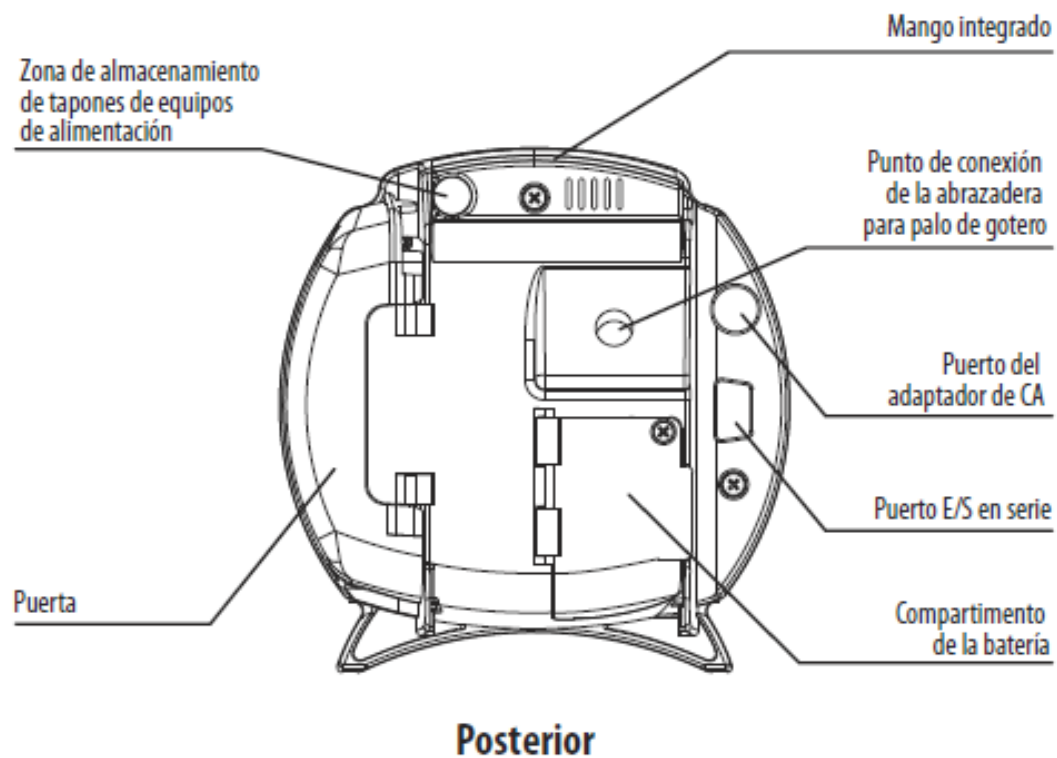


PARTES DEL EQUIPO - LATERAL

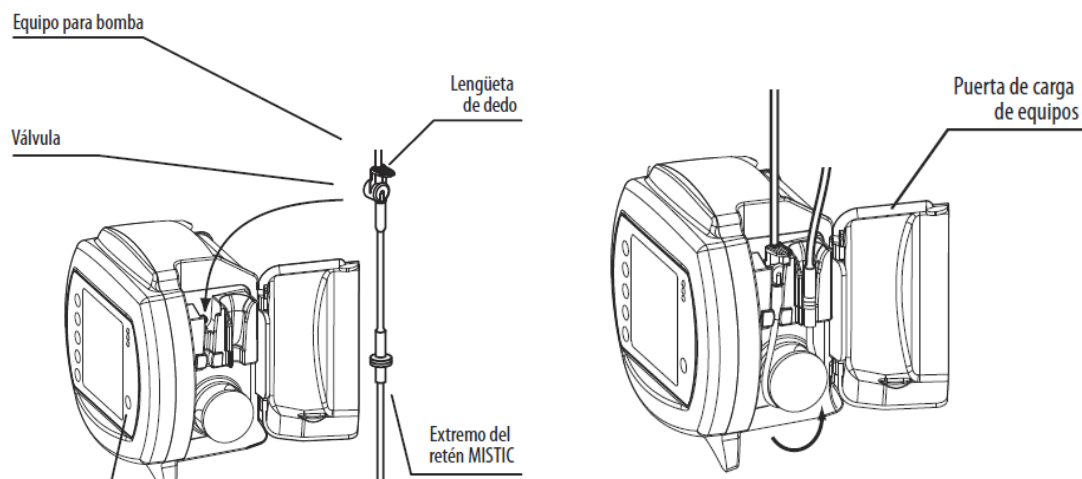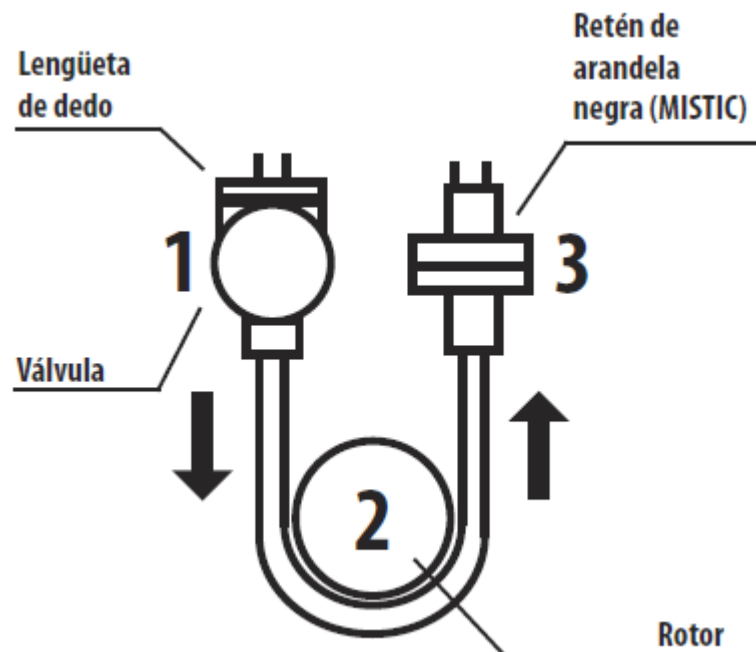

Cebar Bomba:

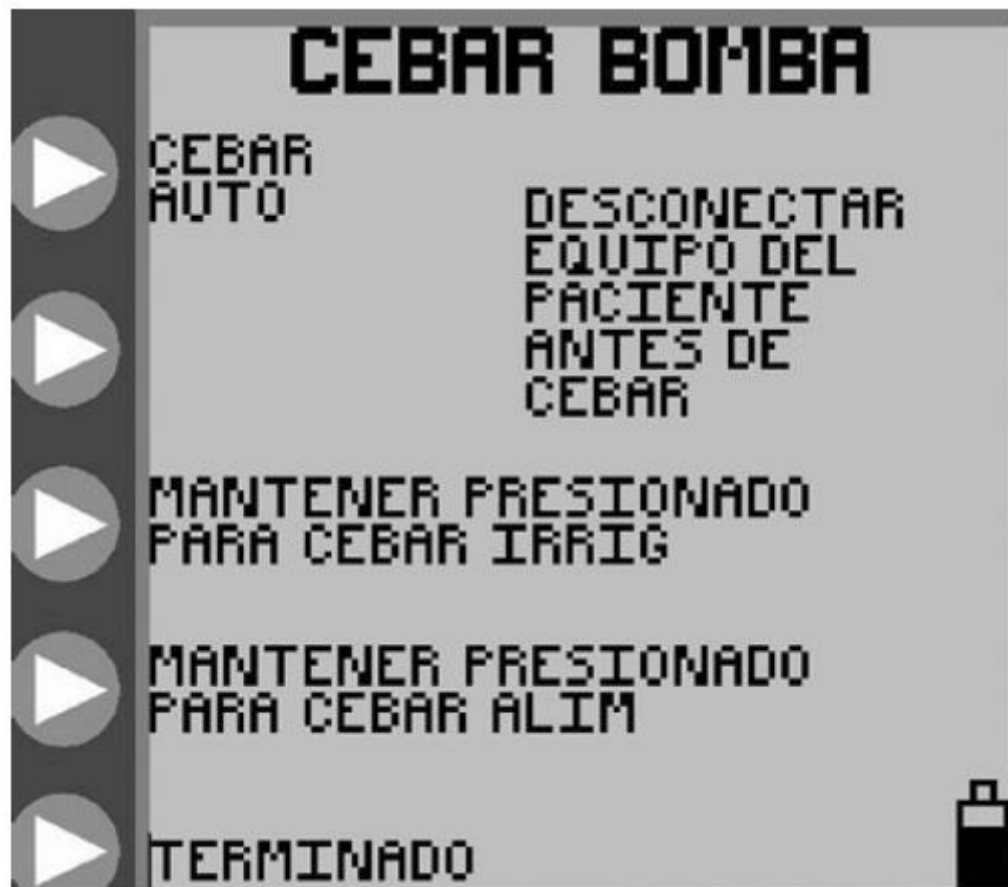

Ajustar alimentación

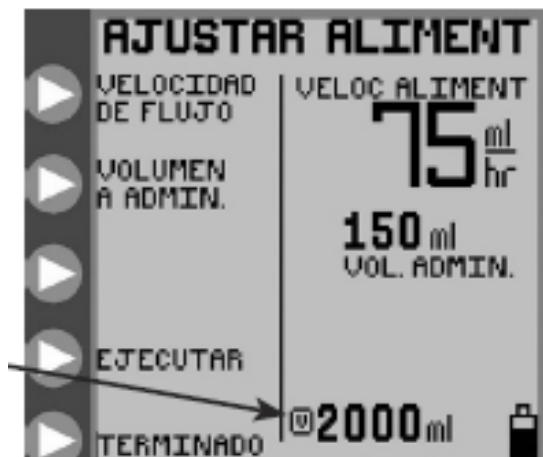

Al establecer un VOLUMEN A ADMIN, el volumen para administrar restante aparecerá junto al icono  en la parte inferior derecha de la pantalla



VELOCIDAD DE FLUJO: Para programar la velocidad de 1 a máximo 400 en incrementos de 1 ml/hr



VOLUMEN A ADMIN: Para programar el volumen de 1 a máximo 3000 ml en incrementos de 1 ml. Si se establece en cero, la bomba seguirá funcionando hasta que se agote el suministro.

Ajustar irrigación



VOL IRRIG A ADMIN

Para programar el volumen de irrigación de 10 a 500 en incrementos de 1 ml



INTERVALO IRRIGACIÓN

Para programar el intervalo de tiempo de 1 a 24 horas en incrementos de 1 hora.

EJECUTAR



La pantalla **EJECUTANDO** mostrará:

1. La velocidad de administración
2. La cantidad proporcionada
3. Los datos de irrigación
4. El volumen para administrar restante (VTBD restante). El VTBD restante aparece junto al icono

KTO Y PAUSA



La función Mantener el tubo abierto (KTO) de la ayudará a evitar el bloqueo del equipo de alimentación moviendo periódicamente la solución de alimentación dentro del tubo, se desplazará una parte pequeña y clínicamente insignificante de la solución de alimentación a través del tubo. Cada vez que se pulse el botón de entrada, aumentará el tiempo de KTO en 5 minutos, hasta un máximo un máximo de 240 minutos.



Se puede hacer una pausa en el funcionamiento de la bomba pulsando PAUSA. La línea de estado indicará PAUSA y el indicador LED amarillo se La alarma de la bomba sonará si se ha dejado en PAUSA durante 10 minutos sin realizar ninguna otra acción, solicitando reanudar o apagar la bomba


OTRAS FUNCIONES EN PAUSA

Hay cinco opciones disponibles durante la **PAUSA**:



- 1. BORRAR VOLUMEN** para devolver a cero los totales de alimentación de salida y “ml IRRIGACIÓN programados”.
- 2. AJUSTAR VALORES** para volver a uno de los menús iniciales con lo que será posible modificar cualquier ajuste.
- 3. REANUDAR EN __ MIN** Pulse esta opción una vez para configurar inmediatamente que la bomba reanude su funcionamiento a los 30 minutos.
- 4. EJECUTAR** para reiniciar inmediatamente el funcionamiento de la bomba.
- 5. HISTORIA.** Utilice esta pantalla para revisar la historia de irrigación y alimentación hasta de las últimas 72hrs.

OTRAS FUNCIONES EN PAUSA

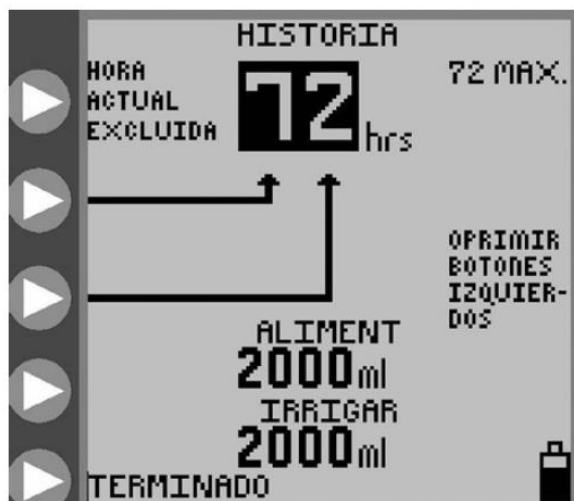

Pulse HISTORIA y a continuación pulse Los botones que indica la pantalla para ajustar la historia de tiempo que desea consultar. Se mostrarán los totales de ml ALIMENTACIÓN y ml IRRIGACIÓN para el tiempo de historia especificado.

Advertencia: Se pueden recuperar como máximo 72 horas de la historia existente, sin incluir los datos de la última hora u hora actual. Esta historia de 72 horas incluye el tiempo durante el que la bomba está apagada.

IRRIGAR AHORA

Durante el modo EJECUCIÓN, la bomba se puede cambiar para que realice inmediatamente una irrigación (irrigación a demanda)

Cuando se pulsa IRRIGAR AHORA, la pantalla le preguntará el volumen que desea irrigar inmediatamente y le mostrará el volumen de irrigación anteriormente programado de manera predeterminada.

El ajuste del volumen de irrigación mediante IRRIGAR AHORA es temporal y no cambia el volumen de irrigación

Si se desea detener IRRIGAR AHORA antes de que se haya administrado el volumen especificado, pulse IRRIGAR AHORA, introduzca un volumen cero y pulse INTRO. IRRIGAR AHORA se detendrá inmediatamente y la bomba volverá al modo EJECUCIÓN.



MAS OPCIONES

