

| BAXTER CONFIDENTIAL - INTERNAL USE ONLY |               |                   |
|-----------------------------------------|---------------|-------------------|
| Part Number: 07-19-00-1742              | Date: 17DEC19 | Proofread No.: 01 |
| Designer: G.V                           | Page: 1 of 1  |                   |
| Colour Reference:                       | BLACK         |                   |

REF **AMC9668**

**Baxter**

spa

Sistema **CLEARLINK**

**Equipo de soluciones CONTINU-FLO**

Válvula de ventilación, 2 válvulas activadas Luer, adaptador Luer Lock macho  
Volumen de cebado ≈ 18mL Longitud ≈ 237cm

Para uso por gravedad y para uso con bombas de infusión Baxter solamente. Para el uso de la bomba, reemplace / use y deseche según las instrucciones en el manual de la bomba / las instrucciones de uso establecidas. Para el uso por gravedad, reemplace el conjunto cada 96 horas o según el protocolo institucional, lo que ocurra primero. La válvula activada por Luer se puede utilizar para hasta 100 actuaciones.

**Precauciones: No lo use si el paquete ha sido abierto o dañado o si los protectores de las puntas están sueltos o faltan.**

Para uso con contenedores rígidos sin ventilación y flexibles.

**Instrucciones de uso: Utilizar técnica aséptica.**

Cierre la pinza reguladora. Inserte la espiga en el recipiente. Apretar la cámara de goteo. Si usa un contenedor rígido sin ventilación, abra la tapa de ventilación e inserte la espiga hacia abajo en el contenedor. [Si utiliza recipientes rígidos sin ventilación de menos de 150 ml, apriete y sostenga completamente la cámara de goteo y no la libere hasta que el recipiente se invierta y se cuelgue]. Si usa un recipiente flexible, inserte la punta con la tapa de ventilación cerrada. Apretar la cámara de goteo. Llene la cámara de goteo para llenar la línea. Abra la pinza de regulación. Asegúrese de que la pinza corriente abajo esté abierta. Enjuague la tubería de aire invirtiendo y golpeando suavemente la válvula CLEARLINK, si corresponde, y cualquier válvula de retención. Si el flujo no comienza, apriete el recipiente de plástico. Invierta y golpee ligeramente la válvula de retención para purgar el aire durante el cebado. Cierre la abrazadera de regulación hasta que el rodillo se encuentre con la parte inferior del marco. Conecte el adaptador Luer macho al dispositivo de punción venosa con un movimiento firme de empuje y torsión y luego enganche el collar de bloqueo Luer para evitar la desconexión accidental. Abra la pinza, regule el flujo. Para configurar correctamente el flujo, siempre cierre la abrazadera de regulación hasta que el rodillo se encuentre con la parte inferior del marco, luego vuelva a abrir para establecer el caudal. Repita el procedimiento si ajusta la abrazadera desde la posición completamente abierta. **Infusión o muestreo a través de la válvula CLEARLINK** Asegúrese de que la pinza corriente abajo esté abierta. Sostenga la válvula CLEARLINK firmemente y **limpie** la superficie activada con Luer CLEARLINK con un antiséptico **preferido antes del primer uso y antes de cada conexión posterior**. Acceda a la válvula CLEARLINK con un movimiento firme de empujar y girar y enganche el collar de bloqueo Luer. Para desconectar el adaptador de bloqueo Luer de la válvula CLEARLINK, sujete y gire el adaptador de bloqueo Luer hacia la izquierda.

**Precauciones:** No permita que el aire quede atrapado en el equipo. La perforación de este equipo en cualquier punto puede causar una embolia gaseosa. No regule el flujo con la abrazadera deslizante. Consulte la información del medicamento antes de la administración para detectar posibles incompatibilidades entre el medicamento y el PVC. Si se interrumpe la trayectoria del fluido, asegúrese de que la vía del fluido no haya sido contaminada. No limpie la superficie activada por Luer cuando la pinza corriente abajo esté cerrada o la válvula esté empotrada, ya que podría producirse una limpieza ineficaz. Reemplace el equipo si la válvula permanece empotrada. **No acceda a la válvula CLEARLINK con agujas o cánulas. Si se intenta dicho acceso, se dañará el producto, reemplace inmediatamente. Se recomienda el uso de conexiones de bloqueo Luer. Si se usa la conexión Luer slip, insértela en la válvula con un movimiento firme de empujar y girar. No deje desatendido Luer slip.** Trazar líneas antes de la conexión. No conecte ningún dispositivo de gas comprimido a los sitios de inyección intravenosa. De un solo uso. No reesterilice. La reutilización o el reprocesamiento de un dispositivo de un solo uso puede provocar contaminación y comprometer la función o integridad estructural del dispositivo.

**Notas:** Para detener el flujo sin molestar al dispositivo de regulación, cierre la abrazadera deslizante. Para la administración de medicamentos secundarios, use la válvula CLEARLINK superior solamente. Vea las instrucciones de uso con los medicamentos secundarios establecidos. Si se desconecta de forma intermitente el juego de la válvula CLEARLINK, cubra inmediatamente el Luer macho del dispositivo de conexión con un protector de reemplazo estéril. Enjuague la válvula CLEARLINK después de la inyección para evitar la mezcla involuntaria de medicamentos / fluidos incompatibles. Enjuague la válvula CLEARLINK después de la infusión de sangre. Si la válvula no puede limpiarse de sangre, cámbiela inmediatamente. El volumen y la longitud son aproximados.

Baxter, Clearlink y Continú-Flo son marcas comerciales de Baxter International Inc.

Importado por:  
Laboratorios Baxter S.A.  
Calle 36 N ° 2C-22  
Cali-Colombia  
R.S. INVIMA 2019DM-0020751

20●H<sub>2</sub>O=1ml±0.1ml

**VOL** 5 ml (40 ± 1°C)  
6 ml (40 ± 1°C / 2 bar)

Volumen de almacenamiento

- 

No use si el paquete ha sido abierto o dañado o si los protectores de las puntas están sueltos o faltan.
- 

Este producto contiene menos de 0.1% w / w DEHP
- 

No Reutilizar
- 

Paso de fluidos apirógeno
- 

Filtro de 15 µm
- 

Presión
- 

Recorrido de fluido estéril usando óxido de etileno
- 

No volver a esterilizar
- 

Fecha de Expiración
- 

Ver folleto de dirección para Español
- 

Fecha de manufactura
- 

Fabricante
- 

Mantener alejado de la luz solar [o calor].
- 

Mantener seco
- 

No fabricado con látex de caucho natural
- 

Contiene o Presencia de PVC

Fabricado por: **Baxter Ltd., A47 Industrial Estate Marsa MRS 3000 – Malta**

**Baxter Healthcare SA**  
8010 Zurich, Suiza



**CE**  
0123

**Hecho en Malta**  
07-19-00-1742  
REV 2020/01