

	TECNOSUR SAS	CODIGO:	CPP-RE-131
	FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO CONTENT ULTRASEC	FECHA:	19-FEB-2024
		VERSIÓN:	15

IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTO

NOMBRE DEL PRODUCTO: ABSORBENTE DESECHABLE PARA ADULTOS CONTENT ULTRASEC	NOTIFICACIÓN SANITARIA: NSOA05905-17CO VIGENTE HASTA: 26-Dic-2030	DESCRIPCIÓN PRODUCTO: PAÑAL DESECHABLE PARA INCONTINENCIA FUERTE
TITULAR Y FABRICANTE: TECNOSUR S.AS. CONJUNTO INDUSTRIAL PARQUE SUR; VILLA RICA, CAUCA.	PAÍS DE ORIGEN: COLOMBIA	TIPO DE PRODUCTO: PRODUCTO ABSORBENTE DE HIGIENE PERSONAL DE USO EXTERNO
COMERCIALIZADO POR: TECNOQUIMICAS S.A. Y TECNOSUR S.A.S		

COMPONENTES

Celulosa, Superabsorbente (Poliacrilato de sodio) Polipropileno, Polietileno, Poliéster, adhesivos, Elásticos.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Sistema superabsorbente con doble colchón (doble capa de pulpa) que absorbe rápidamente, gel superabsorbente que retiene y gelatiniza los líquidos en el interior del pañal y ayuda a neutralizar el olor a orina, producto con indicador de humedad, cintura elastizada para garantizar un mejor ajuste, bandas respirables abullonadas y supersuaves, cinta mecánica pega-despega, barreras altas y cómodas para prevenir filtraciones, capa extra-seca reforzadas que mantiene seca los genitales del adulto evitando filtraciones, elásticos curvos que permiten un mejor diseño anatómico y mejor ajuste al cuerpo, cubierta impermeable tipo tela supersuave. libre de sustancias extrañas y aditivos irritables.

CONTENIDO

Bolsas Por: 1/ 2/ 3/ 6/ 8/ 9/ 10/ 12/ 14/ 16/ 18/ 20/ 21/ 22/ 24/ 26/ 28 /30/ 32/ 34/ 36/ 38/ 40/ 42/ 44/ 46/ 48/ 50/ 52/ 54/ 56/ 60 /90/100/120/150/200 unidades

Tamaños: Tallas S, M, L, XL

MATERIAL DE EMPAQUE

Empaque Primario y Secundario: Bolsas de polietileno (100% Reciclable)

CERTIFICACIONES DE CALIDAD

- Sello De Calidad ICONTEC NTC No. 2882 "*Pañales desechables para incontinencia fuerte*"
- Sistema de Gestión de Calidad: ISO 9001: versión 2015

	TECNOSUR SAS		CODIGO:	CPP-RE-131
	FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO CONTENT ULTRASEC		FECHA:	19-FEB-2024
			VERSIÓN:	15

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO				
<i>Variables Dimensionales</i>				
CARACTERISTICA	UNIDAD	TALLA	ESPECIFICACIÓN INTERNA	
PESO PRODUCTO	Gramos (g)	S	Min: 88.0	Max: 95.0
		M	Min: 108.2	Max: 115.2
		L	Min: Min: 122.7	Max: 128.7
		XL	Min: 125.2	Max: 132.2
LARGO	Milímetros (mm) Centímetros (cm) Pulgadas (")	S	Min 660/66/26"	Max: 680/68/27"
		M	Min: 790/79/31"	Max: 810/81/32"
		L	Min: 940/94/37"	Max: 960/96/38"
		XL	Min: 960/96/37.7"	Max: 970/97.5/38.3"
ANCHO	Milímetros (mm) Centímetros (cm) Pulgadas (")	S	Min: 390/39/15"	Max: 410/41/16"
		M	Min: 390/39/15"	Max: 410/41/16"
		L	Min: 390/39/15"	Max: 410/41/16"
		XL	Min: 390/39/15"	Max: 410/41/16"
ANCHO TOTAL (INCLUIDO SIDE PANEL)	Milímetros (mm) Centímetros (cm) Pulgadas (")	S	Min: 480/48/19"	Max: 560/56/22"
		M	Min:560/56/22"	Max: 640/64/25"
		L	Min:700/70/27"	Max: 780/78/31"
		XL	Min: 730/73/29"	Max: 810/81/32"
CINTURA	Milímetros (mm) Centímetros (cm) Pulgadas (")	S	Min:550/ 55/22"	Max:850/ 85/33"
		M	Min:700/70/30"	Max:1100/110/45"
		L	Min:900/ 90/35"	Max:1450/ 145/60"
		XL	Min:1400/ 140/55"	Max:1650/ 165/65"
PESO USUARIO	Kilogramo (Kg) Libra (Lb)	S	Menos de 50Kg	110Lb
		M	45-75 Kg	100 - 165Lb
		L	75- 110 Kg	155 -240Lb
		XL	Mayor a 100Kg	220Lb

<i>VARIABLES DE DESEMPEÑO</i>				
ANÁLISIS	UNIDAD	TALLA	ESPECIFICACIÓN NTC 2882	ESPECIFICACIÓN INTERNA
ABSORCION	Gramos (g)	S	Min: 800	Objetivo 1000
		M		Objetivo 1148
		L		Objetivo 1236
		XL		Objetivo 1236
RETENCIÓN	Gramos (g)	S	No Aplica	Objetivo 408
		M		Objetivo 474
		L		Objetivo 785
		XL		Objetivo 785
SELLADOS EXTREMOS	Newton (N)	S	Min 2.5	Objetivo 8,0
		M		
		L		
		XL		

	TECNOSUR SAS		CODIGO:	CPP-RE-131
	FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO CONTENT ULTRASEC		FECHA:	19-FEB-2024
			VERSIÓN:	15

ADHESIVIDAD DE CINTAS	Newton (N)	S	Min 10	Min 10
		M		
		L		
		XL		
RETORNO DE HUMEDAD	Gramos (g)	S	Max 60	Max 60
		M		
		L		
		XL		
TIEMPOS DE ABSORCIÓN	Segundos (S)	S	Max 250	Max 250
		M		
		L		
		XL		

INSTRUCCIONES DE USO

PERSONA DE PIE	PASO 1. Retire el pañal envuélvalo hacia el centro y deséchelo. poner un pie hacia delante para evitar la pérdida del equilibrio.
	PASO 2. Limpie el área de genitales con toallas humedad Content, hidrate la piel y en la zona de contacto con el pañal aplique crema protectora
	PASO 3. Ponga el pañal desde atrás hacia delante, selle y acomode. en los hombres tenga precaución que el pene quede hacia abajo
	PASO 4. Retire los guantes deséchelos y ponga ropa al paciente.
PERSONA SENTADA	PASO 1. Con ayuda de otro cuidador, levante el paciente para retirar el pañal envolviendo hacia adentro.
	PASO 2. Limpie el área de genitales con toallas humedad Content, hidrate la piel y en la zona de contacto con el pañal aplique crema protectora.
	PASO 3. Selle el pañal y en los hombres tenga precaución que el pene quede hacia abajo
	PASO 4. Retire los guantes deséchelos y ponga ropa al paciente.
PERSONA ACOSTADA	PASO 1. Despegar las cintas, retire la parte frontal del pañal y envuélvalo hacia adentro.
	PASO 2. Movilice al paciente de lado ponga el protector de cama y termine de retirar el pañal sucio.
	PASO 3. Haga higiene de genitales con toallitas húmedas Content.
	PASO 4. Limpie el área, hidrate la piel y en genitales y glúteos aplique crema protectora.
	PASO 5. Ponga el pañal limpio cerca de cuerpo y rote nuevamente al paciente.
	PASO 6. Selle el pañal y en los hombres tenga precaución que el pene quede hacia abajo.
	PASO 7. Retire los guantes deséchelos y ponga ropa al paciente

INDICACIONES

Absorbente desechable de uso externo

RECOMENDACIONES

- No arrojes los pañales usados al sanitario. Arrójalos al cesto de basura
- Recicla la bolsa del empaque.

	TECNOSUR SAS	CODIGO:	CPP-RE-131
	FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO CONTENT ULTRASEC	FECHA:	19-FEB-2024
		VERSIÓN:	15

PRECAUCIONES

- Mantenga alejado de cualquier fuente que genere llamas o fuego.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Para evitar cualquier riesgo de asfixia no permita que el adulto manipule el producto o alguna de sus partes.
- Mantenga las bolsas plásticas del empaque alejadas del adulto. Deseche cualquier pañal si está rasgado o con partes desprendidas.
- Si observa en la piel del adulto una sustancia gelatinosa transparente, no se alarme, esta proviene de los componentes del pañal y no representan ningún riesgo; retírela con toallitas húmedas o un paño limpio.
- Si el adulto presenta irritación persistente, consulta al médico. Uso externo.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- Conservar el producto en un lugar fresco, limpio, seco alejado de la humedad y protegido de la luz solar directa.
- No almacenar cerca de detergentes, solventes, desinfectantes o sustancias aromáticas
- Ver lote y fecha de fabricación al costado del paquete.

SISTEMA IDENTIFICACIÓN DE LOTE

Codificación directamente sobre el costado del paquete, con tinta indeleble y sistema inkjet con la siguiente composición:

LOTE: XXXXXX –X

FAB: DD/MMM/AA HH:MM: SS

VENCE: MMM/AA-YYY

YYY: Identificación especial para facilitar la trazabilidad de insumos en el producto terminado.

JUSTIFICACION DE BONDADES Y PROCLAMAS

- TECNOLOGIA RAPISORB: Es la combinación de superabsorbente, subcapa y pulpa para facilitar un ingreso de líquido más rápido, frente a la versión de Content anterior.
- Hasta 10 horas de protección.
- Elásticas curvos, suaves y ergonómicos.
- Barreras más altas.
- Indicador de cambio de pañal.
- Dúo Max: Doble capa en la zona central.

Mas ancho atrás con cinturas elastizada.

VIDAL ÚTIL DEL PRODUCTO

Se incluye en cada bolsa de empaque primario ubicada en el costado del producto, se marca con tinta indeleble **Mes/Año de vencimiento (24 meses).**

LMorera

ELABORADO: Lorena Morera Cifuentes

FECHA: 19-Feb-2024

CLJurado

APROBADO: Carmen Lorena Jurado J

FECHA: 19-Feb-2024